

Rekonditionering Falck 6902 EpiMyo

Art.nr 323802



Innehållsförteckning

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Inledning | 3 |
| 1.1 Viktig information | 3 |
| 2. Rekonditioneringsförfarande..... | 3 |
| 2.1 Funktionskontroll | 3 |
| 2.2 Medföljande delar | 3 |
| 2.3 Rengöring..... | 4 |
| 3. Apparatöversikt..... | 4 |
| 4. Återställning..... | 4 |
| 5. Reservdelar/Tillbehör | 5 |

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

Tänk på att hjälpmedlet är avsett att larma för epilepsianfall i form av svaga muskelryckningar. Använd muskelsensor ska bytas ut mot ny. Efter färdig testning ska larmet återställas till fabriksåterställning.

2. Rekonditioneringsförfarande

Se separata avsnitt för detaljer.

2.1 Funktionskontroll

Utför nedanstående test, kontrollera ev. fel. Läs manualen noggrant. Kontrollera särskilt avsnitten för rutinmässiga kontroller samt felsökning.

Anslut huvudenheten med följande:

- a. Muskelsensor
- b. Strömförsörjning
- c. Extern larmgivare, i detta exempel Alert Pager

Vrid ratt Känslighet till 0.

Vänta några sekunder tills lampan för Larm tänds. Kontrollera att Alert Pager mottagare ljuder.

Test – Visuell översyn

- Kontrollera att strömförsörjning, kablar och kontakt inte är skadade. Byt ut om så är fallet.

- Kontrollera utgångarna och ingången för strömförsörjningen (12VDC), om det är en skada på dessa, ska huvudenheten bytas ut.

2.2 Medföljande delar

| | |
|--------|--|
| 323802 | Falck 6902 EpiMyo |
| 310001 | Batterieliminatör till Falck EP-alarm, 8311 12 VDC |
| 323924 | Kabel med 6pin modular till 3,5mm han-plugg |
| 323907 | Modularkabel 2m 4/4 med plugg |
| 910370 | Muskelsensor |
| | Manual, monteringsdetaljer |
| | |

2.3 Rengöring

Rengör Huvudenhet samt strömförsörjning med en fuktad trasa innehållande rengöringsmedel med alkohol. Produkterna får inte utsättas för vatten, Muskelsensor byts ut.


3. Apparatöversikt



4. Återställning

Se till att larmet återställs genom att trycka på Återställning. Om larmet återställs automatiskt, måste en omkopplare (Auto reset) ändras till OFF på kretskortet i larmet.

Se bild:

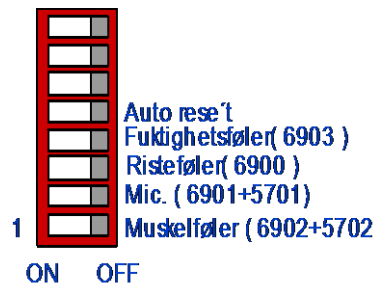

5. Reservdelar/Tillbehör

| | |
|--------|--|
| 323920 | Kretskort till EP, komplett |
| 310001 | Batterieliminators till Falck EP-alarm, 8311 12 VDC |
| 323924 | Kabel med 6pin modular till 3,5mm han-plugg |
| 323907 | Modularkabel 2m 4/4 med plugg |
| 910370 | Muskelsensor |
| 323991 | T-led för anslutning av 2 sensorer till Falck 69xx Epilarm |
| 464301 | ALERT Pager Personsökare |
| 320864 | Falck 6709 Universal Episändare |
| 320862 | Falck 6709 Mottagare Epilarm |