

# Rekonditionering Falck 6903 EpiFukt

Art.nr 323803



## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
1.1 Viktig information .....	3
2. Rekonditioneringsförfarande.....	3
2.1 Funktionskontroll .....	3
2.2 Medföljande delar .....	3
2.3 Rengöring.....	4
3. Apparatöversikt.....	4
4. Återställning.....	4
5. Reservdelar/Tillbehör .....	5

# 1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

## 1.1 Viktig information

Tänk på att hjälpmedlet är avsett att larma för epilepsianfall i form av fukt/vätska. Använd lakansensor ska bytas ut mot ny. Efter färdig testning ska larmet återställas till fabriksåterställning.

## 2. Rekonditioneringsförfarande

Se separata avsnitt för detaljer.

### 2.1 Funktionskontroll

Utför nedanstående test, kontrollera ev. fel. Läs manualen noggrant. Kontrollera särskilt avsnitten för rutinmässiga kontroller samt felsökning.

Anslut huvudenheten med följande:

- a. Lakansensor
- b. Strömförsörjning
- c. Extern larmgivare, i detta exempel Alert Pager

Vrid ratt Känslighet till 5. Häll några droppar vatten utblandat med lite salt i mitten på lakonet. Vänta några sekunder tills lampan för Larm tänds. Kontrollera att Alert Pager mottagare ljuder.

### Test – Visuell översyn

- Kontrollera att strömförsörjning, kablar och kontakt inte är skadade. Byt ut om så är fallet.
- Kontrollera utgångarna och ingången för strömförsörjningen (12VDC), om det är en skada på dessa, ska huvudenheten bytas ut.

### 2.2 Medföljande delar

323803	Falck 6903 EpiFukt
310001	Batterieliminatör till Falck EP-alarm, 8311 12 VDC
323924	Kabel med 6pin modular till 3,5mm han-plugg
323907	Modularkabel 2m 4/4 med plugg
910396	Lakansensor, 2st
333292	Kabel m/plugg till Falck 6903 EpiFukt
	Manual, loggschema, monteringsdetaljer

## 2.3 Rengöring

Rengör Huvudenhet samt strömförsörjning med en fuktad trasa innehållande rengöringsmedel med alkohol. Produkterna får inte utsättas för vatten, Lakan samt kabel till lakan byts ut.


## 3. Apparatöversikt



## 4. Återställning

Se till att larmet återställs genom att trycka på Återställning. Om larmet återställs automatiskt, måste en omkopplare (Auto reset) ändras till OFF på kretskortet i larmet.

Se bild:

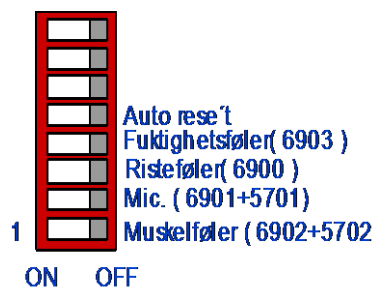

## 5. Reservdelar/Tillbehör

323920	Kretskort till EP, komplett
310001	Batterieliminatör till Falck EP-alarm, 8311 12 VDC
323924	Kabel med 6pin modular till 3,5mm han-plugg
323907	Modularkabel 2m 4/4 med plugg
910396	Lakansensor, endast lakan
910395	Lakansensor, med kabel
333292	Kabel m/plugg till Falck 6903 EpiFukt
323991	T-led för anslutning av 2 sensorer till Falck 69xx Epilarm
464301	ALERT Pager Personsökare
320864	Falck 6709 Universal Episändare
320862	Falck 6709 Mottagare Epilarm