


Rekonditionering Cadex/Cadex 2

Art.nr 508201/508220

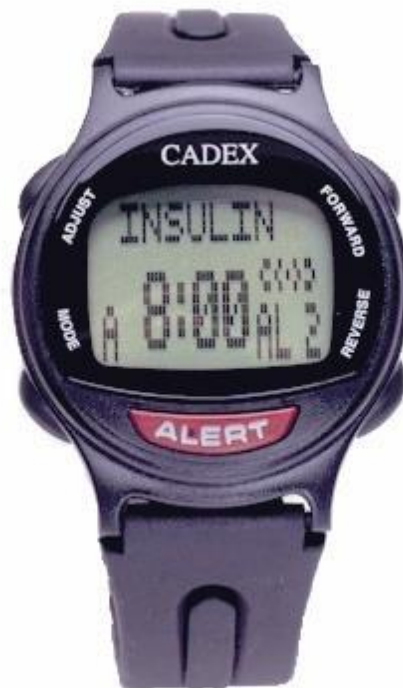

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Viktig information.....	3
2. Apparatöversikt.....	3
3. Rekonditioneringsförfarande.....	3
3.1 Funktionskontroll	3
3.2 Medföljande delar	4
3.3 Rengöring.....	4
4. Återställning.....	4


1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

Tänk på att byta batteri (CR-2032) när klockan rekonditioneras.

2. Apparatöversikt

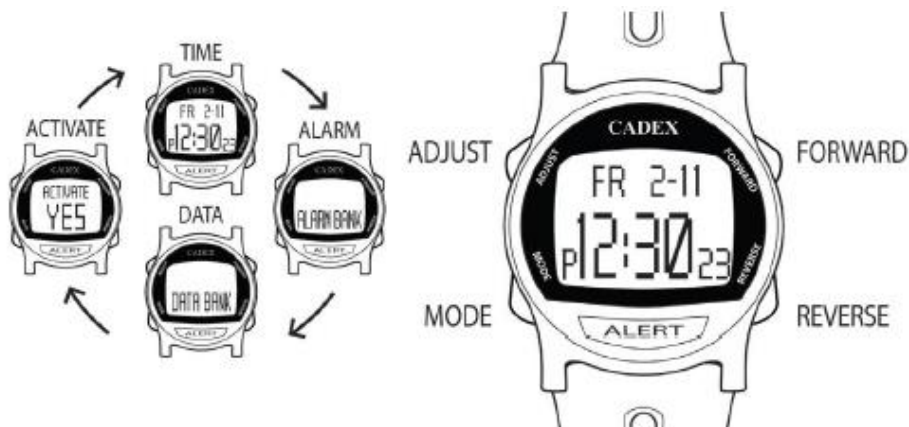

3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska, att alla medföljande delar finns och är hela samt fungerar. Rengör och paketera.

3.1 Funktionskontroll

Kontrollera att klockan larmar genom att ställa ett larm några minuter

1. Tryck på *MODE*-knappen en eller flera gånger till *ALARM BANK* visas.
2. Tryck på *FORWARD*-knappen för att komma till *AL1* (Larm 1).
3. För att ställa in Larm 1, tryck och håll in *ADJUST* tills *AL 1* blinkar.
4. Tryck på *FORWARD* och larmindikatorn ((*)) visas över *AL 1*.
Symbolen måste visas för att larmet ska vara aktiverat.
5. Tryck på *MODE*-knappen och "timme" blinkar.
6. Tryck på *FORWARD* eller *REVERSE* för att ställa in önskad timme.
7. Tryck på *MODE*-knappen för att gå vidare till minuter.
8. Tryck på *FORWARD* eller *REVERSE*-knappen för att ställa in minuter.
9. Tryck på *ADJUST*-knappen för att acceptera och spara.

3.2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.

508201	Cadex klocka
	Fodral i plåt
	Manual, Snabbguide

508220	Cadex 2
	Fodral i plåt
	Manual, Snabbguide

3.3 Rengöring

Cadex görs rent med en **mycket hårt urvriden trasa** som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa.

4. Återställning

OBS! Återställning raderar alla larm och all information.

Återställ genom att hålla ned alla fyra knapparna i 5 sekunder. När knapparna släpps kommer klockan att pipa.

Enstaka larm eller DATABANK-information kan raderas genom att skriva över larmnamnet eller DATABANK-informationen genom att välja det tomma tecknet " " för varje tecken i larmnamnet eller DATABANK-informationen.