

Rekonditionering Emfit epilepsilarm

Art.nr 464000



Innehållsförteckning

1. Inledning	3
1.1 Viktig information	3
2. Rekonditioneringsförfarande.....	3
2.1 Funktionskontroll	4
2.2 Medföljande delar	5
2.3 Rengöring	6
3. Apparatöversikt.....	6
4. Återställning.....	6
5. Reservdelar/Tillbehör	6

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

Emfit Epilepsilarm är avsedd att användas för att hjälpa till med sensorisk övervakning och larm

1) Snabba rörelser hos en person som ligger på en madrass försedd med sängsensor på grund av generaliserade tonisk-kloniska anfall.


2) Om den övervakade personen ligger på madrassen försedd med en sängsensor och om han eller hon reser sig upp från madrassen.

Emfit Epilepsilarm kan användas antingen

- uteslutande till de symptom som beskrivs i punkt 1) ovan,
- de uppgifter som anges i punkt 1) och 2) ovan samtidigt.


2. Rekonditioneringsförfarande


Anslut Sängsensor till Huvudenheten i anslutning märkt: X3.

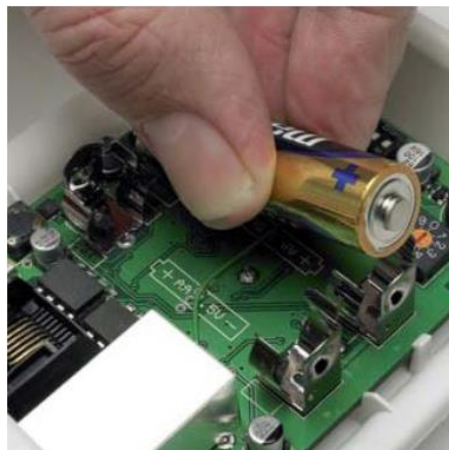

Montera 2st batterier, Alkaline LR6, i Kontrollenheten.

Kontrollera att blå lampa börjar blinka sakta. Grön lysdiod ska vara släckt.

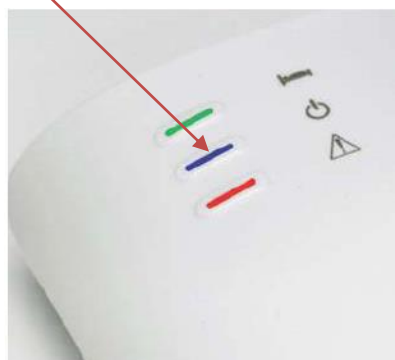

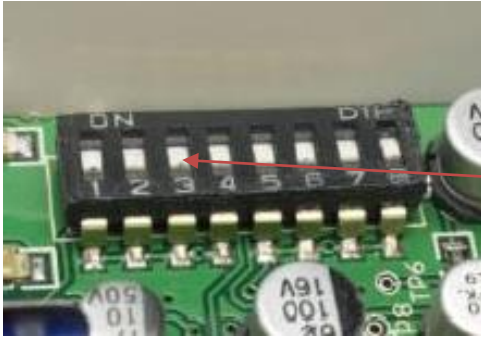

Standardinställningar på DIP-omkopplare:

Fördröjning innan larmet löser ut vid anfall är inställt på 13 sekunder.

Registrering av frånvaro är avstängd (DIP-omkopplare 3 i ON-läge)

Strömbrytarfunktionen på SW1 är aktiverad.
(Kontrollenheten kan sättas på/stängas av genom att trycka på SW1-knappen i 3 sekunder).

Volymen för ljudsignalen är inställd på MYCKET HÖG.


Kontrollera att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

2.1 Funktionskontroll

Utför nedanstående test, kontrollera ev. fel. Läs manualen noggrant. Kontrollera särskilt avsnitten för rutinmässiga kontroller samt felsökning.

Test av larm för Tonisk/Kloniska rörelser

1. Ställ in Känslighet, se bild. Lämpligt läge för test är 3.
2. Klappa på sensorn (sängmattan) genom att exempelvis simulera anfällsrörelser, (rytmiska rörelser).
3. När rörelserna har pågått en kortare tid börjar den gröna lysdioden att blinka snabbare.
4. Kontrollenheten larmar efter att tidsfördröjningen (10, 13, 16 eller 20 sekunder) löpt ut.

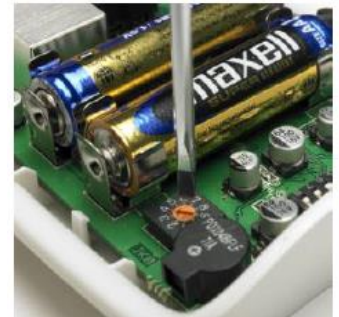

Test av frånvarolarm

1. Kontrollera att funktionen är aktiverad. Om den inte är det ställ DIP-omkopplare #3 i läge AV. Se till att Kontrollenheten är på (blå lysdiod blinkar sakta).
2. Lägg sensorn på ett mjukt underlag, tryck på sensorn i minst 1 minut, Kontrollenheten kommer att omedelbart registrera personens mikrorörelser, och den gröna lysdioden blinkar långsamt, varannan gång som den blå lysdioden blinkar. Kontrollenheten aktiveras efter att ha registrerat rörelser eller mikrorörelser i 40 sekunder och den gröna lysdioden börjar blinka i takt med den blå lysdioden. Om enheten inte registrerar närvaro av person (grön lysdiod blinkar inte), gå vidare till avsnitt 15 i bruksanvisningen för felsökning. Om grön lysdiod är släckt under en längre tid och inget rörelselarm löst ut ska känsligheten ställas in högre (se kapitel 4 i bruksanvisningen, Inställning av känsligheten). (Om den gröna lysdioden blinkar konstant när en person ligger i sängen på höger sida är känsligheten korrekt inställd).
3. Släpp trycket från sensorn. Systemet löser ut ett frånvarolarm efter ca.5-10 sekunder efter att trycket försvunnit, förutsatt att ingen vidrör sensor eller kablar. Om larmet inte fungerar och den gröna lysdioden fortsätter att blinka, se kapitel 15 i bruksanvisningen för felsökning.

2.2 Medföljande delar


464010	Emfit Epilarm Kontrollenhet
464011	Emfit Sängsensor
	Sängkonsol
	Väggbeslag för montage av Kontrollenhet
	Dubbelhäftande tejp
	2st. LR6 batterier
	2st. kabel
	Manual



2.3 Rengöring

Sängsensorn (sängmattan) kan tvättas och desinficeras med för ändamålet lämpligt medel. Torka av sensorn efter rengöring. Torka av Kontrollenheten med en fuktad trasa med alsolsprit.

3. Apparatöversikt

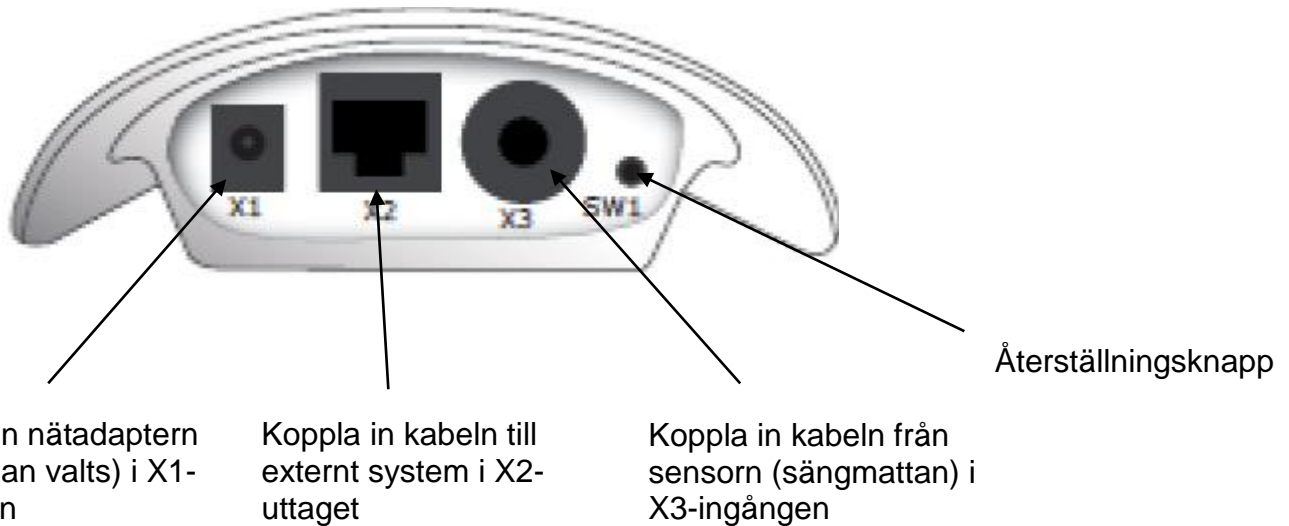

4. Återställning

Efter kontroll av larmet, ställ omkopplare för Känslighet i läge 3
DIP-omkopplare 3 i ON-läge, resten i OFF-läge.

5. Reservdelar/Tillbehör

464010	Emfit Epilarm Kontrollenhet
464011	Emfit Sängsensor
464015	Emfit Batterieliminatör
981244	Kabel Emfit till 6,3 mm telepropp (för anslutning till sjukhuslarm)