

Rekondisionering Handifon HD mini





		Dok.typ : Rep. / Rekond.	
Handifon HTC HD Mini med Handikalender		Utgåva och datum :	1, 130128
Artikelnummer : 0355		Kontrollerat av Rep. ansva	NA
		Godkänt av :	
Ändringar, historik, version			
Datum och sign.	Beskrivning :		
Sv. Version			


Rekonditionerings förfarande

Slå på Handi och kontrollera att:
 Batterispänning OK
 Att laddaren fungerar OK.
 Minneskort, Micro SD är OK. (Handiprogrammet startar).
 Alla delar rengöres med rödprit/teknisk sprit.
 Kontrollera att Handiprogrammet samt HandiTools
 är uppdaterade till senaste version
 Kontrollera etiketter på enheten.
 Kontrollera även att Invisible Shield är monterad.

Artiklar som följer med

HTC HD Mini m/skyddsfodral
 Minneskort, 8GB MicroSD
 Laddare med USB kabel
 Headset
 Abilia halsrem
 Bruksanvisning, Handbok HTC HD Mini
 Bruksanvisning, Funktionsbeskrivning Kalender
 Bruksanvisning, Handi
 Bruksanvisning, Handi USB minne



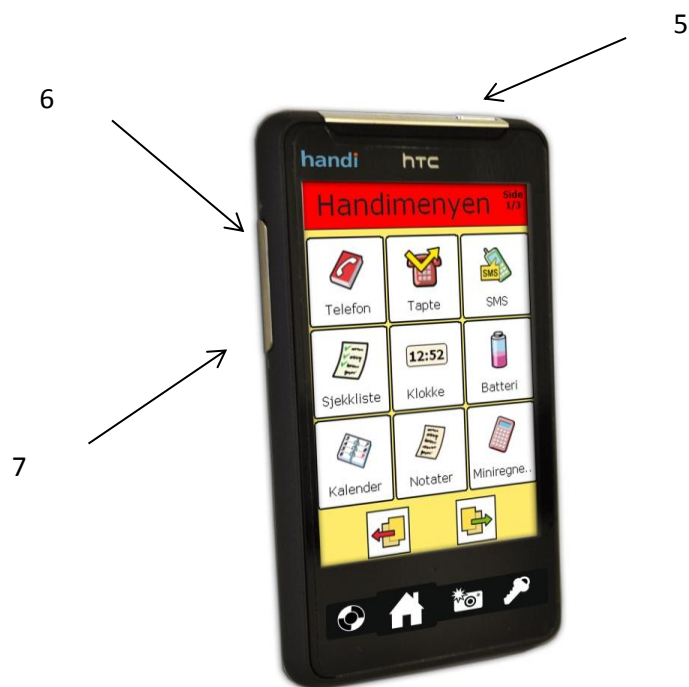

Funktionstest

Anslut laddaren och kontrollera att Handifonens laddningslampa lyser orange, när enheten är fulladdad lyser lampan grönt

Blinkande orange lampa indikerar att enhetens batterinivå är under 10%

Utför en total omstart.:

Stäng av Handifonen genom att hålla in **Power -knappen** tills dialogrutan "Do you want to turn off your device" visas, tryck YES.

HTC HD Mini stängs av.

Tryck och håll in **knapp 6** (Volym upp) och **knapp 7** (Volym ner).

Gör ett kort tryck på Power-knappen(5), Släpp knapparna 6 och 7 när det visas breda färgglada streck på skärmen. Texten "This operation will delete all your personal data, and reset all settings." Tryck på **knapp 6** för att bekräfta total omstart.

En förloppsindikator visas. När texten "RestoreCompleted, Press Volume up to restart" visas, **tryck på knapp 6** igen för att slutföra omstarten.

HTC HD Mini startar upp. Apparaten vibrerar, efter en stund visas "htc", så skrivs "quietly brilliant" och det visas några fönster, till slut visas Windows Mobile bakgrunden ,med texten "Preparing your device for first use ...". . . Vänta.

Om HTC HD Mini har ett SIM-kort, visas följande fönster:

Välj operatör och tryck på **Next**. Vänta tills förloppsindikatorn i det högra fönstret är färdig.

Fönstret "Using the Onscreen Keyboard" visas. Tryck på **Skip**.

Fönstret "Sync Data" visas. Välj "Manually sync data" och tryck på **Next**.

Fönstret "Google Location" visas. Tryck på **Disagree**.


Fönstret "Set up Accounts" visas. Tryck på **Skip**.

Fönstret "Set up Social Networks" visas. Tryck på **Skip**.

Fönstret "Set Current Time" visas (efter en liten stund). Tryck på **Skip**.

Fönstret "Learn More" visas. Tryck på **Finish**

Tryck mitt på knappraden, mellan "Hem" och "Kamera".

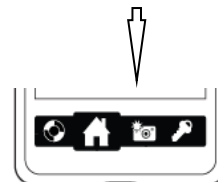


Windowsfönstret "Start" visas

"Dra" upp skärmen tills ikonen "Installera Handi" visas.

Tryck på ikonen "Installera Handi".

Efter detta startar Handi-installationen. Beroende på vad som finns på minneskortet sedan tidigare, kan man välja mellan olika alternativ:

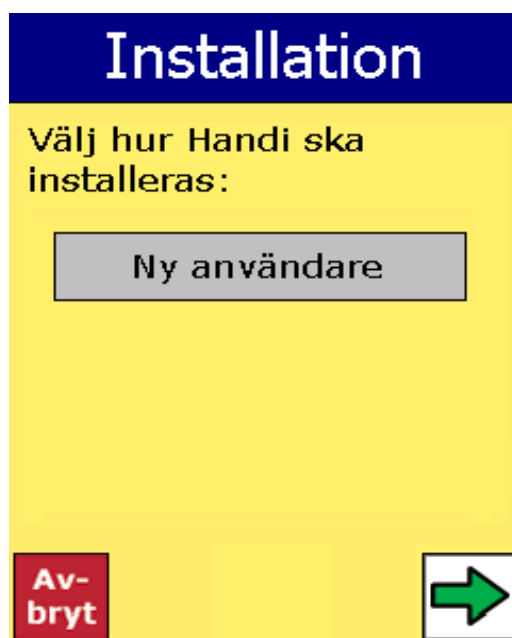

Ny användare. Alla användardata raderas, och man får installera en helt ny användare.
Befintlig användare. De användardata för Handi 4 som finns på minneskortet ominstalleras.
Uppgradera. I sällsynta fall kan det finnas användardata för Handi 3 på minneskortet.
I så fall visas detta alternativ, vilket gör det möjligt att uppgradera Handi3 användardata till Handi4.

När man har valt "Ny användare" visas följande vyer:



Här väljer man vilka bildbaser som ska installeras.
Bildbasen AIR-bilder innehåller 102 st AIR-bilder och 20 st "Smileys".
Bildbasen Pictogram- och PCS-bilder innehåller 83 bilder.
Bocka för vad du vill installera och tryck på grön högerpil.

Installation

Välj grundinställning

Nivåerna är graderade efter kognitiv förmåga. Grundinställningen utgör bara en lämplig nivå att utgå ifrån. Se bruksanvisningen om hur man anpassar Handi för en given användare.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4



Här väljer man en grundinställning. Det finns fyra nivåer där "Nivå 1" har få förvalda Handifunktioner och lägst krav på kognitiv förmåga. Grundinställningen är bara tänkt som ett utgångsläge. Välj nivå och tryck på grön högerpil.

Installation

Kryssa i det som ska visas i Handimenyn

<input checked="" type="checkbox"/>		Kalender	▲
<input checked="" type="checkbox"/>		Batteri	
<input checked="" type="checkbox"/>		Klocka	
<input checked="" type="checkbox"/>		Anteckningar	≡
<input checked="" type="checkbox"/>		Röstanteckningar	
<input type="checkbox"/>		Kontakter	
<input type="checkbox"/>		Album	
<input checked="" type="checkbox"/>		Miniräknaren	
<input checked="" type="checkbox"/>		Checklista	
<input type="checkbox"/>		Användare	▼



Här väljer man vilka funktioner som ska visas i Handimenyn, dvs vara tillgängliga för användaren. De som redan är ikryssade är ett förslag utgående från den grundinställningsnivå som valts. Kryssa för önskade funktioner och tryck på grön högerpil. När valen är gjorda drar installationsprocessen igång. (Tryck inte på skärmen under installationen) När installationen är färdig startas Handi automatiskt om och man kommer till en vy för att ställa datum och tid.

