

Rekonditionering MeDos Klocka

Art.nr 462321



Innehållsförteckning

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Inledning..... | 3 |
| 1.1 Viktig information..... | 3 |
| 2. Apparatöversikt..... | 3 |
| 3. Rekonditioneringsförfarande..... | 3 |
| 3.1 Funktionskontroll | 3 |
| 3.2 Medföljande delar | 3 |
| 3.3 Rengöring..... | 4 |
| 4. Återställning..... | 4 |

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

Tänk på att byta batteri (CR-2032) när klockan rekonditioneras.

2. Apparatöversikt



3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

3.1 Funktionskontroll

Kontrollera att klockan larmar genom att ställa ett larm.

1. Tryck på *C*-knappen en eller flera gånger till larm menyn visas, (ALM 1-12).
2. Tryck på *A*- eller *B*-knappen för att välja larm (ALM 1-12).
3. För att ställa in larm , tryck och håll in *D*-knappen tills "timmar" blinkar. Larmet kommer automatiskt att aktiveras, detta indikeras med "ON" bakom minuterna i larmtiden
4. Ställ in timme med *A*- eller *B*-knappen
5. Tryck på *C*-knappen och "minuter" blinkar.
6. Ställ in minut med *A*- eller *B*-knappen.
7. Tryck på *D*-knappen för att avsluta och bekräfta.

3.2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.

| | |
|--------|--------------|
| 462321 | MeDos Klocka |
|--------|--------------|

3.3 Rengöring

MeDos görs rent med en **mycket hårt urvriden trasa** som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa.

4. Återställning

Genom att hålla ned alla fyra knapparna i 5 sekunder, nollställs hela klockan. När knapparna släpps kommer klockan att pipa.

OBS! Detta kommer att radera alla larm och all information.