


# Rekonditionering Memomessenger



<b>ABILIA</b>  GEWA AB   FALCK IGEL		Dok.typ : Rep. / Rekond.	
<b>Memomessenger</b>		Utgåva och datum :	<b>1, 130128</b>
Artikelnr	508570	Kontrollerat av Rep. ansva	<b>NÄ</b>
<b>Ändringar, historik, version</b>			
Datum och sign.	Beskrivning :		


Memomessengers funktioner beskrivs utförligt i bruksanvisningen.

### Rekonditionerings förfarande

Kontrollera att MemoBase och MemoGo fungerar, att högtalare och mikrofon är ok.  
Alla delar rengöres med rödpnit/teknisk sprit.

### Artiklar som följer med

MemoBase  
MemoGo  
Stativ  
Strömförsörjning Mascot 9525 12 V DC  
Programmeringspenna  
Ark med klistermärken  
Öronsnäckor  
Abilia halsrem  
Väska  
Putsduk  
Bruksanvisning  
Laminerad Veckoplan/Dagsplan  
Information om att enheten är låst när den levereras och hur man låser upp den.

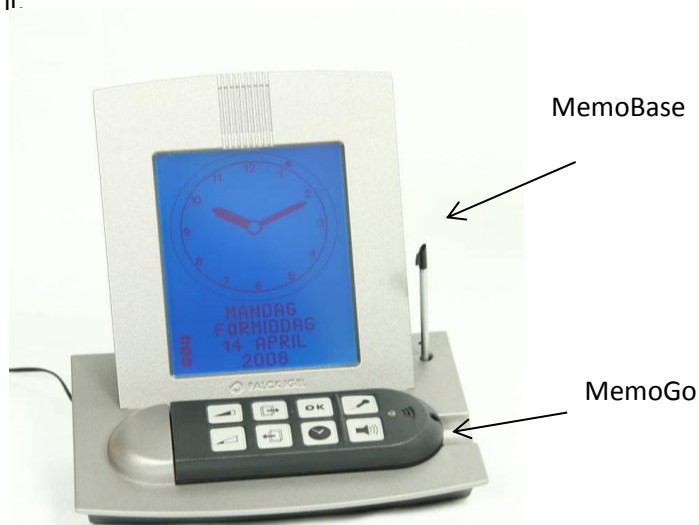

### Uppkoppling

Anslut strömförsörjningen til MemoBase och lägg MemoGo i dockningsstationen(MemoBase).  
Kontrollera att MemoBase tar laddning, lyser gult när den laddas och lyser grönt när den är färdigladdad.

### Funktionstest

Anslut Memomessenger till ett eluttag och kontrollera följande:

Tryck på klocksymbolen och kontrollera att den läser upp dag, datum och tid.  
Tryck på volymknapparna medan enheten läser upp tiden, kontrollera att volymen ändras.  
Tryck på knapparna: Kommande meddelanden/Tidigare meddelanden, kontrollera att de fungerar.  
Lägg in ett meddelande i MemoGo, (tryck in mikrofontangenten i 2 sekunder, spela upp meddelandet genom att trycka på högtalartangenten.  
Lägg in ett enstaka meddelande i MemoBase 2 minuter fram i tid, ta ur MemoGo och kontrollera att meddelandet kommer och att vibrationsfunktionen fungerar i MemoGo  
Kontrollera att tiden är korrekt.  
Nollställ Memomessenger genom att gå i Inställningar och välj Fabriksinställningar.  
Kontrollera att produkten ser ordentlig ut, och alla tillbehör finns med.  
Justera skärmens kontrast genom att skruva på inställningskruven på MemoBase baksida.  
Gå in i Inställningar och återställ Memomessenger till fabriksinställning.  
Läs Memogo enheten när den är i Memobase, genom att trycka på volym upp och ned samtidigt tills plinget kommer och text i Memobase står Memogo låst

