

Rekonditionering Handi Note 4

Art.nr 706425



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Viktig information.....	3
1.2 Licens.....	3
1.3 Förlängning av licensen	3
2 Medföljande delar	4
3. Rekonditioneringsförfarande.....	5
3.1 Funktionskontroll	5
3.2 Rengöring.....	5
3.3 Återställning.....	5
4. Total omstart.....	5
5. Tillbehör och Reservdelar	12

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

Tänk på att Handi kan innehålla personlig information som måste raderas.

1.2 Licens

Handi Note 4 levereras med licensnyckel (Handi5 SW-licens). Detta innebär att:

- **Möjligt att flytta Handi till annan apparat.** Om användaren önskar byta till annan apparat kan licensen avaktiveras på Handi Note 4 och flyttas till annan apparat.
- **3-årig supportlicens.** Programvaran kan uppdateras i 3 år efter att produkten köpts in. Den fortsätter förstås att fungera under hela livslängden för Handi Note 4. För att kunna fortsätta uppdatera programvaran och få support efter 3 år kan licensen förlängas, se nedan.

1.3 Förlängning av licensen

För att förlänga licensen i ytterligare 3 år beställs artikel *706362 Handi5 SW Förlängning* från Abilia. Licensnyckeln ska anges i beställningen.

För att aktivera förlängningen av licensen ska man sedan gå till **Inställningar|System|Licenshantering** och trycka på *Sök licensförlängning*. Se till att internetanslutning finns.

2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 5. *Tillbehör och Reservdelar*.



1. Samsung Galaxy Note 4
2. Batteri
3. Laddare
4. Headset
5. USB-kabel
6. Handbok Handi Note 4
7. Bruksanvisning Handi 5
8. Bruksanvisning Kalender
9. Handi USB-minne med HandiTools och dokumentation
10. Handi5 SW USB-minne med installationsfiler
11. Skyddsodral
12. Abilia torkduk
13. Värdebevis med Licensnyckel
14. Infoblad, Ja! – Jag vill ha Handi Web

3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

3.1 Funktionskontroll

Sätt på Handi och kontrollera att batterispänningen är OK och att laddaren fungerar.

Kontrollera att det är senaste version av programvaran, gå till **Inställningar|System|Om Handi** och kontrollera versionen. (För att komma till Inställningar ska man trycka på ikonen *Handi-inställningar*, eller trycka Knappkombinationen, håll ned funktionsknappen *Tillbaka* och tryck sedan två gånger på *Volym upp*).

Om Handi har WiFi-anslutning kan man enkelt uppgradera till senaste version genom att trycka på *Sök Uppdatering*. För att ställa in WiFi, gå till **Snabbinställningar** och välj WiFi.

3.2 Rengöring

Rengör de olika delarna med en lätt fuktad trasa som doppats i lite diskmedel.

3.3 Återställning

För att återställa Handi till en ny brukare är det viktigt att se till att ingen personlig information finns kvar. Gör en Total omstart, se kapitel 4. *Total omstart*.

4. Total omstart

I en **Total omstart** ingår **systemåterställning** och **Handi konfiguration**.

Systemåterställning innebär att alla appar avinstalleras och telefonen återställs så som den var när den kom från fabrik.

Nedan beskrivs hur man gör **Total omstart**:

Börja med att **deaktivera licensen**:

Här krävs internetanslutning.

1. Se till att värdebeviset för Handi5 SW finns till hands. Det ska användas senare för att aktivera licensen.
2. Gå till **Inställningar|System|Licenshantering** och tryck på knappen *Deaktivera licens*. Bekräfta att licensen ska deaktiveras.



Nästa steg är **Systemåterställning**:

3. Gå till **Inställningar|Android Inställningar|Personifiering|Säkerhetskopiera och återställ|Personliga data** och tryck på *Återställning till fabriksdata*. Tryck på knappen *Återställ enhet* och sedan *Ta bort alla*.
4. Borttagning av data pågår under några minuter, sedan startar telefonen om. Efter ett tag visas en välkomstvy.
5. Välj rätt språk i listan som visas när man trycker på rutan. Gå vidare genom att trycka på *Börja*.
6. (Sätt i SIM-kort.)
7. Inställningar för WiFi visas. Om man vill ansluta till sitt WiFi markerar man det i listan och skriver in sitt lösenord. Om inte, gå vidare genom att trycka på *Nästa*.
8. Vyn "Tillåt att Google kontrollerar aktivitet på enheten regelbundet..." kan visas nu eller senare, tryck på *Avböj* eller *Godkänn*.
9. En vy för Licensavtal visas (EULA & diagnostiklogg-vy visas). Tryck i rutan framför "Jag förstår..." så det blir en bock. Välj "Ja" eller "Nej". Tryck sedan på *Nästa*.
10. En vy för "Tryck och överför" visas. Tryck på *Hoppa över*.
11. En vy för Google-konto visas. Ett Google-konto rekommenderas att använda av två anledningar. Dels behöver du ett Google-konto för att kunna ladda hem appar från Play Store. Dels kan du via ditt Google-konto göra en säkerhetskopiering på dina installerade appar.

Har du ett Google-konto och vill använda det, tryck på *Ja* och följ anvisningarna. Om inte, tryck på *Hoppa över* och sedan på *Hoppa över* igen i nästa vy. Det går att lägga till ett Google-konto senare om så önskas.
12. En vy för Datum och tid kan visas. Välj rätt tidszon (Bryssel) och tid. Tryck på *Nästa*.
13. En vy för Namn visas. Skriv in ditt förnamn och efternamn och tryck på *Nästa*.
14. En vy för Googles tjänster visas (om man inte lagt in Google-konto). Välj önskade alternativ och tryck på *Nästa*.
15. En vy för Samsung account visas. Tryck på *Nästa*, och sedan på *Nästa* igen i nästa vy.
16. En vy för Enhetsnamn visas. "Aktivera enkelt läge" ska **inte** vara valt. Tryck på *Avsluta*.

Här beskrivs hur man **överför installationsfilerna** till apparaten:

Installationen kan göras genom att manuellt överföra filer från Handi5 SW USB-minne eller genom att ladda ned installationsfilerna. Välj metod A eller B nedan.

Metod A, nedladdning direkt till enheten

Starta apparatens webbläsare, på Samsung Galaxy Note 4 heter den *Internet*.

Skriv in adressen handitek.se/latest-handi5 och tryck på <Enter>. Nu hämtas Handi.apk, vilket syns i statuslisten.


Metod B, installation med USB-minne

17. Starta datorns Filutforskare.

18. Anslut apparaten till datorn. Vänta tills den visas som en enhet i datorn.

19. Sätt i **Handi5 SW USB-minne** i datorn och starta datorns Filutforskare. Vänta tills den visas som en *Flyttbar disk*.

20. Kopiera *Handi.apk* och mappen *Handi* från **Handi5 SW USB-minne** till "roten" på apparatens telefonminne så att det ser ut som på bilden nedan:

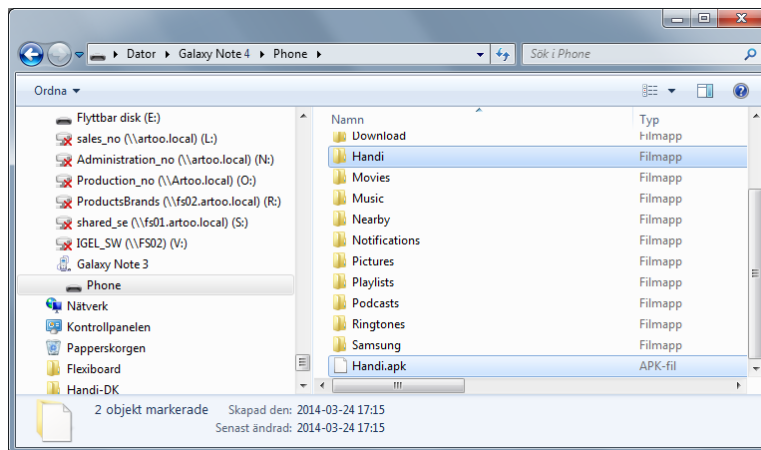


21. Koppla sedan bort apparaten från datorn.

Här beskrivs **Handi konfiguration** (med Handi-specifika Android-inställningar):



22. Apparaten startar och följande vy visas.




23. Tryck på Program-ikonen längst ner till höger. Följande vy visas.

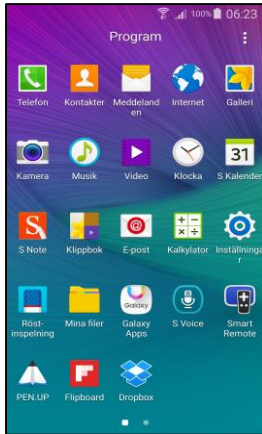

24. Tryck på *Inställningar* (kugghjul). Vyn till vänster nedan visas. Placera fingret på skärmen och dra tills "Säkerhet" visas, tryck på *Säkerhet*.

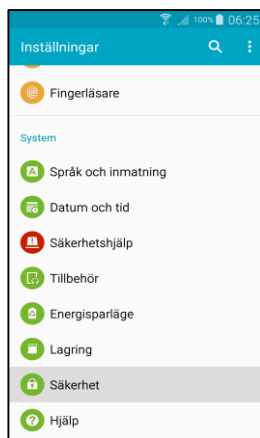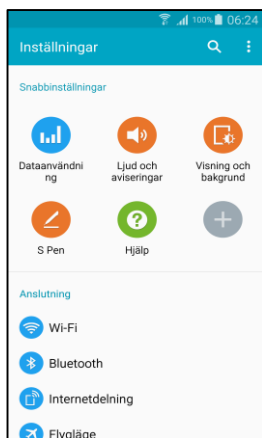


25. Placera fingret på skärmen och dra tills "Okända källor" visas, bocka för *Okända källor*. Följande vy visas.

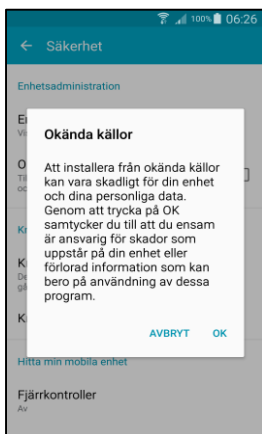

26. Tryck på *OK*. (Rutan "Okända källor" är nu förbockad och grön). Tryck på funktionsknappen *Tillbaka* (3).

27. Placera fingret på skärmen och dra tills "S Pen" visas. Tryck på *S Pen*. Se till att inställningarna blir som vyn nedan. Tryck sedan på funktionsknappen *Tillbaka*.

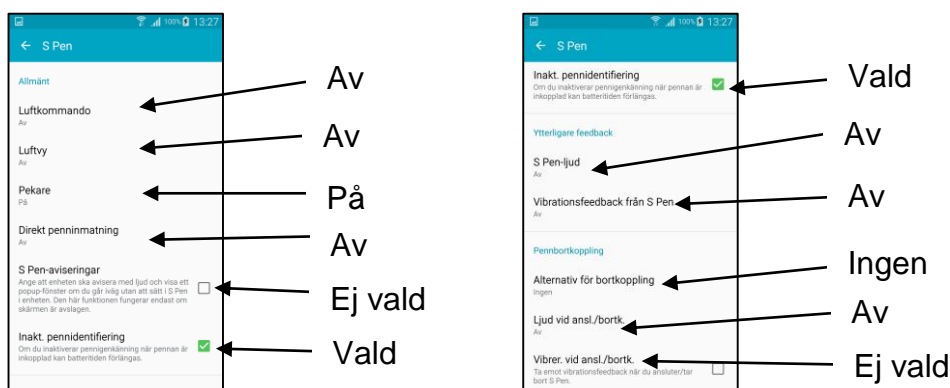

28. Placera fingret på skärmen och dra tills "Flera fönster" visas. Tryck på *Flera fönster*. Stäng av inställningen för "Flera fönster", dra reglaget åt vänster. Tryck sedan på funktionsknappen *Tillbaka*.


29. Tryck på *Låsskärm*. Tryck sedan på *Skärmlås* och välj alternativet "Ingen". Tryck sedan på funktionsknappen *Tillbaka*.

30. Tryck på *Visning och bakgrund*. Tryck sedan på *Ljusstyrka* och sätt på max. Automatisk ljusstyrka ska INTE vara valt. Tryck på OK.

31. Tryck bort boken för "Skärmrotation" (ska ej vara vald).

32. Tryck på *Skärmtimeout* och välj "10 minuter". Tryck sedan på funktionsknappen *Tillbaka* två gånger.

33. **Metod B:** Vyn "Program" visas. Tryck på ikonen *Mina filer*. Tryck på *Enhetslagring*. Följande vy visas.

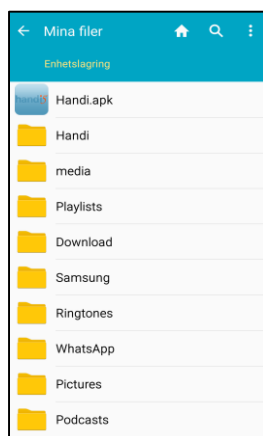


Tryck på filen *Handi.apk*.

Vyn kan se lite olika ut beroende på hur Handi Note 4 har använts.


Placera fingret på skärmen och dra uppåt/nedåt för att för att se hela listan.

Om du valde **Metod A** ska du istället dra ned statuslisten och trycka på *Handi.apk*.

34. Följande vy visas.

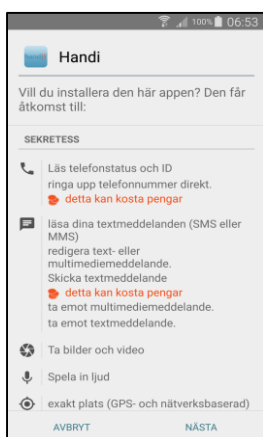

35. Placera fingret på skärmen och dra så att du kommer längst ner i listan eller tryck på Nästa tills knappen *Installera* visas. Tryck på *Installera*. Handi-programmet installeras. En vy med "Tillåt att Google kontrollerar..." kan visas, tryck på *Godkänn*. När det står "Appen har installerats" ska man trycka på funktionsknappen *Hem* (2). OBS, viktigt att man trycker på Hem, inte på Klar/Öppna. Följande vy visas.

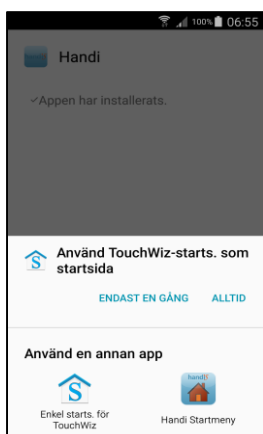

36. Tryck på *Handi Startmeny*. Tryck en gång till på funktionsknappen *Hem* och tryck på knappen *Alltid*. Tryck på *OK* i vyn "Rensa standard". Följande vy visas.


Här krävs internetanslutning.

37. Tryck på *Ange licensnyckel* för att skriva in den licensnyckel som finns på värdebeviset för **Handi5 SW**.

38. När licensen är aktiverad visas ett meddelande enligt den högra vyn. Tryck på *OK*.

39. Tryck på funktionsknappen *Hem*. Följande vy visas.




40. Välj typ av konfiguration och tryck på *Nästa* .
- Vid alternativ *Ny Handi-användare*: Välj grundinställning, *Nivå 1*, *Nivå 2* eller *Nivå 3* och tryck på *Nästa*. (Se *Bruksanvisning Handi 5* för beskrivning av de olika nivåerna. Nivån kan enkelt ändras senare.) Tryck på *JA* för att bekräfta den valda konfigurationen.



(Om man väljer *Befintlig användare* kommer Handi-användardata från backup-filen för den befintliga användaren att läggas tillbaka i Handi-apparna.)

41. Vyn "Välkommen till Handi5!" visas. Det är starten på en guide. Tryck på *Nästa*.
42. Vyn "Ställ in datum och tid" visas. Kontrollera att tidszon, datum och tid är rätt, tryck sedan på *Nästa*.
43. Vyn "Godkänn tangentbordet" visas. Tryck på *Nästa* och kryssa i *Handi Tangentbord* i inställningsvyn. Tryck *OK* på varningsmeddelandet som visas. Tryck sedan på funktionsknappen *Tillbaka* (3).
44. Vyn "Välj tangentbord" visas. Tryck på *Nästa*. Vyn "Välj inmatningsmetod" visas, välj *Handi Tangentbord*. (Denna inställning innebär alltså att tangentbordet alltid är alfabetiskt i porträttvy och QWERTY i landskapsvy.)
45. Vyn "Välj SMS-app" visas. Tryck på *Nästa*. Tryck *OK* på varningsmeddelandet som visas.
46. Vyn "Klart!" visas. Tryck på *OK*. Startmenyn visas:

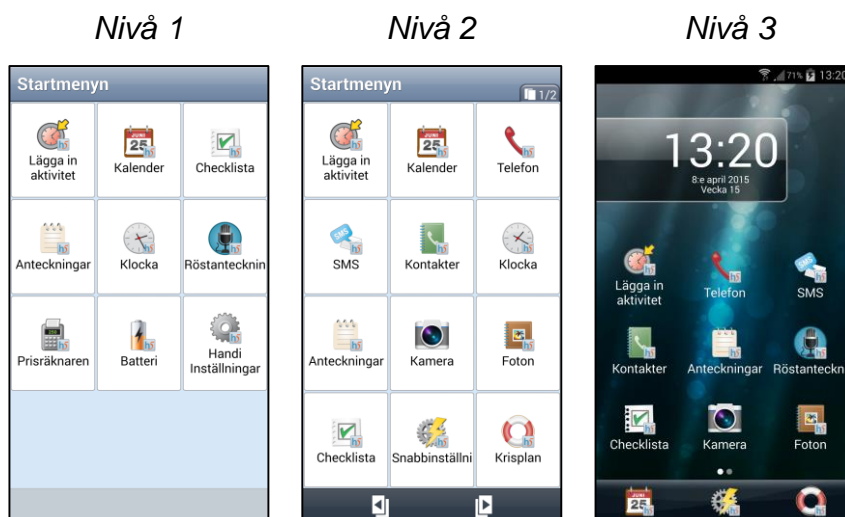

5. Tillbehör och Reservdelar

Art.nr	Benämning	Beskrivning
706425	Handi Note 4	Samsung Galaxy Note 4
706435	Batteri	Laddningsbart batteripaket
706357	Laddare med USB-kabel	Batteriladdare, Handi Xcover 2, Handi Note 4
706356	Headset original	Headset Handi Note 4
706436	Batterilucka	Batterilucka Handi Note 4
706431	Invisible shield	Invisible shield Handi Note 4
706438	Rekond	Rekonditioneringskit Handi Note 4
706430	Skydds fodral Handi Note 4	Skyddar baksida och kanter
980362	Abilia torkduk	

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | info@abilia.se | www.abilia.se