

handi5

Rekonditionering Handi Xcover 3

Art.nr 706450



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Viktig information.....	3
1.2 Licens.....	3
1.3 Förlängning av licensen	3
2 Medföljande delar	4
3. Rekonditioneringsförfarande.....	5
3.1 Funktionskontroll	5
3.2 Rengöring.....	5
3.3 Återställning.....	5
4. Total omstart.....	5
5. Tillbehör och Reservdelar	12

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

Tänk på att Handi kan innehålla personlig information som måste raderas.

1.2 Licens

Handi Xcover 3 levereras med licensnyckel (Handi5 SW-licens). Detta innebär att:

- **Möjligt att flytta Handi till annan apparat.** Om användaren önskar byta till annan apparat kan licensen avaktiveras på Handi Xcover 3 och flyttas till annan apparat.
- **3-årig supportlicens.** Programvaran kan uppdateras i 3 år efter att produkten köpts in. Den fortsätter förstås att fungera under hela livslängden för Handi Xcover 3. För att kunna fortsätta uppdatera programvaran och få support efter 3 år kan licensen förlängas, se nedan.


1.3 Förlängning av licensen

För att förlänga licensen i ytterligare 3 år beställs artikel *706362 Handi5 SW Förlängning* från Abilia. Licensnyckeln ska anges i beställningen.

För att aktivera förlängningen av licensen ska man sedan gå till **Inställningar|System|Licenshantering** och trycka på *Sök licensförlängning*. Se till att internetanslutning finns.

2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 5. *Tillbehör och Reservdelar*.

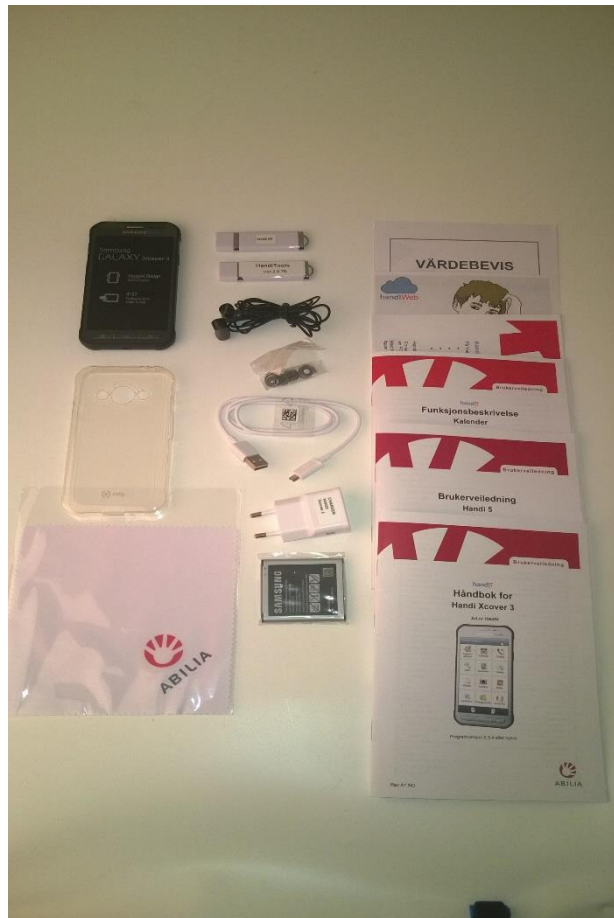

1. Samsung Xcover 3
2. Batteri
3. Laddare
4. Headset
5. USB-kabel
6. Handbok Handi Xcover 3
7. Bruksanvisning Handi 5
8. Bruksanvisning Kalender
9. Handi USB-minne med HandiTools och dokumentation
10. Handi5 SW USB-minne med installationsfiler
11. Skyddsodral
12. Abilia torkduk
13. Värdebevis med Licensnyckel
14. Infobladd, Ja! – Jag vill ha Handi Web

3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

3.1 Funktionskontroll

Sätt på Handi och kontrollera att batterispänningen är OK och att laddaren fungerar.

Kontrollera att det är senaste version av programvaran, gå till **Inställningar|System|Om Handi** och kontrollera versionen. (För att komma till Inställningar ska man trycka på ikonen *Handi-inställningar*, eller trycka Knappkombinationen, håll ned funktionsknappen *Tillbaka* och tryck sedan två gånger på *Volym upp*).

Om Handi har WiFi-anslutning kan man enkelt uppgradera till senaste version genom att trycka på *Sök Uppdatering*. För att ställa in WiFi, gå till *Snabbinställningar* och välj WiFi.

3.2 Rengöring

Rengör de olika delarna med en lätt fuktad trasa som doppats i lite diskmedel.

3.3 Återställning

För att återställa Handi till en ny brukare är det viktigt att se till att ingen personlig information finns kvar. Gör en Total omstart, se kapitel 4. *Total omstart*.

4. Total omstart

I en **Total omstart** ingår **systemåterställning** och **Handi konfiguration**.

Systemåterställning innebär att alla appar avinstalleras och telefonen återställs så som den var när den kom från fabrik.

Nedan beskrivs hur man gör **Total omstart**:

Börja med att **deaktivera licensen**:

Här krävs internetanslutning.

1. Se till att värdebeviset för Handi5 SW finns till hands. Det ska användas senare för att aktivera licensen.
2. Gå till **Inställningar|System|Licenshantering** och tryck på knappen *Deaktivera licens*. Bekräfta att licensen ska deaktiveras.



Nästa steg är **Systemåterställning**:

3. Gå till **Inställningar|Android Inställningar|Personifiering|Säkerhetskopiera och återställ|Personliga data** och tryck på *Återställning till fabriksdata*. Tryck på knappen *Återställ enhet* och sedan *Ta bort alla*.
4. Borttagning av data pågår under några minuter, sedan startar telefonen om. Efter ett tag visas en välkomstvy.
5. Välj rätt språk i listan som visas när man trycker på rutan. Gå vidare genom att trycka på *Börja*.
6. (Sätt i SIM-kort.)
7. Inställningar för WiFi visas. Om man vill ansluta till sitt WiFi markerar man det i listan och skriver in sitt lösenord. Om inte, gå vidare genom att trycka på *Nästa*.
8. Vyn "Tillåt att Google kontrollerar aktivitet på enheten regelbundet..." kan visas nu eller senare, tryck på *Avböj* eller *Godkänn*.
9. En vy för *Licensavtal* visas (EULA & diagnostiklogg-vy visas). Tryck i rutan framför "Jag förstår..." så det blir en bock. Välj "Ja" eller "Nej". Tryck sedan på *Nästa*.
10. En vy för "Tryck och överför" visas. Tryck på *Hoppa över*.
11. En vy för Google-konto visas. Ett Google-konto rekommenderas att använda av två anledningar. Dels behöver du ett Google-konto för att kunna ladda hem appar från Play Store. Dels kan du via ditt Google-konto göra en säkerhetskopiering på dina installerade appar.

Har du ett Google-konto och vill använda det, tryck på *Ja* och följ anvisningarna. Om inte, tryck på *Hoppa över* och sedan på *Hoppa över* igen i nästa vy. Det går att lägga till ett Google-konto senare om så önskas.
12. En vy för Datum och tid kan visas. Välj rätt tidszon (Bryssel) och tid. Tryck på *Nästa*.
13. En vy för Namn visas. Skriv in ditt förnamn och efternamn och tryck på *Nästa*.
14. En vy för Googles tjänster visas (om man inte lagt in Google-konto). Välj önskade alternativ och tryck på *Nästa*.
15. En vy för Samsung account visas. Tryck på *Nästa*, och sedan på *Nästa* igen i nästa vy.
16. En vy för Enhetsnamn visas. "Aktivera enkelt läge" ska **inte** vara valt. Tryck på *Avsluta*.

Här beskrivs hur man **överför installationsfilerna** till apparaten:

Installationen kan göras genom att manuellt överföra filer från Handi5 SW USB-minne eller genom att ladda ned installationsfilerna. Välj metod A eller B nedan.

Metod A, nedladdning direkt till enheten

Starta apparatens webbläsare, på Samsung Xcover 3 heter den *Internet*.

Skriv in adressen handitek.se/latest-handi5 och tryck på <Enter>. Nu hämtas Handi.apk, vilket syns i statuslisten.


Metod B, installation med USB-minne

17. Starta datorns Filutforskare.

18. Anslut apparaten till datorn. Vänta tills den visas som en enhet i datorn.

19. Sätt i **Handi5 SW USB-minne** i datorn och starta datorns Filutforskare. Vänta tills den visas som en *Flyttbar disk*.

20. Kopiera *Handi.apk* och mappen *Handi* från **Handi5 SW USB-minne** till "roten" på apparatens telefonminne så att det ser ut som på bilden nedan:

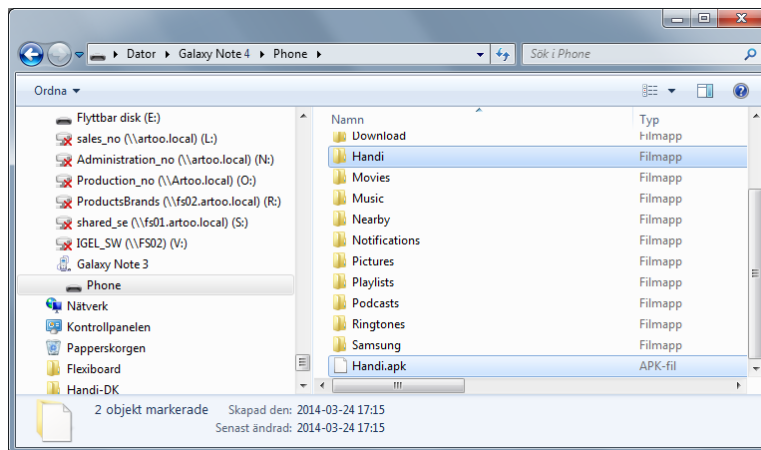

21. Koppla sedan bort apparaten från datorn.

Här beskrivs **Handi konfiguration** (med Handi-specifika Android-inställningar):



22. Apparaten startar och följande vy visas.




23. Tryck på Program-ikonen längst ner till höger. Följande vy visas.



24. Tryck på *Inställningar* (kugghjul). Vyn till vänster nedan visas. Placera fingret på skärmen och dra tills "Säkerhet" visas, tryck på *Säkerhet*.

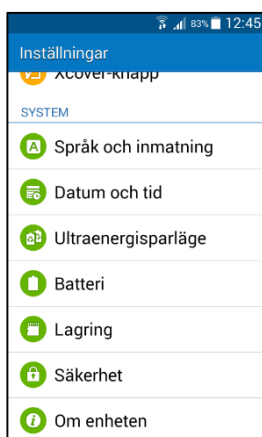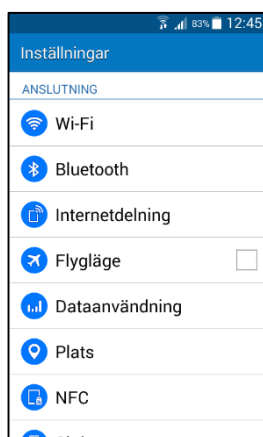


25. Placera fingret på skärmen och dra tills "Okända källor" visas, bocka för *Okända källor*. Följande vy visas.

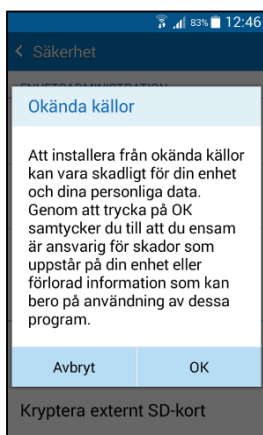


26. Tryck på *OK*. (Rutan "Okända källor" är nu förbockad och grön). Tryck 2 gånger på funktionsknappen *Tillbaka* (3).

27. Vyn "Program" visas. Tryck på ikonen *Mina filer*. Placera fingret på skärmen och svep för att hitta "Enhetslagring". Följande vy visas.

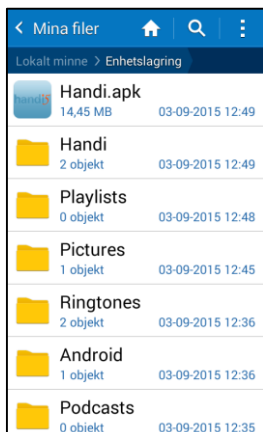

Tryck på filen *Handi.apk*.

28. Följande vy visas.

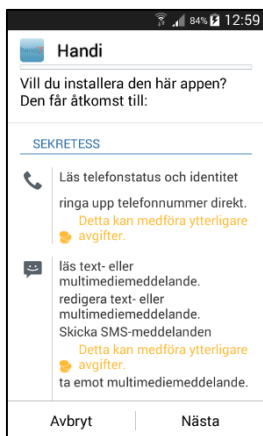

29. Tryck på *Nästa* några gånger och sedan på *Installera*. Handi-programmet installeras. En vy med "Tillåt att Google kontrollerar..." kan visas, tryck på *Godkänn*. (En vy "Verifiera och installera" kan visas). När det står "Program installerat" ska man trycka på funktionsknappen *Hem* (2), OBS, viktigt att man trycker på *Hem*, inte på *Klar/Öppna*. Följande vy visas.



30. Välj *Handi Startmeny* och tryck på knappen *Alltid*. Tryck på *OK* i vyn "Rensa standard". Följande vy visas.

Här krävs internetanslutning.

31. Tryck på *Ange licensnyckel* för att skriva in den licensnyckel som finns på värdebeviset för **Handi5 SW**.
32. När licensen är aktiverad visas ett meddelande enligt den högra vyn. Tryck på *OK*.
33. Tryck på funktionsknappen *Hem*. Följande vy visas.



34. Välj typ av konfiguration och tryck på *Nästa* .

Vid alternativ *Ny Handi-användare*: Välj grundinställning, *Nivå 1*, *Nivå 2* eller *Nivå3* och tryck på *Nästa*. (Se *Bruksanvisning Handi 5* för beskrivning av de olika nivåerna. Nivån kan enkelt ändras senare.) Tryck på *JA* för att bekräfta den valda konfigurationen.

(Om man väljer *Befintlig användare* kommer Handi-användardata från backup-filen för den befintliga användaren att läggas tillbaka i Handi-apparna.)

35. Vyn "Välkommen till Handi5!" visas. Det är starten på en guide. Tryck på *Nästa*.
36. Vyn "Ställ in datum och tid" visas. Kontrollera att tidszon, datum och tid är rätt, tryck sedan på *Nästa*.
37. Vyn "Välj tangentbord" visas. Tryck på *Nästa*.
38. Vyn "Välj inmatningsmetod" visas. Välj Handi Tangentbord. (Denna inställning innebär alltså att tangentbordet alltid är alfabetiskt i porträttvy och QWERTY i landskapsvy.)

39. Vyn "Klart!" visas. Tryck på *OK* och *Färdig*. Startmenyn visas:


40. Bestäm om foton ska sparas på enhetsminne eller minneskort, läs mer i *handboken*.

1) Starta appen *Kamera*.

2) Tryck på *OK* för att spara på minneskort, tryck på *Avbryt* för att spara på enhetsminne.

41. Se över inställningarna för skärmlås, se *handboken*.

Nivå 1

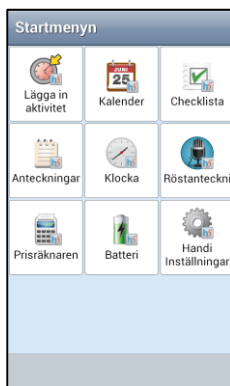

Nivå 2



Nivå 3



5. Tillbehör och Reservdelar

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Antal
	Handi Xcover 3	Androidbaserad Smartphone	1 st
706460	Batteri Handi Xcover 3	Laddningsbart batteripaket	1 st
706357	Nätadapter	Batteriladdare Handi Xcover 2/3 (mfl)	1 st
461562	USB-kabel		1 st
706356	Headset	Headset Handi Xcover 2/3 (mfl)	1 st
706248	Minneskort 32GB	Monterat, innehåller programvara	1 st
706455	Skyddsfodral Xcover 3	Skyddar baksida och kanter	1 st
980362	Abilia torkduk		1 st

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | info@abilia.se | www.abilia.se