

Rekonditionering

MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion


MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion

Art.nr 508780/508781

TISDAG

7	FRUKOST	
8		
9		
10		
11		
12	LUNCH	
13		
14		
15		
16		
17	MEDICIN	
18		
19	MIDDAG	
20	SE PÅ TV	
21		
22	SOVA	
		23
		24
		1
		2
		3
		4
		5
		6

15:05



Innehållsförteckning

1. Inledning	3
1.1 Viktig information	3
2. Rekonditioneringsförfarande.....	3
3. Funktionskontroll	4
4. Återställning.....	4
5. Medföljande delar	4
6. Rengöring	5


1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

2. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

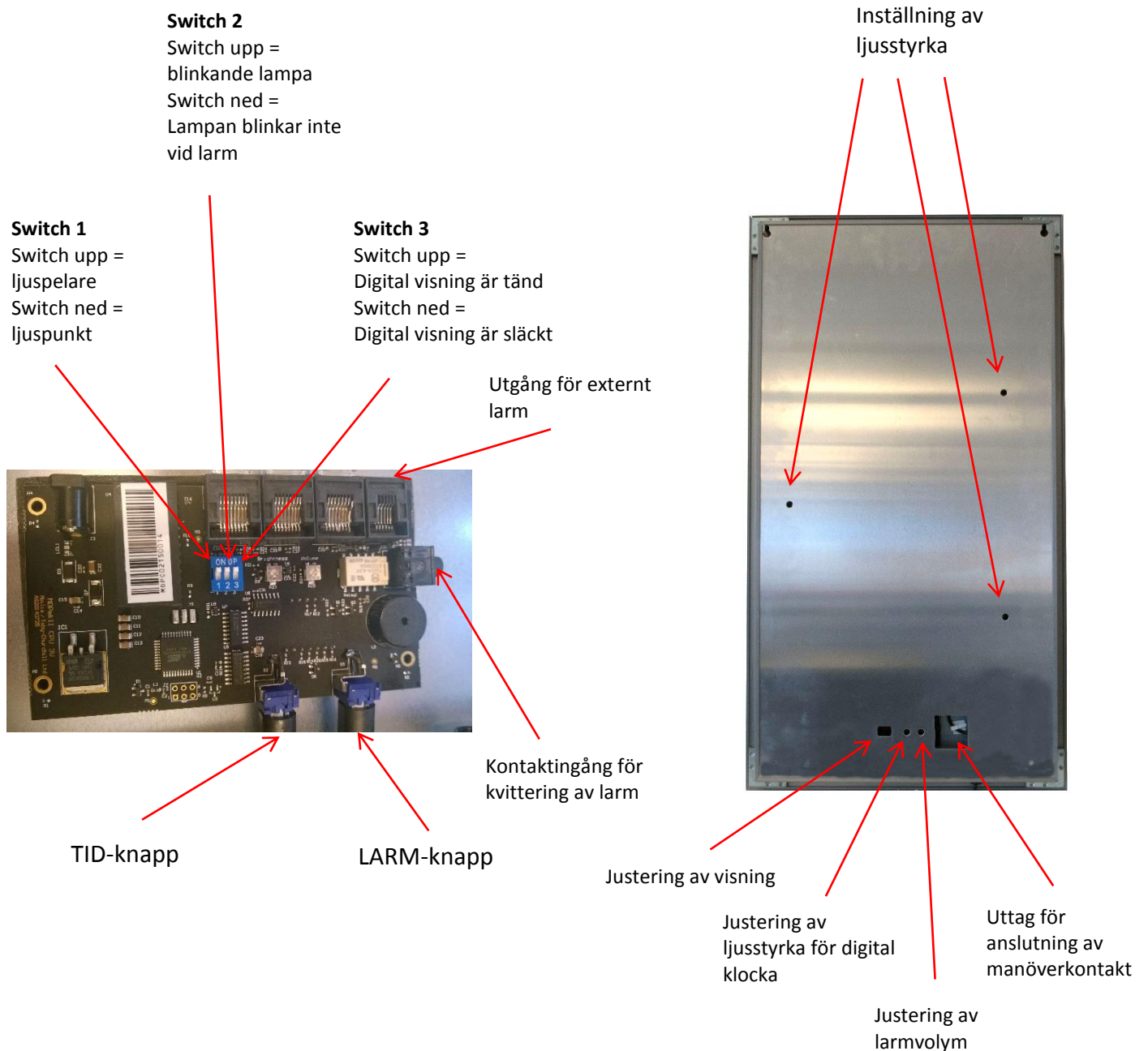

3. Funktionskontroll

Kontrollera följande funktioner när MEMOdayplanner 3 är ansluten till ett eluttag:

1. Kontrollera att alla lysdioder fungerar på alla 3 kretskorten.
2. Ställ tid till 07:00, kontrollera att samtliga röda lysdioder lyser.
3. Ställ tid till 23:00, kontrollera att samtliga blå lysdioder lyser.
4. Återställ till aktuell tid.
5. Kontrollera dipswitch 1, ON=lysande stapel, OFF=lysande punkt.
6. Kontrollera dipswitch 2, ON=blinkande lampa vid larm, OFF=lampan blinkar inte vid larm.
7. Kontrollera dipswitch 3, ON=digital visning tänd, OFF=digital visning släckt.
8. Ställ in ett larm och anslut en manöverkontakt i avsedd ingång.
När larmet går, kontrollera att larmet kan stängas av med kontakten.
9. Ställ in ett larm och anslut ett externt larm i avsedd utgång.
Kontrollera att det externa larmet ljuder när inställt larm går.

4. Återställning

För att återställa Memodayplanner till fabriksinställning ska man ta bort alla inställda larm samt se till att övriga inställningar är enligt följande:

1. Visning av tid: Ljuspelare
2. Blinkande lampa vid larm: På
3. Digital visning av tid: På
4. Ljusstyrka för ljuspelare dag/natt: Medium
5. Ljus- och ljudstyrka för digital klocka: Medium
6. Tid för dag och natt: Dag 0700 – 2300, Natt 2300 – 0700
7. 12- eller 24-timmars visning beroende på modell
8. Omställning för sommartid: 01 sommartid EU
Se respektive kapitel i bruksanvisningen hur inställningarna ändras.

5. Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Antal
	MEMOdayplanner 3	12- eller 24-timmarsversion	1 st
	Whiteboard-penna		3 st
	Mikrofiberduk	för rengöring	1 st
	Skruvmejsel	för justering av ljusstyrka/larmvolym	1 st
	Skruvar/murplugg med monteringsmall	vid montering på vägg	1 kit
	Bruksanvisning		1 st
	Lathund		1 st
	Idéhäfte		1 st

6. Rengöring

Skötselråd:

Rengör med mikrofiberduk. Fukta med vatten för att ta bort text eller märken som sitter lite hårdare. Om fläckar eller märken inte går att ta bort kan plastfilmen bytas ut av tekniker. Ny plastfilm kan beställas från Abilia.

Tips!

Är tavlan svår att rengöra? Rita över text eller märken som är svåra att torka bort med en whiteboardpenna och vänta någon minut innan du torkar av.

7. Reservdelar/Tillbehör

Art.nr	Benämning
508785	Anpassningsmaterial till Memodayplanner
508786	Rekonditioneringskit till Memodayplanner 3
508787	Magnetband utan text (för att dölja information)
508788	Magnetband med 24-timmars visning
508789	Magnetband med 12-timmars visning
508790	Magnetband med klocksymboler
508792	Veckodagsmagneter SE
508794	Bordsstativ Memodayplanner 3
508795	Pennhållare Memodayplanner 3
508796	Låsbar dörr Memodayplanner 3
	Valfri manöverkontakt (kontakta Abilia)
101316	Strömförsörjning Memodayplanner 3

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | info@abilia.se | www.abilia.se