

Rekonditionering Micro Voice Röstförstärkare

Art.nr 462220/462230



Innehållsförteckning

1. Inledning	3
1.1 Viktig information	3
2. Rekonditioneringsförfarande.....	3
3. Byte av batteri.....	4
4. Funktionskontroll	4
4.1 Medföljande delar	4
4.2 Rengöring.....	5
5. Reservdelar/Tillbehör	5

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

Tänk på att byta headset när Micro Voice Röstförstärkare rekonditioneras.

2. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

3. Apparatöversikt



3. Byte av batteri

Batteri bör bytas efter 2 år. Nedan visas batteriet samt anslutning till kretskortet:



4. Funktionskontroll

Anslut laddaren till Micro Voice. Kontrollera att LED-lampan blinkar grönt (batteriet laddas). Efter 6 timmars laddning, anslut headset till mikrofonporten, slå på Micro Voice och kontrollera genom att prata i mikrofonen att ljud kommer från Micro Voice. Gör likadant med strupmikrofonen.

4.1 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.

462220	Micro Voice Röstförstärkare
462230	Micro Voice Röstförstärkare med svart headset
462201	Headset, justerbar beige. Mini/Micro Voice Röstförstärkare (Endast till artikel: 462220)
462203	Strupmikrofon. Mini/Micro Voice Röstförstärkare (Endast till artikel: 462220)
462206	Headset svart, Mini/Micro Voice Röstförstärkare (Endast till artikel: 462230)
462221	Bältesklips, Micro Voice Röstförstärkare
462223	Midjebälte, Micro och Mini Voice Röstförstärkare
101316	Nätadapter till Lightwriter, Micro Voice Röstförstärkare och MEMOdayplanner 3
890408	Halsrem Micro Voice
462225	Bruksanvisning

4.2 Rengöring

Micro Voice Röstförstärkare görs rent med en **mycket hårt urvriden trasa** som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa.

5. Reservdelar/Tillbehör

462221	Bältesklips, Micro Voice Röstförstärkare
462223	Midjebälte, Micro och Mini Voice Röstförstärkare
462225	Bruksanvisning
462226	Batteri Micro Voice Röstförstärkare
101316	Nätadapter till Lightwriter, Micro Voice Röstförstärkare och MEMOdayplanner 3
462201	Headset, justerbar beige. Mini/Micro Voice Röstförstärkare
462206	Headset svart, Mini/Micro Voice Röstförstärkare
462203	Strupmikrofon. Mini/Micro Voice Röstförstärkare
890408	Halsrem Micro Voice
462204	Vindhätta, mik. beige, 10-pack. Mini/Micro Voice Röstförstärkare