

Rekonditionering Handi Xcover 2

Art.nr 706350



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Viktig information.....	3
2 Medföljande delar	3
3. Rekonditioneringsförfarande.....	4
3.1 Funktionskontroll	4
3.2 Rengöring.....	4
3.3 Återställning.....	4
4. Total omstart.....	4
5. Tillbehör och Reservdelar	9
5.1 Rekonditioneringskit	9
5.2 Tillbehör och reservdelar	9

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

Tänk på att Handi kan innehålla personlig information som måste raderas.

2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med rekonditioneringskit eller tillbehör/reservdelar, se kapitel 5. *Tillbehör och Reservdelar*.



1. Samsung Galaxy Xcover 2 (bakstycket avtaget på bilden)
2. Batteri
3. Laddare
4. Headset
5. USB-kabel
6. Handbok Handi Xcover 2
7. Bruksanvisning Handi 5
8. Bruksanvisning Kalender
9. Handi USB-minne med HandiTools och dokumentation
10. Minneskort Micro-SDHC (monterat)
11. Skyddsodral
12. Abilia torkduk
13. Infoblad, Ja! –Jag vill ha HandWeb

3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

3.1 Funktionskontroll

Sätt på Handi och kontrollera att batterispänningen är OK och att laddaren fungerar.

Kontrollera att det är senaste version av programvaran, gå till **Inställningar|System|Om Handi** och kontrollera versionen. (För att komma till Inställningar ska man trycka på ikonerna *Handi-inställningar*, eller trycka Knappkombinationen, *Meny-Tillbaka-Meny-Tillbaka*).

Om Handi har WiFi-anslutning kan man enkelt uppgradera till senaste version genom att trycka på *Sök Uppdatering*. För att ställa in WiFi, gå till Snabbinställningar och välj WiFi.

3.2 Rengöring

Rengör de olika delarna med en lätt fuktad trasa som doppats i lite diskmedel.

3.3 Återställning

För att återställa Handi till en ny brukare är det viktigt att se till att ingen personlig information finns kvar. Gör en Total omstart, se kapitel 4. *Total omstart*.

4. Total omstart

I en **Total omstart** ingår **systemåterställning** och **Handi konfiguration**.

Systemåterställning innebär att alla appar avinstalleras och telefonen återställs så som den var när den kom från fabrik. Dock raderas inget på minneskortet. Minneskortet rensas i Handi konfigurationen.

Nedan beskrivs hur man gör **Total omstart**:

Nedan beskrivs det enkla sättet att göra Systemåterställning. Om enheten är helt låst (man kommer inte in i Inställningar) måste man istället göra en *Systemåterställning med knapptryckning*, se separat instruktion.


1. Gå till **Inställningar|Android Inställningar|Personlig|Säkerhetskopiera och återställ|Personliga data** och tryck på *Återställning till fabriksdata*. Tryck på knappen *Återställ enhet* och sedan *Radera alla*.
2. Borttagning av data pågår under några minuter, sedan startar telefonen om. Efter ett tag visas en välkomstvy.





3. Välj rätt språk i listan som visas när man trycker på rutan. Gå vidare genom att trycka på *Nästa*.
4. Saknar enheten SIM-kort visas «Inget SIM-kort i enheten» Tryck på *Nästa*.
5. Inställningar för WiFi visas. Gå vidare genom att trycka på *Hoppa över*.
6. En vy för Samsung account visas. Tryck på *Nästa*.
7. En vy för Google-konto visas. Tryck på *Nej* och välj "Inte nu" i nästa vy.
8. En vy för Platsinformation visas. Tryck på pilen nedåt för att scrollera ned texten till botten, tryck sedan på pilen till höger för att gå vidare.
9. En vy visas för ditt namn. Tryck på *Klar*.
10. En vy för Enkelt läge visas. Tryck på *Avsluta*.
11. Apparaten startar och följande vy visas.




12. Tryck på Program-ikonen längst ner till höger. Följande vy visas.

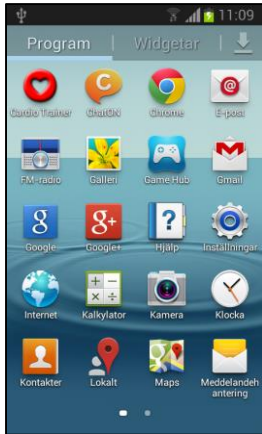

13. Tryck på *Inställningar* (kugghjul). Vyn till vänster nedan visas. Placera fingret på skärmen och dra tills "Säkerhet" visas, tryck på *Säkerhet*.

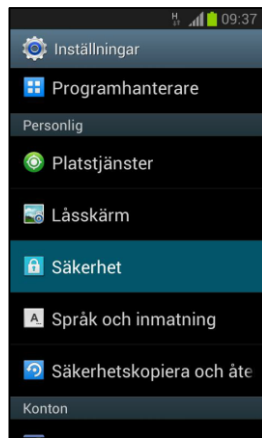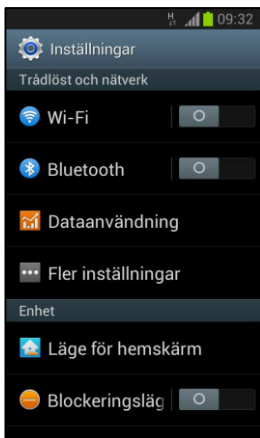


14. Placera fingret på skärmen och dra tills "Okända källor" visas, bocka för *Okända källor*. Följande vy visas.

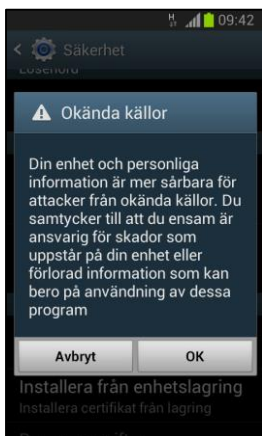

15. Tryck på *OK*. (Rutan "Okända källor" är nu förbockad och grön). Tryck 2 gånger på funktionsknappen *Tillbaka* (3).


16. Vyn "Program" visas. Placera fingret på skärmen och svep för att hitta "Mina filer". Tryck på ikonen *Mina filer*. Tryck sedan på *extSdCard*. Följande vy visas.

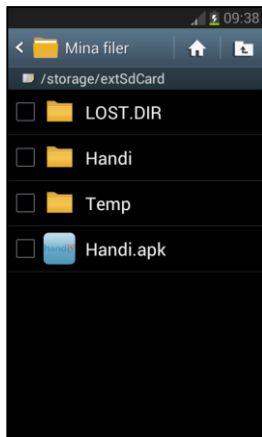

Vyn kan se lite olika ut beroende på hur Handi Xcover 2 har använts.

Placera fingret på skärmen och dra uppåt/nedåt för att se hela listan.

17. Tryck på filen *Handi.apk* (längst ner i bilden ovan). Följande vy visas.

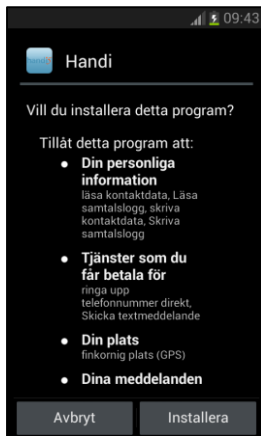

18. Tryck på *Installera*. Handi-programmet installeras. (En vy med "Verifiera och installera" kan visas tryck på *Verifiera och Installera* och sedan på *Alltid*. När det står "Appen har installerats" ska man trycka på funktionsknappen *Hem*. Följande vy visas.



19. Välj *Handi Startmeny* och tryck på knappen *Alltid*. Tryck på *OK* i vyn "Rensa standard". Följande vy visas.



20. Välj typ av konfiguration (välj **Rensa minneskortet** för att ta bort all inlagd data) och tryck på *Nästa* ▶.

(Om man väljer *Befintlig användare* kommer Handi-användardata från backup-filen för den befintliga användaren att läggas tillbaka i Handi-apparna. Om man väljer *Ny Handi-användare* tas Handi-data på minneskortet bort. Ev övrig information på minnet finns kvar.)

21. Välj grundinställning, (Nivå 1 är default) och tryck på *Nästa*. Tryck på JA för att bekräfta den valda konfigurationen.

22. Vyn "Välkommen till Handi5!" visas. Det är starten på en guide. Tryck på *Nästa*.

23. Vyn "Ställ in datum och tid" visas. Kontrollera att tidszon, datum och tid är rätt, tryck sedan på *Nästa*.

24. Vyn "Godkänn tangentbordet" visas. Tryck på *Nästa* och kryssa i *Handi Tangentbord* i inställningsvyn. Tryck *OK* på varningsmeddelandet som visas. Tryck sedan på funktionsknappen *Tillbaka* (3).

25. Vyn "Välj tangentbord" visas. Tryck på *Nästa*. Vyn "Välj inmatningsmetod" visas, välj *Handi Tangentbord*. (Denna inställning innebär alltså att tangentbordet alltid är alfabetiskt i porträttvy och QWERTY i landskapsvy.)

26. Vyn "Klart!" visas. Tryck på *OK* och *Färdig*. Startmenyn visas:

Nivå 1

Nivå 2



Nivå 1 är standard vid leverans.

27. Ställ in så att kameran sparar foton på minneskortet:

- 1) Starta appen *Kamera*
- 2) Bocka i rutan "Visa inte igen" och tryck på *OK*.
- 3) Tryck på *OK* när vyn "Lagringsplats" visas.

5. Tillbehör och Reservdelar

5.1 Rekonditioneringskit

För Handi Xcover 2 finns ett Rekonditioneringskit, artikelnummer 706358. Rekonditioneringskittet innehåller:

- 1 st bruksanvisning *706350 Handbok Handi Xcover 2* i färg och A5-format.
- 1 st *706240 Bruksanvisning Handi 5* i färg och A5-format.
- 1 st bruksanvisning *706240 Kalender bruksanvisning* i färg och A5-format.
- 1 st Abilia-påse A5 med följande innehåll:
 - Dokument "Introduktion Handi-USB"
 - USB-minne Handi-USB (innehåller HandiTools och dokumentation)

5.2 Tillbehör och reservdelar

För övriga tillbehör och reservdelar, se [Översiktsark Tillbehör Handi Xcover 2](#)

