

Instruktion

# Rekonditionering

## Natt- och Dagkalendern med bild

Art.nr 508350



## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
1.1 Viktig information .....	3
2. Rekonditioneringsförfarande .....	3
3. Byte av batteri .....	4
4. Funktionskontroll .....	4
4.1 Inställning av veckodag, datum och tid .....	4
4.2 Medföljande delar .....	4
4.3 Rengöring .....	5
5. Reservdelar/Tillbehör .....	5

# 1. Inledning


Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

## 1.1 Viktig information


Tänk på att byta batteri (CR 2032) när kalendern rekonditioneras.

# 2. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

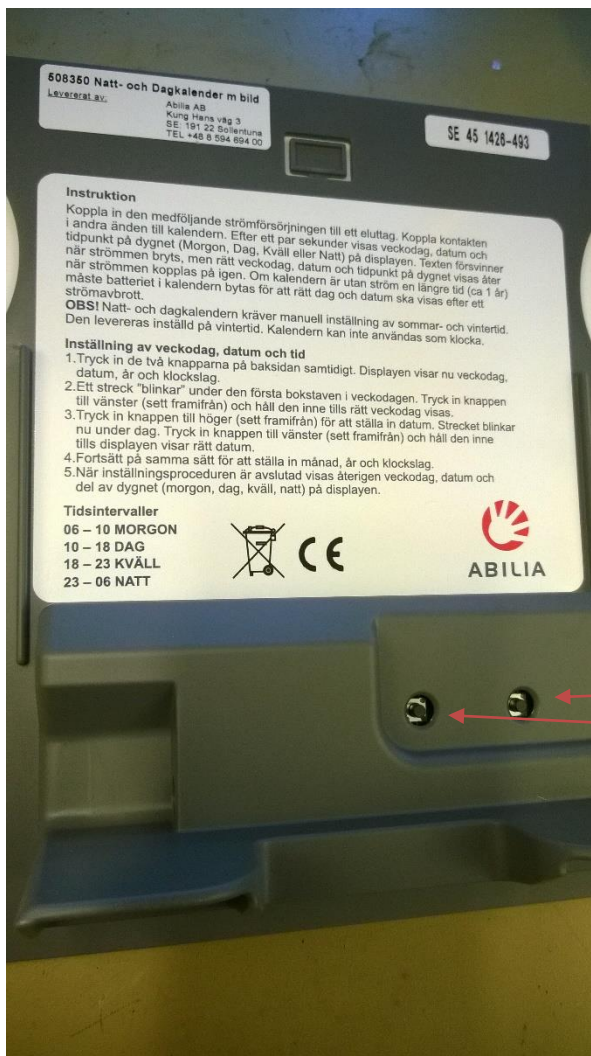

Batteri CR 2032

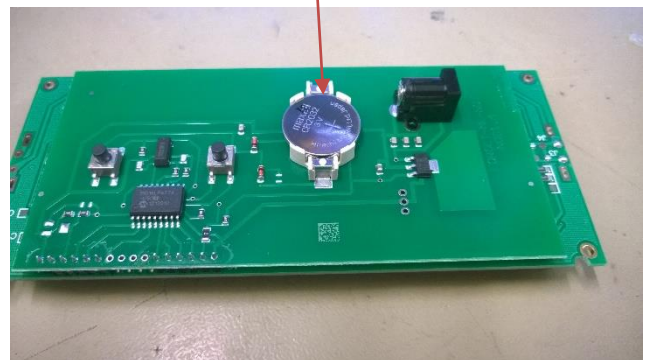

Inställningsknappar

### 3. Byte av batteri

Om kalendern inte visar rätt veckodag, datum eller tid på dygnet behöver troligen batteriet bytas. Kalendern kan även vara felinställd, kontrollera det först, se *Inställning av veckodag, datum och tid*.

Gör så här:

1. Koppla bort strömförsörjningen.
2. Skjut frontglaset åt sidan.
3. Ta bort den silverfärgade ramen (sitter med dubbelhäftande tejp) runt displayenheten och ta ut elektronikenheten som ligger där i.
4. Byt batteriet (CR 2032), som sitter i batterihållaren på baksidan av elektronikenheten.
5. Lägg tillbaka elektronikenheten, var noga med att inte vända den åt fel håll.
6. Sätt fast den silverfärgade ramen.
7. Skjut tillbaka frontglaset.
8. Anslut Kalendern till strömförsörjningen.

### 4. Funktionskontroll

#### 4.1 Inställning av veckodag, datum och tid

1. Tryck in de två knapparna på baksidan samtidigt. Displayen visar nu veckodag, datum, år och klockslag.
2. Ett streck "blinker" under den första bokstaven i veckodagen. Tryck in knappen till vänster (sett framifrån) och håll den inne tills rätt veckodag visas.
3. Tryck in knappen till höger (sett framifrån) för att ställa in datum. Strecket blinkar nu under dag. Tryck in knappen till vänster (sett framifrån) och håll den inne tills displayen visar rätt dag.
4. Fortsätt på samma sätt för att ställa in månad, år och klockslag.
5. När inställningsproceduren är avslutad visas återigen veckodag, datum och del av dygnet (morgon, dag, kväll, natt) på displayen.

*OBS! Om det går för lång tid mellan stegen stängs inställningsläget. Då måste man börja om från början.*

#### 4.2 Medföljande delar

*Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.*

508350	Natt- och Dagkalender med bild
508206	Batterieliminators
	Manual

### **4.3 Rengöring**

Rengör displayen med en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring. Produkten får inte nedsänkas i vatten.

### **5. Reservdelar/Tillbehör**

508350	Natt- och dagkalender med bild
508206	Batterieliminators
	Manual
508308	Passepartout, silverfärgad till Natt-och Dagkalender
508315	Bruksanvisning klister bak, Natt- och dagkalendern
508362	Bakplatta Natt- och dagkalendern med bild
508363	Frontplatta Natt- och dagkalendern med bild
508365	Bild till Natt- och dagkalendern med bild