



# MEMOplanner 3.6

## Nyheter

2019-08-26



## Summering

---

Skapa nytt myAbilia konto från MEMOplanner

---

Stäng av larm tillfälligt

---

Synkronisera favoritbilder till myAbilia


---

Tal på sluttid även på påminnelser

---

Enklare att ångra en kvittering

# Skapa ett myAbilia konto direkt från MEMOplanner

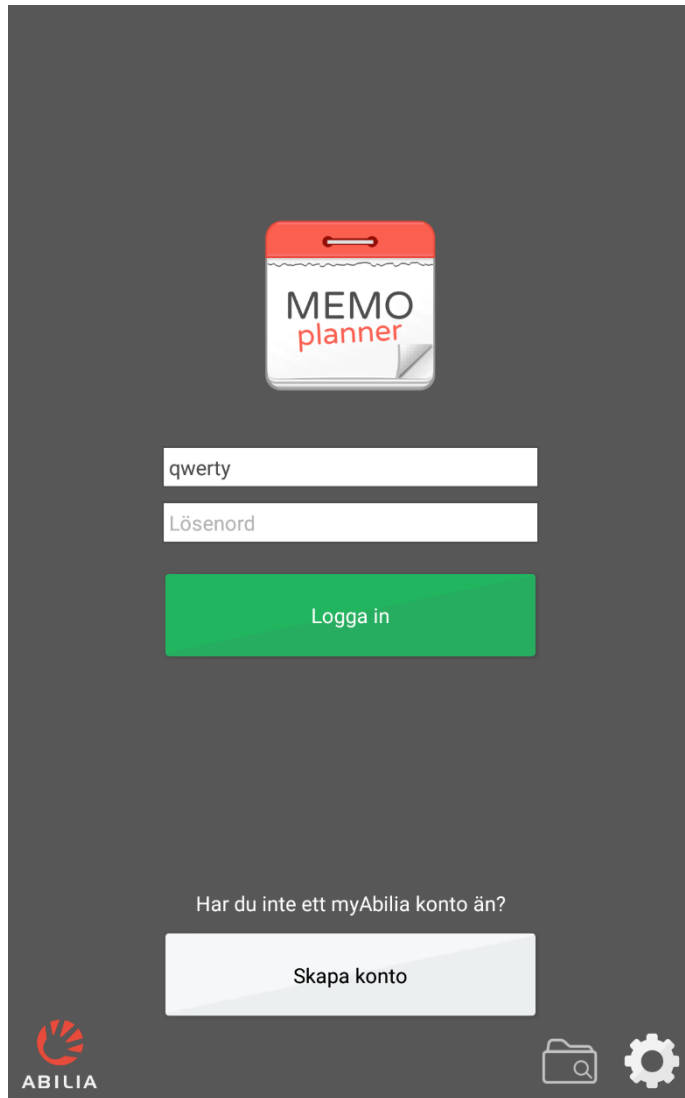

qwerty

Lösenord

Logga in

Har du inte ett myAbilia konto än?

Skapa konto



myABILIA

Skapa ditt konto i myAbilia

Du behöver ett myAbilia konto för att använda MEMOplanner.  
Skapa ett konto med:

- Användarnamn ELLER en e-postadress
- Lösenord med minst 8 tecken

Användarnamn eller e-postadress

Lösenord

Bekräfta lösenordet



Skapa konto

Tillbaka till Inloggning

- Skapa konto är bara tillgängligt på Abilia hårdvara
- Skapade konton är aktiverade och kan användas direkt.



# Stäng av alla larm

- Stäng av alla larm tillfälligt om du till exempel har MEMOplanner i din vanliga telefon på föreläsning
- Funktionen aktiveras i snabbinställningar
- Om funktionen är aktiverad visas knapp för att stänga av alla larm
- Vid aktivering informeras användaren att alla larm kommer tystas fram till midnatt.
- Stänga av larm påverkar endast den specifika enhetens larm.

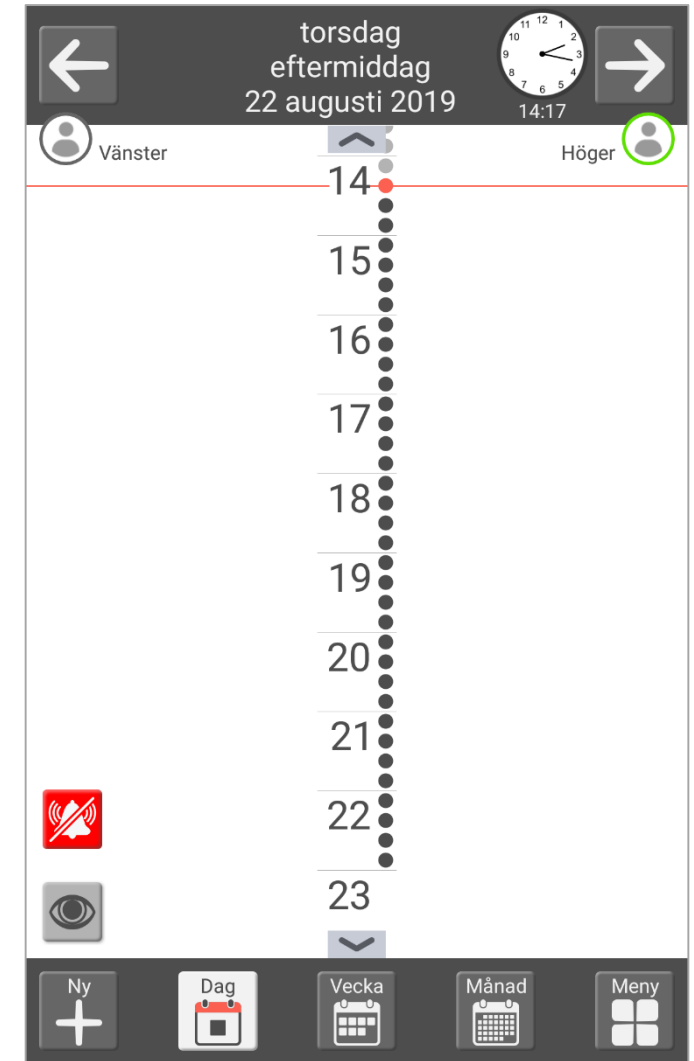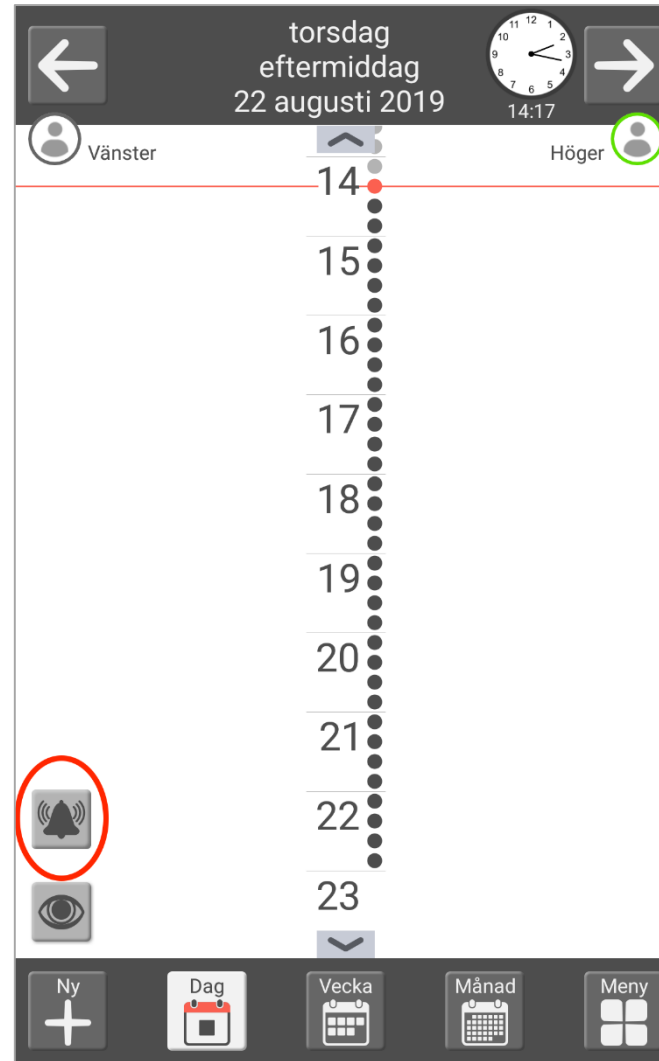

# Synkronisera favoritbilder till myAbilia

- Favoritmärkta bilder på MEMOplanner synkroniserar med myAbilia.
- Ger möjlighet att visa sina bilder på alla enheter med samma myAbilia-konto.
- Ger möjlighet att lägga in bilder i Favoriter från myAbilia

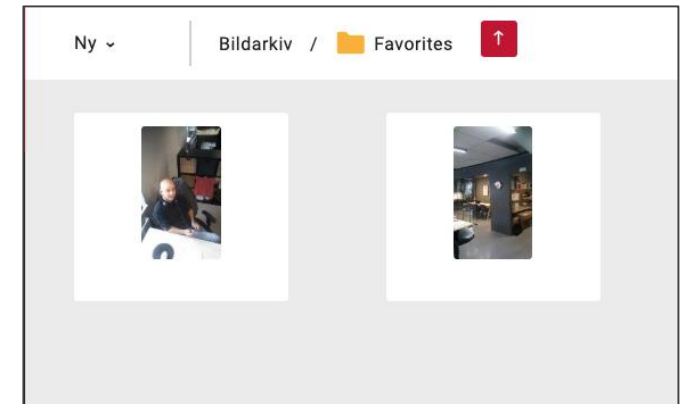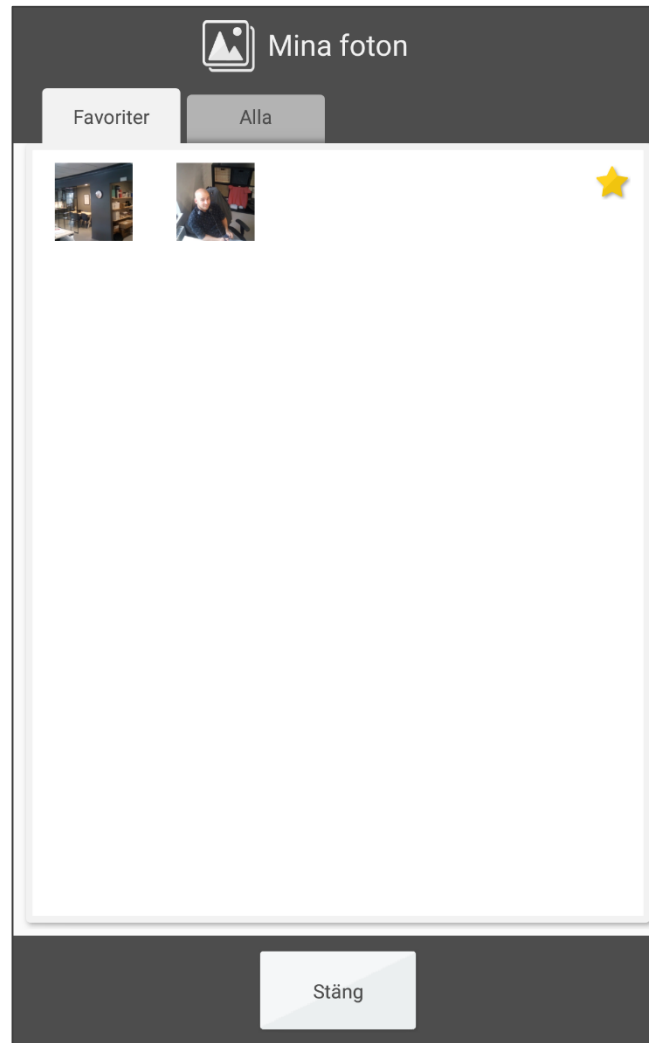

# Påminnelser att kvittera

- En påminnelse att kvittera en aktivitet kommer ha samma larminställningar som själva aktiviteten. Tidigare var det inte fallet vilket till exempel innebar att ett tyst larm kunde följas av en ljudlig påminnelse.
- En påminnelse som är inställd före aktivitetens starttid kommer använda larminställningarna för påminnelser och påverkas inte av själva aktivitetens larminställningar. Precis som förut.

# Tal på sluttid för påminnelser



Om en aktivitet har tal på sluttid kommer talet också bli utläst på påminnelsen om att kvittera



Påminnelser efter en aktivitet uppstår endast på okvitterade händelser

# Ångra kvittering

- Enklare att ångra en kvittering om den till exempel skett av misstag.

