


Importerera ändringar till individanpassning i elektronisk PODD

Instruktioner för att få tillgång till de nya funktionerna som finns i elektronisk PODD 1.3 i en tidigare anpassning:




Gå in i ikonen *PODD anpassa* som ligger på ditt skrivbord

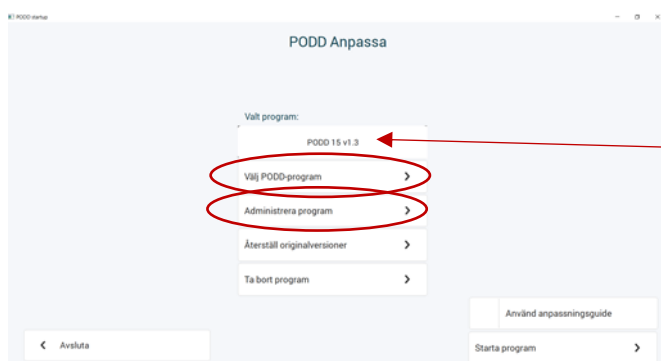


Välj den nya versionen för det program du har individanpassningar: PODD15 1.3 eller PODD60 1.3

Gå in i *administrera program*

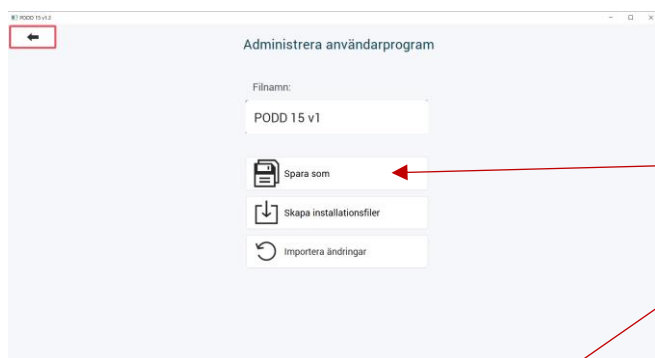

Gå in i *spara som* och spara programmet i nytt namn.

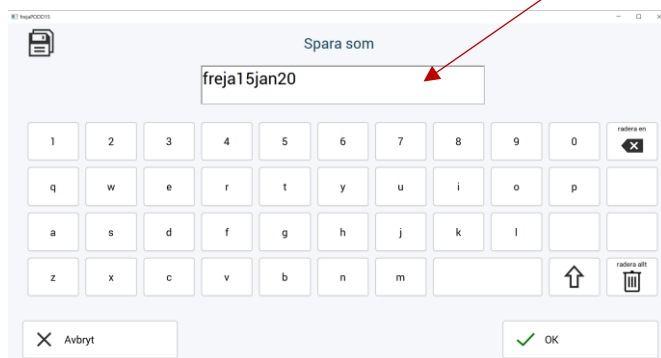


Nu har du sparat originalfilen med det namnet du vill lägga in de individuella ändringarna i.

Elektronisk PODD med namnet du angett kommer att öppnas.


Inställningar



Administrera program

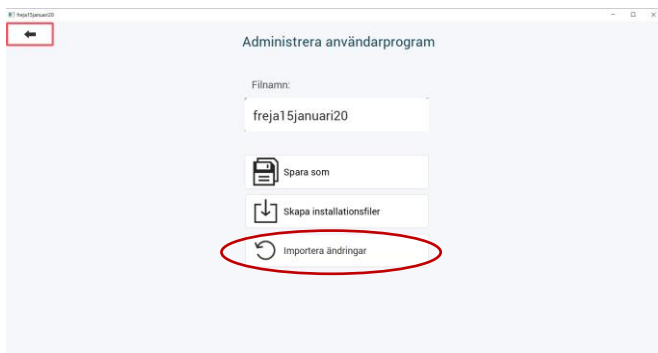

Gå in i *inställningar-administrera program* och *importera ändringar*

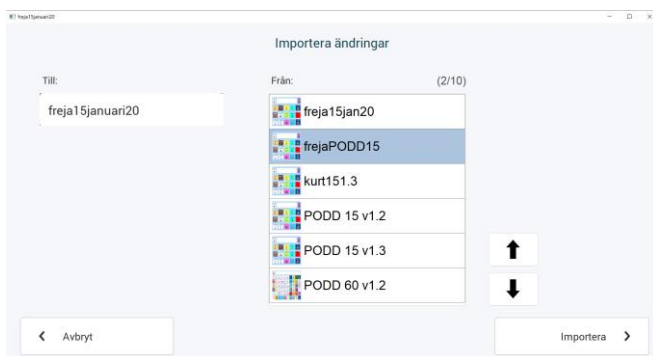

I TILL-fältet finns nu det nya namnet på programmet.

I FRÅN-fältet markerar du det tidigare sparade anpassningsprogrammet

Tryck på Importera.

Nu har alla dina ändringar från din tidigare anpassning flyttats över till den nya programversionen med nya funktioner och möjligheter samt att du har kvar den äldre versionen av anpassningen och en originalversion PODD15/60 1.3