

## Infobrev: Rolltalk Touch 2 mini og Rolltalk ASK 2 mini



Vi har fått noen tilbakemeldinger på Rolltalk Touch 2 mini og Rolltalk ASK 2 mini.

Vi vil gjerne informere om at vi har gjort forbedringer og oppgraderinger basert på tilbakemeldingene:

- Rolltalken kunne oppleves som «treg» fordi Windows Update ikke klarte å fullføre pga. manglende plass på disk.
  - Løst ved at Rolltalk Touch 2 mini og Rolltalk ASK 2 mini nå blir levert med microSD-kort på 64GB. Dette brukes nå for backup og vil automatisk bli brukt av Windows Update ved plassmangel.
- Opplevd treg oppstart ved at det tok 2 sekunder før maskinen reagerte på touch etter at skjermen våknet.
  - Løst ved justering av strømsparing på lydkort.
- Enkelte har følt at driftstid på batteri er for kort.
  - Justering i strømsparingskjema viser driftstid på batteri på rundt 8 timer 30 min (ved bruk av Elektronisk PODD).
  - Mulighet til å slå av skjermen etter 10 min hvis maskinen ikke er i bruk, gir en økt driftstid på batteri på +10-20%.

Vennlig Hilsen

Lars Bredahl  
Country Manager Abilia