

Styr både din fysiska och virtuella värld

GEWA Connect

GEWA Connect hjälper dig att styra din fysiska omgivning, såsom TV, lampor, fönster och dörrar eller enheter med z-wave som till exempel en Andromeda Socket.

Den hjälper dig också att hålla kontakten med familj och vänner eftersom du även kan använda GEWA Connect till att ringa, skicka SMS, använda Facebook och andra sociala medier. Du kan läsa de senaste nyheterna online, titta på YouTube eller spela musik genom att styra din smartphone med GEWA Connect.

Detta gör att du blir mer självständig och känner dig trygg både i ditt hem och på jobbet.

Art.nr 461188




ABILIA

STYR DIN FYSISKA OCH VIRTUELLA VÄRLD

Med GEWA Connect sammanfogas din fysiska och virtuella värld och gör det enkelt att styra båda. Installera GEWA Connect på din egen enhet så kan du genast börja kontrollera din omgivning från din smartphone eller surfplatta.

HUR FUNGERAR GEWA CONNECT?

Hjärtat i systemet är Abilia Multibox som är ansluten till din enhet via Bluetooth. GEWA Connect är installerad på enheten och tar emot kommandon från manöverkontakten som är ansluten till multiboxen. Fjärrkommandon skickas från appen till IR- eller GEWA-radiosändaren i multiboxen för att styra din fysiska omgivning.

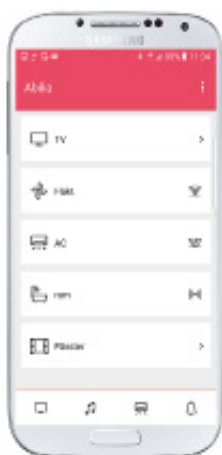

Listvy



Rutnätsvy

Baserat på dina egna behov kan du välja att hantera din miljö med antingen listvy eller rutnätsvy.

Systemet styrs med mekaniska kontakter, sug- och blåskontakter eller den typ av kontakt som bäst passar dina behov.

Du kan enkelt växla mellan listskanning och punktskanning beroende på vilken app och vilken funktion du använder i det ögonblicket.



GEWA Connect punktskanning på en surfplatta

INBYGGD LARMFUNKTION FÖR DIN TRYGGHET

I GEWA Connect finns en inbyggd larmfunktion för att du snabbt ska kunna påkalla hjälp vid behov. Larmet skickas på det sätt som du själv valt. Funktionen utförs i multiboxen, vilket innebär att om din telefon är avstängd kan du skicka larmet ändå.

TA MED DIG GEWA CONNECT NÄR DU RESER

Du kan ta med dig GEWA Connect när du är på resande fot. Det finns möjlighet att definiera kommandon för de omgivningar du vanligtvis rör dig i utanför ditt hem.

ENKEL OCH SÄKER DATAHANTERING

Tack vare vår webbtjänst myAbilia kan du hantera inställningar och konfiguration via en dator och allt lagras på ett säkert ställe på internet. Det betyder att om du förlorar din telefon av någon anledning, är all din information lätt att ladda ner från myAbilia till din nya smartphone eller surfplatta.

PRODUKT	ART NR.	TEKNISK INFORMATION		LEVERERAS MED
GEWA Connect	461180	Ingång	3.5 mm jack	- Multibox inkl. laddare
		Sändningsmetod	IR and GEWA Radio	- Manual
		Vikt	153 g	- Licens voucher
		Storlek (HxBxD)	108 x 67 x 22 mm	- Rekommendationer