

# Trygghet överallt

## EpiMobile

EpiMobile är ett epilepsilarm för dig som har ett aktivt liv eftersom den kan användas både inomhus och utomhus.

EpiMobile registrerar och larmar vid kramper som en följd av generaliserade toniskt/kloniska epileptiska anfall. Om du får ett anfall larmas dina anhöriga eller stödpersoner automatiskt via en mobil, både som uppringning och SMS.

Med EpiMobile kan du känna dig trygg även om du är ensam och inte omgiven av andra människor, vart du än befinner dig.

Art.nr: 464240



## EPIMOBILE

Larmet består av ett armband med inbyggd sensor och ett uppladdningsbart batteri, samt en mobiltelefon med EpiMobile applikationen installerad.

Sensorn mäter armens rörelse i tre olika lägen och känner av om rörelserna är av epileptisk karaktär, eller om det är vanliga rörelser.

Sensorn och applikationen kommunicerar fortlöpande med varandra via Bluetooth. Larmsignaler sänds från sensorn till applikationen i smartphonen, som sänder larm till en eller flera stödpersoner vid ett anfall.




EpiMobile vidareänder larm till stödperson via mobiltelefon, både som uppringning och SMS.

## ALLTID TRYGG

EpiMobiles primära syfte är att du ska känna dig trygg, vart du än befinner dig. Om inte din stödperson nummer ett bekräftar mottaget larm så skickas ett larm till stödperson nummer två.

Sensorn får ström genom ett uppladdningsbart batteri. Batteriet ska laddas en gång per dygn.

Du kan själv ställa in hur applikationen ska kommunicera, när den ska skicka sms, samt om den ska visa din exakta position. Smartphonens inbyggda GPS kan användas för att lokalisera dig om ett anfall sker utomhus.

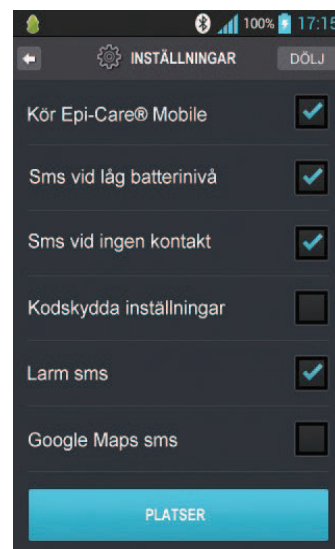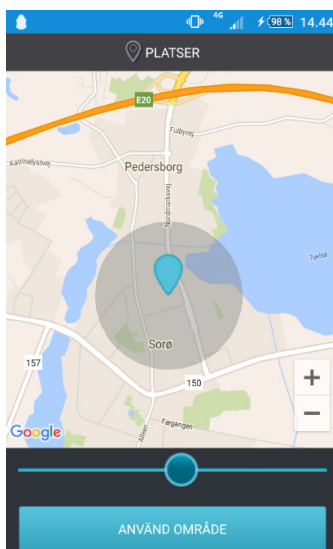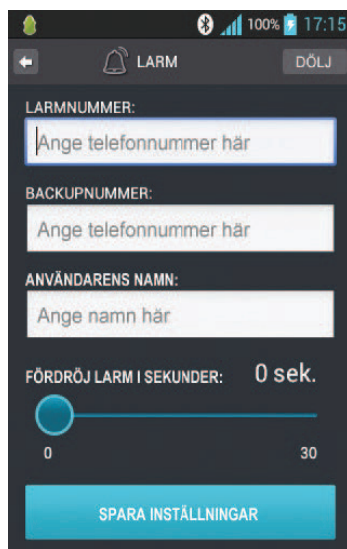

### TEKNISK INFORMATION TELEFON

Operativsystem: Android 7,0  
Mått: 144 x 72 x 10 mm  
Vikt: 162 g  
Minne: 16 GB

### TEKNISK INFORMATION SENSOR

Laddare: 900mA, 5V DC  
Inbyggd batteri: 4,2V litium polymer  
IP-klassificering: IP 32 900mA, 5V DC

