



GEWA Andromeda BED

Uavhengighet, integritet og sikkerhet

Art.nr: 419893

GEWA Andromeda BED sengemottaker kan gjøre deg mer selvstendig når det gjelder å bytte stilling i sengen. Sammen med en motordrevet seng og en trådløs sender kan du f.eks. endre hodeendens høyde. Du kan styre sengen på ulike måter, for eksempel ved å trykke direkte på en knapp eller ved å bruke en sug- og blåskontakt.

Sengemottakeren kan styre to funksjoner samtidig. Dette muliggjør stabil og bekvem kontroll med myk posisjonering.

Valgt sengebevegelse styres bare så lenge senderens knapp holdes nede. Dessuten stanser bevegelsen etter noen sekunder. Dette er for høyere sikkerhet og for å unngå for store sengebevegelser.



GEWA Andromeda BED er en IR-mottaker som kan brukes til å kontrollere funksjonene til en motorisert seng trådløst via en GEWA IR-sender. Mottakeren har åtte releutganger som kan kontrollere maksimalt åtte sengefunksjoner: hodeenden, fotenden, kneområdet og hele sengen opp/ned.

FUNKSJONER

GEWA Andromeda BED kan kontrollere to funksjoner samtidig, og det muliggjør individuell tilpasning av bevegelsesmønster.


Produktet har høy sikkerhet takket være at valgt sengebevegelse styres bare så lenge senderens knapp holdes nede, en såkalt monostabil funksjon.

For å forhindre ufrivillig sengebevegelse stanser bevegelsen etter 3 sek. Reléets aktiveringstid kan dessuten stilles ned til 1,5 sek.

GEWA Andromeda BED har en meget følsom IR-mottaker, og dette innebærer at mottakeren kan plasseres under sengen og likevel ha høy funksjonssikkerhet. Dersom mottakeren ikke kan monteres med fri sikt, kan man tilkoble en ekstern detektor.

Mottakeren leveres forprogrammert med ferdig kablasje for umiddelbar bruk, og dette gjør den enkel å installere. Det er også mulig å bytte kablasje dersom du bytter sengemodell.

GEWA Andromeda BED er et egenutviklet produkt med CE-merking i henhold gjeldende medisinsk teknologidirektiv.

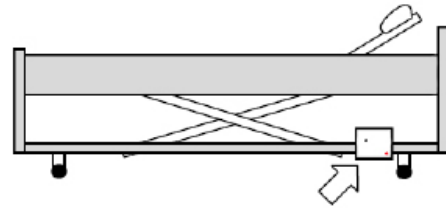

TEKNISK INFORMASJON

Mål: 151 mm x 125 mm x 60 mm

Strømforsyning: 12-24 V DC

Strømförbruk ved hvile: 0, 15 W

Strømförbruk til maks: 1,6 W

Maksimal belastning per stafett: 200 mA/30 V AC,

350 mA/60 V DC

Beskyttelse: IP 54



Art.nr: 419892

PRODUKT	ART.NR	BESKRIVELSE
Andromeda IR-REC8 BED	419892	Montert kablage LINAK 10 PIN MODULAR
Andromeda IR-REC8 BED	419893	Montert kablage LINAK 8 PIN DIN
TILBEHØR		
Andromeda IR-DET 3	419860	Extern detektor med 3 meter kabel