



För en säkrare vardag

Emfit SafeBed

Emfit SafeBed är ett frånvarolarm som känner av om du lämnar sängen och inte återkommer inom en förinställd tid.

Detta ger en ökad säkerhet för dig som har en tendens att stiga upp och gå iväg utan uppsikt, då larmet uppmärksammar personal eller anhöriga som är i närheten.

Art.nr: 464001



SAFEBED

SafeBed består av en kontrollenhet där inställningar görs och en sensor som placeras under madrassen.

Om tidsinställningen görs kort (3 sekunder) så kommer larmet att utlösas direkt när personen lämnar sängen. Genom att öka tiden (upp till 30 minuter) kommer larmet att utlösas om personen inte är tillbaka i sängen efter inställd tid.

SafeBed har en justerbar ljudsignal som kan larma personal eller anhörig som är i närheten. Med hjälp av tillbehören IOR och TREX kan du välja att vidarekoppla larmet till en personsökare eller en mobiltelefon.

Emfit SafeBed ingår i en serie tillförlitliga larmprodukter som är väl beprövade och används i både hemmiljö och särskilt boende runt om i världen.



Sensorn placeras under madrassen

TEKNISK INFORMATION

SENSOR

Storlek	400 x 580 x 1,5 mm
Material	Polyester
Kabellängd	300 mm

KONTROLLENHET

Storlek	97 x 127 x 30 mm
Vikt	150 g
Färg	Vit
Batteri	2 st 1.5 V, AA-batterier

ART.NR TILLBEHÖR

464015	Strömadapter
464005	Väggfäste
.....	IOR
464340	TREX