



## Stor og lett å forstå

### GEWA Maxi

GEWA Maxi er en stor, robust og brukervennlig fjernkontroll som hjelper deg med å håndtere utstyr i hjemmet. Du kan kontrollere tv, musikkanlegget og lamper, samt åpne og lukke vinduer og dører.

Har du nedsatt bevegelighet, syn eller bare problemer med å forstå en vanlig fjernkontroll, vil GEWA Maxi veilede deg med bilder og store nedsenkede knapper.

Med GEWA Maxi kan du bli mer selvstendig. Du bestemmer selv og behøver ikke hjelp av pårørende eller andre støttepersoner.

Art.nr 461130



## GEWA MAXI GJØR DET VANSKELIGE ENKLERE

Tradisjonelle fjernkontroller har ofte mange og små knapper. De kan være vanskelige å se, forstå og trykke på. Noen ganger kreves det mer enn én fjernkontroll til å se tv, f.eks. hvis man har en dekode eller annet koblet til tv-en.

Med GEWA Maxi får du et avgrenset antall store knapper som bare viser det du ønsker å kontrollere. Et knappetrykk kan dessuten sette i gang en hel serie med hendelser, f.eks. først starte dekodeeren og deretter slå på tv.



## LETT Å KONTROLLERE

GEWA Maxi har 16 store knapper som bare krever et lett trykk.

Knappene er nedsenket for å lettere treffe riktig knapp hvis man har nedsatt følsomhet og motorikk.

Bekreftelser i form av lyd, lys og vibrasjoner gir tilbakemeldinger ved et trykk på en knapp.

Hvis man rister på hånden kan man f.eks. stille inn berøringsforsinkelse. Det betyr at en knapp må holdes inne i et forhåndsprogrammert tidsintervall, for at valget skal aktiveres.

## LETT Å FORSTÅ

Knappene er tilpasset med forklarende bilder som tydelig symboliserer hva som skal kontrolleres.

Overlegg med bilder lages lett på Abilias hjemmeside. En plastlomme beskytter overlegget mot smuss og fukt.

Hvis du ikke trenger alle de 16 knappene, kan man skjule ubrukte knapper med et deksel. Deksløst gjør at overflaten føles jevn og knappen er ikke synlig.

## LETT Å HÅNDBERE

Du kan lett komme i gang og bruke GEWA Maxi. En videoguide veileder deg i hvordan man f.eks. overfører IR-kanaler fra tv-ens fjernkontroll.

GEWA Maxi kan festes på et bord med den medfølgende borrelåsen. Dermed unngår du at den glir bort eller faller på gulvet. Til forskjell fra en vanlig fjernkontroll, trenger du ikke peke GEWA Maxi mot utstyret du vil kontrollere.



### TEKNISK INFORMASJON

|             |        |
|-------------|--------|
| Lengde      | 242 mm |
| Bredde      | 160 mm |
| Høyde foran | 23 mm  |
| Høyde bak   | 42 mm  |
| Vekt        | 700 g  |

### TILBEHØR

| Produkt                    | Artikelnr. |
|----------------------------|------------|
| Plastlomme GEWA Maxi       | 461172     |
| Borrelåsstropper GEWA Maxi | 461173     |
| Plastdeksler               | 461175     |

### LEVERES MED

|                  |
|------------------|
| Plastlomme       |
| Borrelåsstropper |
| Plastdeksler     |
| Batterier        |
| Bruerveiledning  |