

# En känsla för tid

## MEMO Timer



Ibland kan det vara svårt att förstå tid och tidsmängd, till exempel hur lång tid *en halvtimme* är. Men med hjälp av MEMO Timer kan du enkelt förstå tid och få en känsla för hur lång tid en aktivitet kommer att ta.

MEMO Timer visar tiden i form av ljuspunkter som slocknar allt eftersom tiden går. När tiden är slut blir du informerad om det genom ljud, ljus och vibration. I de fall du inte vill störa omgivningen kan du välja att få larmet enbart med vibration.

Eftersom MEMO Timer är vattentät så kan du använda den både i badrummet och även när du är utomhus, oavsett väder.

Art.nr 500155



ABILIA

## GER EN KÄNSLA AV KONTROLL

Ta hjälp av MEMO Timer för att veta hur lång tid det är kvar till nästa aktivitet. Om du till exempel ska gå till skolan eller arbetet om en timme, så ställer du in MEMO Timer på 60 minuter. Då ser du tydligt hur tiden går allt eftersom ljuspunkterna slocknar och du vet precis när du måste börja klä på dig ytterkläderna. Känslan av kontroll minimerar risken för stress i onödan.



Du kan också använda MEMO Timer för att veta hur länge en aktivitet ska pågå. Om du ska duscha på morgonen innan du går hemifrån, så ställer du in MEMO Timer på till exempel 20 minuter. Då ser du tydligt hur tiden går och vet precis när du måste vara klar, vilket ger dig både självständighet och trygghet.

## LÄTT ATT FÖRSTÅ OCH TA MED SIG ÖVERALLT



MEMO Timer är lätt att använda och att förstå. Den ger dig en tydlig bild över tidsmängden genom ljuspunkterna som på ett pedagogiskt sätt slocknar när tiden går, vilket ger ett visuellt intryck av hur lång tid det är kvar. Med hjälp av både ljus, ljud och vibration blir du informerad om när tiden är slut.

MEMO Timer är liten och smidig och får plats i en normalstor ficka. Den är behaglig att hålla i med en bra passform för din hand. MEMO Timer är robust och tålig vilket gör att du kan ta med den överallt. Den är även vattentät så du kan ta den med dig när du diskar, står i duschen eller är utomhus, oavsett väder.

MEMO Timer finns i fyra versioner:

MEMO Timer 8 visar tiden i 2, 4, 6, 8 minuter.  
MEMO Timer 20 visar tiden i 5, 10, 15, 20 minuter.  
MEMO Timer 60 visar tiden i 15, 30, 45, 60 minuter.  
MEMO Timer 80 visar tiden i 20, 40, 60, 80 minuter.

### PRODUKT

MEMO Timer 8	500150
MEMO Timer 20	500155
MEMO Timer 60	500160
MEMO Timer 80	500165

### ART.NR

### TEKNISK INFORMATION

Mått:	107 x 46 x 25 mm
Vikt:	0,12 kg
Batteri:	2 x AA-batterier 1,5 V
Volym:	max 80 dB
Klass:	IP67

### MEMO TIMER LEVERERAS MED

- MEMO Timer
- Halsrem
- Kort rem
- 2 x AA-batterier 1,5 V
- Manual

