



För ökat lugn och fokus

Somna Kedjeväst 2.0

Somna Kedjeväst 2.0 är en dagprodukt som framförallt påverkar känsel- och muskel-/ledsinnena. Användaren får stimulering tack vare kedjorna i västen och detta ger en lugnande effekt.

Genom att spänna åt västen får man både en tryck- och viktfunktion. Med tyngdvästens hjälp får man samma lugnande, fokuserande effekt, i en bärbar form, som Somna Kedjetäcke ger nattetid.

Somna Kedjeväst 2.0



ABILIA

ANVÄNDNING

Somnas Kedjeväst 2.0 är en dagprodukt som påverkar känsel-, muskel- och ledsinnena. Med hjälp av de justerbara spännena kan man själv anpassa trycket mot kroppen. Trycket ger en tydlig återkoppling på kroppens gränser och effekten blir en ökad kroppsuppfattning. Kedjorna i västen ger stimulans och en lugnande effekt. Genom att lugna sinnena och öka kroppsuppfattningen kan man lättare koncentrera sig på aktiviteter i vardagen samt få en bättre koordination.

Somna Kedjeväst 2.0 är utformad för att vara så smidig som möjligt, inga kedjor är placerade över axelpartiet eller skulderbladen, detta för att bevara en god komfort och rörlighet. Kedjevästen ska användas så nära kroppen som möjligt och kan med fördel användas med en tröja eller jacka utanpå.

Västen hjälper till att bevara fokus och sälla bort onödiga intryck. Den kan exempelvis användas för att klara av att delta i sociala sammanhang eller för att förbereda sig inför en aktivitet som upplevs som svår, t. ex. att gå och handla.

Västen kan användas med eller utan en tyngdkrage. Med kragen på får man en extra tyngd och grundning från axlarna och ner genom kroppen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dämpa oro och ångest
- Uppnå ett större lugn
- Förbättra kroppsuppfattning
- Förbättra uppmärksamhet och koncentration

MATERIAL OCH INNEHÅLL

Tyget är slitstarkt och i en mörkgrå färg.
Textil: 70% polyester, 30% bomull
Fyllning: 100% stålkedjor

TVÄTTANVISNING

Kedjeväst 2.0 tvättas i högst 60 °C på skonsamt tvättprogram.
Använd medföljande tvättpåse.

Detta är en medicinteknisk produkt, klass I, och är CE-märkt i enlighet med den europeiska förordningen 2017 / 745 - MDR.

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	Benämning	Storlek	Vikt
600770	Kedjeväst 2.0	110/122	1 kg
600775	Kedjeväst 2.0	128/140	1,5 kg
600780	Kedjeväst 2.0	146/158	2 kg
600785	Kedjeväst 2.0	XS	2 kg
600790	Kedjeväst 2.0	S	2,5 kg
600795	Kedjeväst 2.0	M	3 kg
600800	Kedjeväst 2.0	L	3,5 kg
600805	Kedjeväst 2.0	XL	4 kg

