



Kalenderklocka med påminnelser

CARY Base

CARY Base är en kalenderklocka för personer som behöver extra hjälp att hålla reda på dygnet och dagens händelser.

CARY Base visar information om datum, tid och om det är morgon, dag, kväll eller natt. Vid ett tryck på skärmen läses informationen upp.

Dagens händelser kan visas på skärmen och talade påminnelser kan fås vid önskade tider. Anhöriga eller omsorgspersonal kan hjälpa till att hålla kalendern uppdaterad på distans.

Art.nr: 508900



ABILIA

ATT ANVÄNDA CARY BASE

Placera CARY Base på en plats där användaren ofta vistas. Det kan till exempel vara i sovrummet, vid tv:n eller i köket.

Anslut till internet och webbtjänsten myAbilia om anhöriga och omsorgspersonal på distans ska hålla dagsplanen uppdaterad.



ATT ANPASSA CARY BASE


Ställ in vad som ska visas på skärmen utifrån användarens behov. Tänk på att ställa in CARY Base så att skärmen visar "natt" när användaren ska sova och "morgon" när användaren stiger upp.

Istället för att trycka på skärmen, kan en yttre manöverkontakt (tillbehör) användas för att få informationen uppläst.



FÅ ÖVERSIKT

Använd dagsplanen i CARY Base för att visa dagens viktigaste händelser.

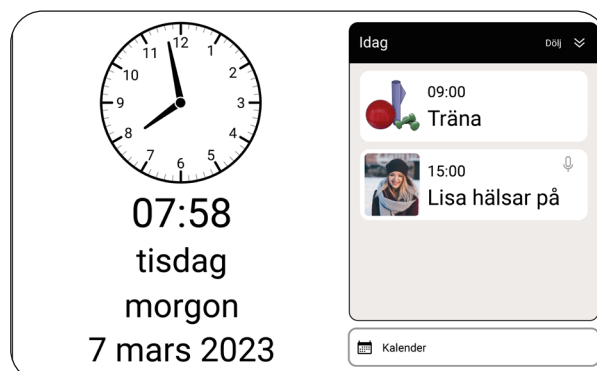

FÅ PÅMINNELSER

Om man önskar kan CARY Base signalera när en händelse börjar. Samtidigt kan då även ett talat meddelande spelas upp.



CARY Base är en medicinteknisk produkt som är avsedd för inomhusbruk i hemmiljö.

TEKNISK SPECIFIKATION

Mått (hxbxd)	207 x 137 x 74mm
Vikt	520 g
Skärm	8 tum
Tillgängliga språk	Svenska, norska, danska, finska, isländska*, samiska, engelska (brittisk eller australiensisk), tyska, nederländska, flamländska, franska, spanska, italienska, slovenska*, bosniska*, kroatiska*, serbiska*, tjeckiska, polska, albanska*, arabiska, persiska*, turkiska, somaliska*, ungerska*, ryska, grekiska (språk med* saknar talstöd).

