



Kalenderklokke med påminnelser

CARY Base

CARY Base er en kalenderklokke for personer som trenger ekstra hjelp til å holde rede på døgnet og dagens hendelser.

CARY Base viser informasjon om dato og klokkeslett, og om det er morgen, dag, kveld eller natt. Når du trykker på skjermen, leses informasjonen opp.

Dagens hendelser kan vises på skjermen, og du kan få talepåminnelser til ønsket tidspunkt. Pårørende eller omsorgspersonell kan hjelpe til med å holde kalenderen oppdatert på avstand (krever tilbehøret myAbilia fjernadministrasjon).

Art.nr: 508910



ABILIA

BRUKE CARY BASE

Plasser CARY Base der brukeren ofte oppholder seg. Det kan for eksempel være på soverommet, ved TV-en eller på kjøkkenet. Koble til Internett og nettsjeneren myAbilia dersom pårørende og omsorgspersonell skal holde dagsplanen oppdatert på avstand. (Krever tilbehøret myAbilia fjernadministrasjon.)



TILPASSE CARY BASE

Still inn hva som skal vises på skjermen ut fra brukerens behov. Husk å stille inn CARY Base slik at skjermen viser «natt» når brukeren skal sove og «morgen» når brukeren står opp.

I stedet for å trykke på skjermen, kan det brukes en ekstern bryter (tilbehør) for å få informasjonen opplest.



FÅ OVERSIKT

Bruk dagsplanen i CARY Base til å vise dagens viktigste hendelser.



FÅ PÅMINNELSER

CARY Base kan signalisere når en hendelse begynner. Samtidig kan det også spilles av en talemelding.



CARY Base er medisinsk utstyr utviklet til bruk innendørs i hjemmemiljø.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Mål (hxbxd)	207 x 137 x 74mm
Vekt	520 g
Skjerm	8 tommer
Tilgjengelige språk	svensk, norsk, dansk, finsk, islandsk*, engelsk (britisk eller australsk), tysk, nederlandsk, flamsk, fransk, spansk, italiensk, slovensk*, bosnisk*, kroatisk*, serbisk*, tsjekkisk, polsk, albansk*, arabisk, persisk*, tyrkisk, somalisk*, ungarsk*, russisk, gresk (språk med* uten talestøtte).

TILBEHØR

508911 myAbilia fjernadministrasjon 3 år