

Maj 2025

Ny programversion av MEMOplanner

Vi vill informera om att det den 27 maj släpps en ny programversion av MEMOplanner och MEMOplanner Go: Version 4.4.


Artikel 462890 MEMOplanner Medium 4 och 462885 MEMOplanner Large 3 kommer från och med detta datum att levereras med den nya versionen.

Redan levererade enheter med MEMOplanner Generation 4 kommer att uppdateras automatiskt om de är anslutna till Internet. MEMOplanner Go uppdateras automatiskt om så är inställt på telefonen.

Nyheter i MEMOplanner version 4.4

Här är de viktigaste nyheterna i MEMOplanner v4.4:

- **Ny funktion: Timer i aktivitet*.** Nu är det möjligt att starta en förinställd nedräkning i samband med att aktiviteten börjar, istället för att ha en fast sluttid för aktiviteten.
- **Ny funktion: Fristående checklistor.** Nu är det möjligt att använda checklistor utan koppling till aktiviteter. Checklistorna kan utgå från mallar som skapats i MEMOplanner eller via myAbilia.
- **Förbättrad kontohantering*.** Nu ingår det fler steg i guiden "Skapa konto": *Lägg till kontaktuppgifter* samt *Lägg till stödpersoner*. Informationen kan även läggas till senare via inställningar. Tack vare kontaktuppgifter (som nu både kan vara e-postadress och mobilnummer) kan bortglömt lösenord återställas utan hjälp från Abilia. Tack vare möjligheten att lägga in stödpersoner direkt i MEMOplanner görs denna funktion mera tillgänglig.

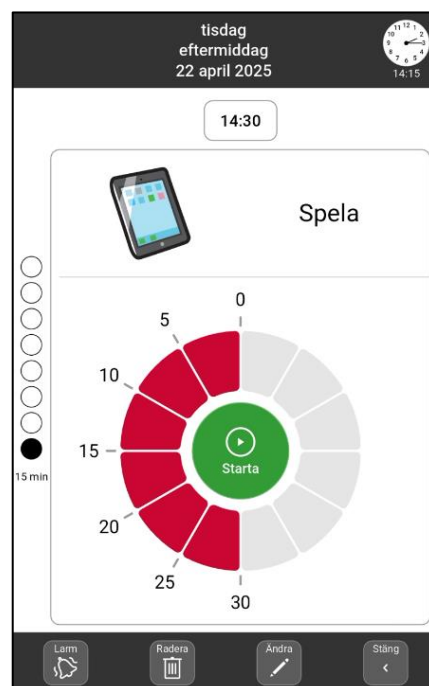

* Motsvarande nyhet även i webbtjänsten myAbilia

För mer utförlig information se det bifogade bildspelet (pdf).

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig