



Samla tankar och skapa struktur

Handi Go – kalenderapp


Handi Go är en trygg samlingsplats för tankar och minnesanteckningar där individen har möjlighet att i lugn och ro skapa ordning och struktur med studier, arbete och vardag. Med appen kan användaren effektivt skapa utkast i form av anteckningar, listor, röstmeddelanden och bilder som sedan planeras in i kalendern eller i att-göra-listor. Kalendern ger stöd i tidsplanering med tidpelare, visuellt stöd och ett enkelt arbetsflöde för att skapa och redigera aktiviteter.

ÖVERSIKT AV DAGEN

Hemvyn ger en samlad översikt av kommande aktiviteter och uppgifter för dagen.

Från hemvyn går det enkelt att lägga in och spara utkast för att snabbt få ner tankar och information så att inget glöms bort. Användaren kan sedan i lugn och ro gå igenom utkastet för att planera in aktiviteter eller skapa en att-göra-lista.


Art.nr: 706600

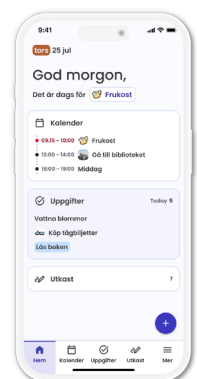

ABILIA

KALENDER OCH AKTIVITETER

Med kalendern får användaren översikt över sin dag, vecka och månad. Kalendern visar tiden och aktiviteter på ett sätt som ger förutsägbarhet, struktur och ordning i vardagen. Det finns bildstöd, veckodagsfärger och aktivitetsfärger för att enkelt få en överblick. Det går att skapa checklista med bilder som går att bocka av för att ha koll på till exempel studier eller träning. För att komma ihåg en aktivitet går det att ställa in påminnelser.

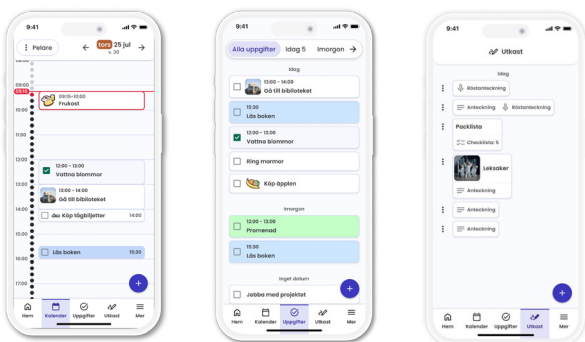

UPPGIFTER

I vyn för uppgifter får användaren en överblick över sina uppgifter. Uppgifter kan skapas för att göras en specifik dag eller utan tidsbestämning. När en uppgift är avklarad bockar användaren av den.

STÖD PÅ DISTANS

Med webbtjänsten myAbilia kan individen och anhöriga hantera kalender, foton och checklistor från vilken dator som helst. Detta kan skapa en trygghet för både individ och familj. MyAbilia fungerar också som en backup för all data.



LICENS OCH KONTO

Licensen för Handi Go gäller i tre år. Ett konto i myAbilia webbportal ingår. Stödperson och kontoadministratör får en påminnelse om att förlänga licensen tre månader innan den går ut.

LEVERERAS MED

Handi Go levereras med manual och licensnyckel. Appen laddas hem från App Store eller Google Play.

Handi Go är ett medicintekniskt hjälpmedel klass I för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller Förordning (EU) 2017/745 - MDR.

TEKNISK SPECIFIKATION

iOS version 13 eller senare

Android version 7 eller senare