



## Lätt att bära, lätt att styra

### Pico1 och Pico2 IR-sändare

Pico1 och Pico2 är två handhållna IR-sändare med 1 respektive 2 knappar. Sändarna är programmerbara och kan styra både specialprodukter som en dörrautomatik, men också konsumentprodukter som t ex en IR-styrd TV.

Sändarna har en låg vikt och kan smidigt hängas i medföljande halsrem. Sändarnas knappar ger en tydlig taktil återkoppling och kräver endast liten tryckkraft vid aktivering.

Art.nr: 10000000 Pico1 IR-sändare

Art. nr: 10000001 Pico2 IR-sändare



ABILIA

## Funktioner i Pico1 och Pico2

- Programmerbar IR
- Inbyggda IR-kanaler
- Kodad kanal, låskod
- Möjligt att sända kontinuerligt vid tryck och håll eller vid ett tryck
- Val av ljud vid tryck eller ej
- Val av anslagsfördröjning vid behov, så kallat tremorfilter



## Batteri

Pico1 och Pico2 har uppladdningsbart batteri, och detta ska normalt aldrig bytas.

Batteritid är 1-3 månader vid normal användning. Vid tomt batteri blinkar en röd lampa vid IR-sändning. Laddningstid för tomt batteri är ca 4-5 timmar. När batteriet är fulladdat lyser en grön lampa med fast sken.



## Programmering via skärm

Funktionerna för Pico1 och Pico2 kan programmeras via mobil eller Windows PC. Anslutnings-kablar följer med och manualen visar tillvägagångssätt.



## Programmering direkt i Pico1 och Pico2

Val av gemensamhetskod, GEWA Link kanal, eller kodad kanal, låskod kan programmeras direkt i Pico1 och Pico2. Vid leverans är sändarna färdigprogrammerade med GEWA Link 16 på knapp 1 och slumpmässig kodad kanal.

Vid inläring av IR-kod från en original IR-fjärrkontroll lägges Pico1 eller Pico2 mitt emot original-fjärrkontrollen.

Medföljande manual visar hur man går till väga vid programmering.



## TEKNISK SPECIFIKATION

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Mått (HxBxD) | 16 x 47 x 83 mm |
| Vikt         | 30 g            |
| Tryckkraft   | ca 180 gram     |