



Frånvarolarm i säng

Emfit SafeBed

Emfit SafeBed är en rörelsemonitor som används för att upptäcka frånvaro från sängen.

När en person lämnar sängen löser ett larm ut till en stödperson om personen inte återvänder inom en förinställd tid.

Produkten består av en sängsensor som placeras under madrassen och en kontrollenhet. Kontrollenheten notifierar vårdgivaren genom att blinka och avge ett ljud. Notifikationen kan vidarebefordras till ett externt system.

Larmet ska användas inomhus, i hemmiljö, eller på vårdhem.

Art.nr: 464001



ABILIA

Emfit SafeBed

Emfit SafeBed består av en sängsensor som placeras under madrassen och en kontrollenhet.

Kontrollenheten notifierar vårdgivaren genom att blinka och avge ett ljud. Notifikationen kan vidarebefordras till ett externt system.



Emfit SafeBeds kontrollenhet

Kontrollenheten aktiveras för närvaro efter sensorn detekterat rörelser eller mikrorörelser i en minut efter en person lagt sig i sängen. Efter aktivering utlöses ett larm om personen lämnar sängen och inga rörelser eller mikrorörelser upptäcks inom förinställd tid



Emfit SafeBeds sensor

Sängsensorn registrerar mikrorörelser i kroppen och placeras under en skumgummimadrass/bäddmadrass. Sängsensorn har ingen viktbegränsning men rekommenderas från 10 kg och uppåt. Därför måste känsligheten och förmågan att uppfatta användarens närvaro och de rörelser som ska utlösa ett larm ställas in och testas för respektive användare.



Larmmottagning via externt tillbehör

Emfit SafeBed kontrollenhet kan vidareända larmet till personsökare genom personsökarpaketet "Sändare P212 & Mottagare P202".

Sändare P212 kopplas då ihop med Emfit Safebeds kontrollenhet för att skicka vidare larmsignalen till Mottagare P202.



Emfit SafeBed är en medicinteknisk produkt, klass I, och är CE-märkt i enlighet med den europeiska förordningen 2017 / 745 - MDR.

TEKNISK SPECIFIKATION

SENSOR

Storlek: 430 x 580 x 1,4 mm

Material: Ftalatfri PVC

Kabellängd: 300 mm

IP-klass: IP20

KONTROLLENHET

Storlek: 96 x 127 x 34 mm

Vikt: 110 g

IP-klass: IP20

Batteri: 2 st 1,5 V, AA-batterier

ART.NR TILLBEHÖR

464400 Sändare P212 & Mottagare P202*

464403 Räckviddsförlängare P164**

*Personsökarpaket

**Räckviddsförlängare till personsökaren