



ABILIA



## Nyheter i Handi Go v1.3

# Sammanfattning

---

Nyheter i Handi Go v1.3

## 1. Mallar

- Förenkla inläggning av ny aktivitet och uppgift genom att använda fördefinierade mallar
- Mallarna skapas i Handi Go eller i myAbilia

## 2. Talstöd

- Få informationen på skärmen uppläst av telefonens talsyntes
- Funktionen Tal-till-text aktiveras i Inställningar

## 3. Privata aktiviteter

- Välj om aktiviteten ska vara synlig för stödpersoner i myAbilia
- Standard synlighet väljs i Inställningar


## 4. Övrig förbättrad användarvänlighet

- a) Skapa aktivitet från tidpelaren för att få starttiden ifylld automatiskt
- b) Se mer information i aktivitetsvyn: larm, påminnelser, upprepning
- c) Autofyll användarnamn och lösenord vid inloggning

# Mallar

Nu kan man förenkla inläggningen av aktiviteter och uppgifter genom att använda fördefinierade mallar. Mallarna skapas i Handi Go eller i myAbilia. De kan sorteras för att få önskad översikt.

## Välj Mallar i menyn, och sedan den mall som ska användas

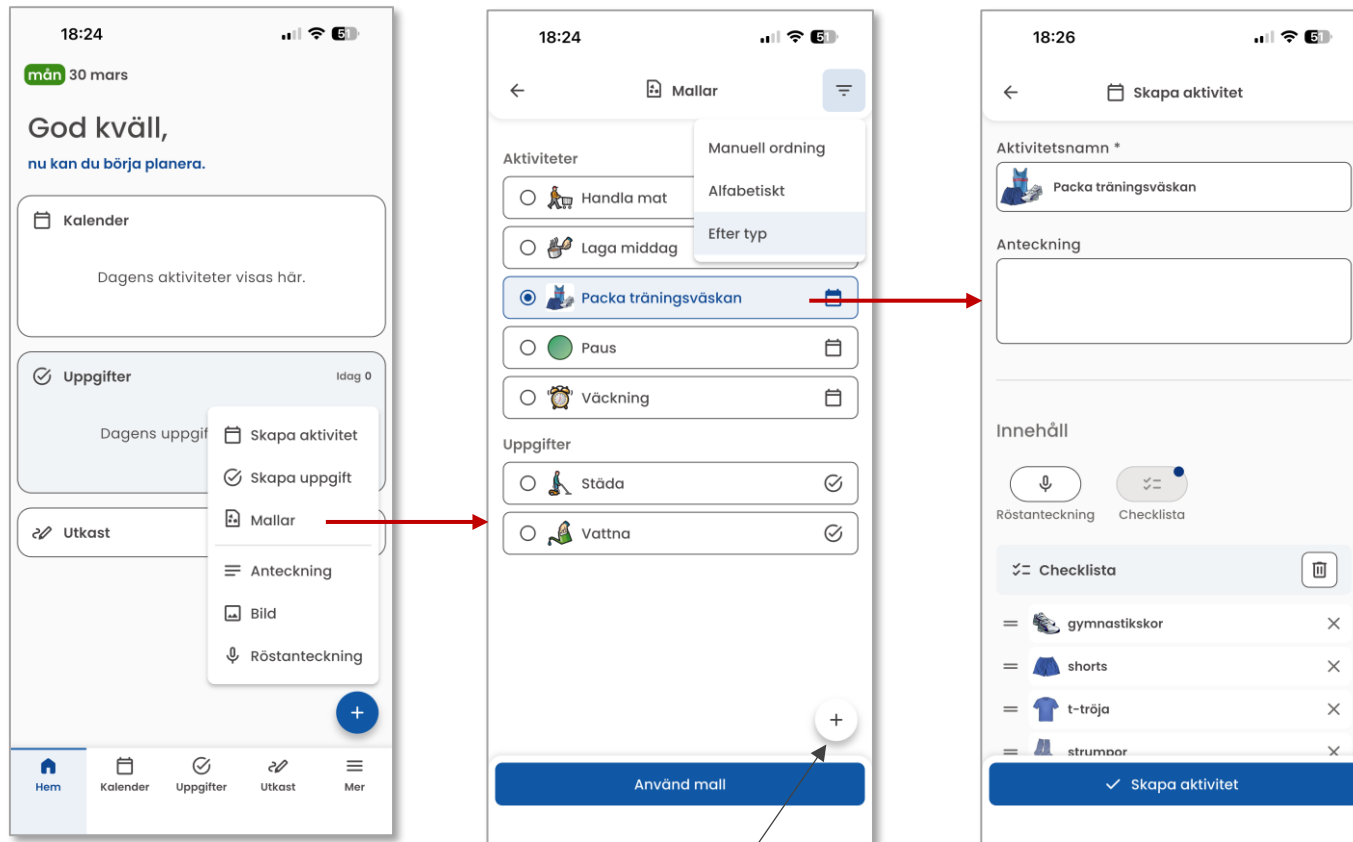


*Den nya aktiviteten får automatiskt de fördefinierade egenskaperna, t ex en bild och en checklista*

Tryck på + för att skapa ny mall från Handi Go


**OBS** att ändring eller borttagning av mallar än så länge endast kan göras från myAbilia

Nu är det möjligt att få informationen på skärmen uppläst av telefonens inbyggda talsyntes. Funktionen Tal-till-text aktiveras i appens inställningar.

## Aktivera Tal-till-text i Inställningar

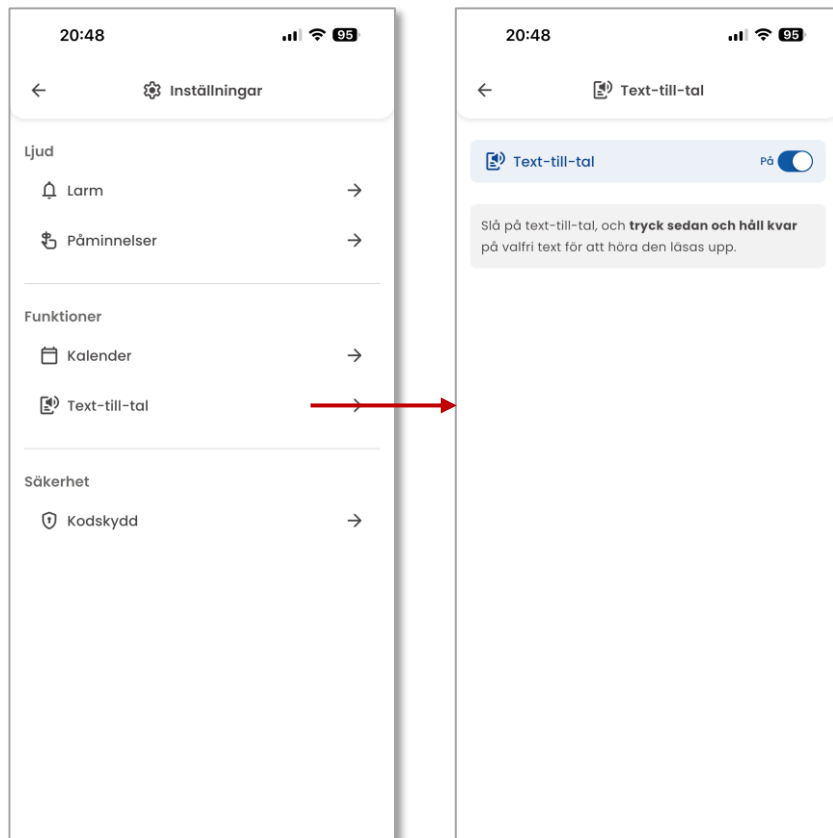


## Tryck och håll kvar på den information som ska läsas upp

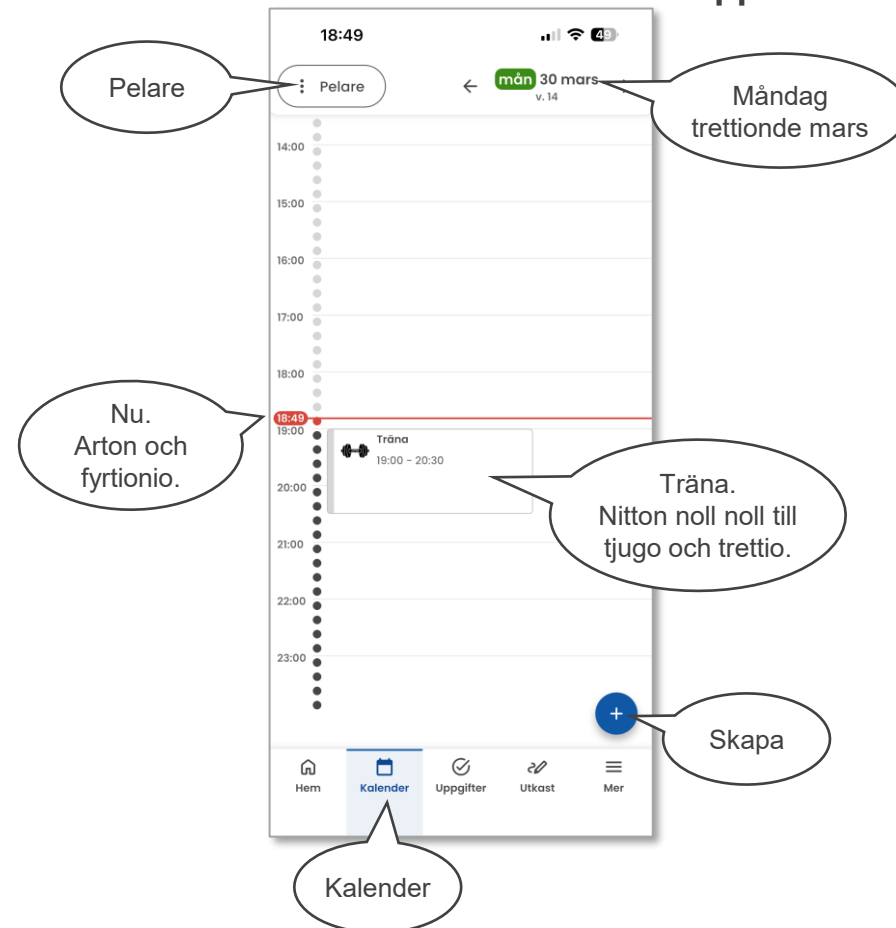

# Privata aktiviteter


Nu kan man välja vilka aktiviteter som ska vara synliga för stödpersoner i myAbilia. Inställningen görs när aktiviteten skapas, och kan ändras vid senare tillfälle.

## Välj om aktiviteten ska synas i myAbilia

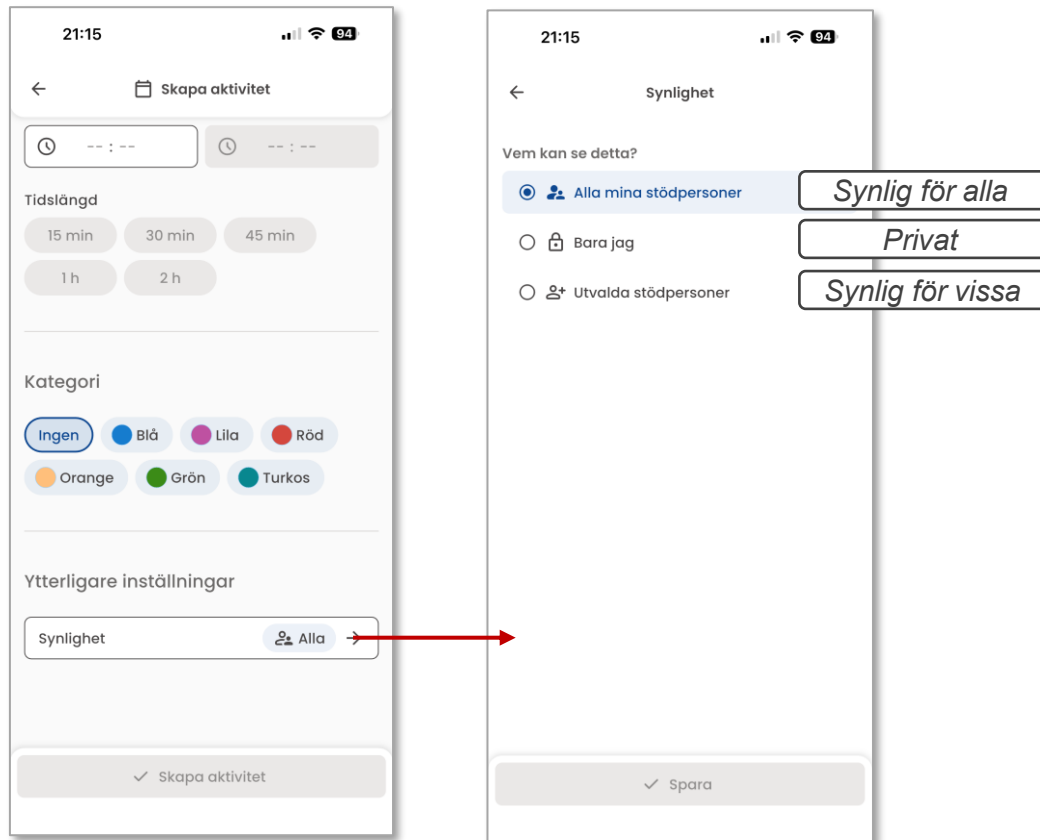

Visas endast när det finns stödpersoner kopplade till användarkontot


## Välj standard synlighet

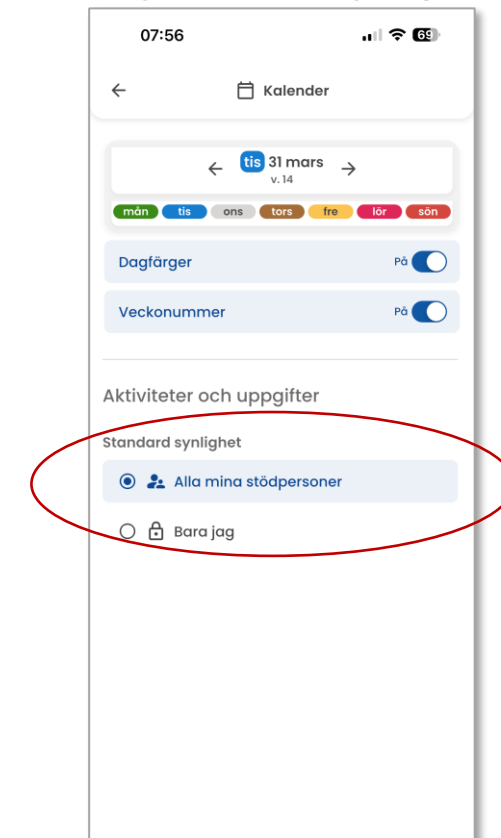

Visas endast när det finns stödpersoner kopplade till användarkontot


# Övrig förbättrad användarvänlighet

## a) Skapa aktivitet från tidpelaren

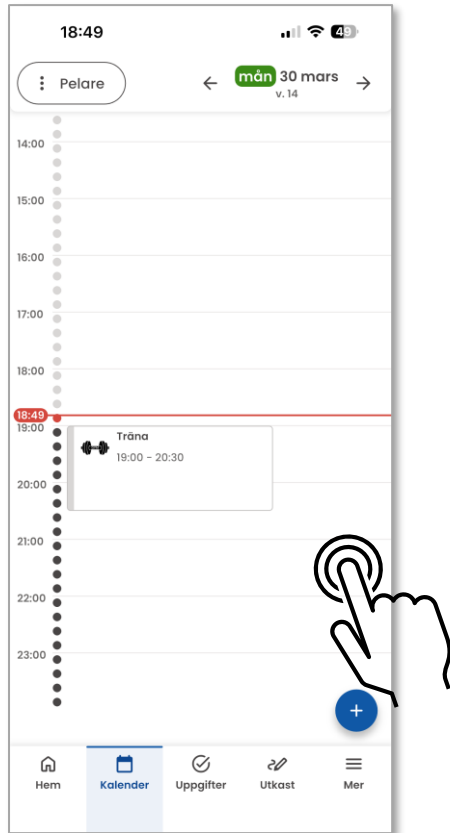


Starttid på den nya aktiviteten blir förvald till 21:00

## b) Se mer information i Aktivitetsvyn

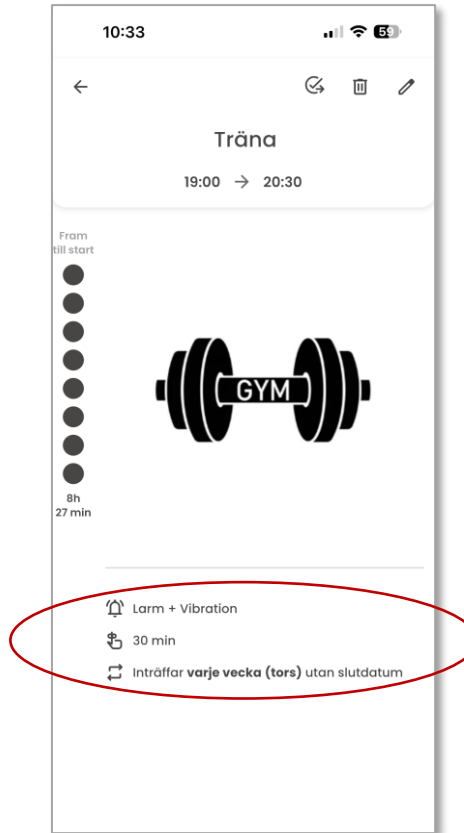

Se att aktiviteten har påminnelse, kommer att larma med ljud och vibration, samt upprepas varje torsdag

## c) Autofyll vid inloggning

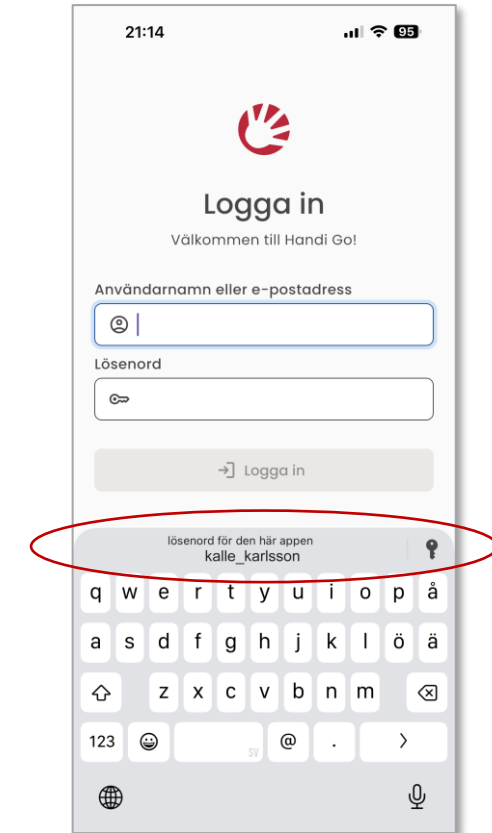

Låt telefonens inbyggda lösenordshantering ta hand om användarnamn och lösenord

**Rätt hjälpmedel i rätt tid  
kan göra verklig skillnad**



Abilia AB | [www.abilia.se](http://www.abilia.se) | [info@abilia.se](mailto:info@abilia.se) | 08-594 694 00