



Ny programversion 1.5 till CARY-serien

Summering

1. Möjligt att klarmarkera aktiviteter

- Gör aktiviteten kvitterbar
- Kvittera aktiviteten när den är klar
- Se klarmarkerade aktiviteter i CARY och i myAbilia

För att ge användaren en känsla av kontroll samt möjliggöra för stödpersoner att se på distans om en aktivitet är utförd

2. Möjligt att använda kvinnlig röst för talstöd

- De flesta språken har nu både manlig och kvinnlig röst
- Standardrösterna är oförändrade
- Ladda ner önskad röst via Inställningar

För att bidra till en mer trygg användning för personer som uppfattar en kvinnlig röst som vänligare och mindre hotfull

3. Batteridrift vid strömavbrott

- Kan gå på batteri i cirka 4 timmar, därefter görs en säker avstängning
- (Batteridriften är en mjukvaruändring, dvs batteriet har inte ändrats)

För att säkerställa kontinuerligt stöd och tillförlitlighet för användare som är beroende av CARY i sin vardag


[Ny funktionalitet i CARY Messenger / Mobile](#)

[Uppdatera CARY Base](#)

Möjligt att klarmarkera aktiviteter

Nu är det möjligt att klarmarkera aktiviteter, i syfte att ge användaren en känsla av kontroll samt möjliggöra för stödpersoner att se på distans om en aktivitet är utförd.

Gör aktiviteten kvitterbar

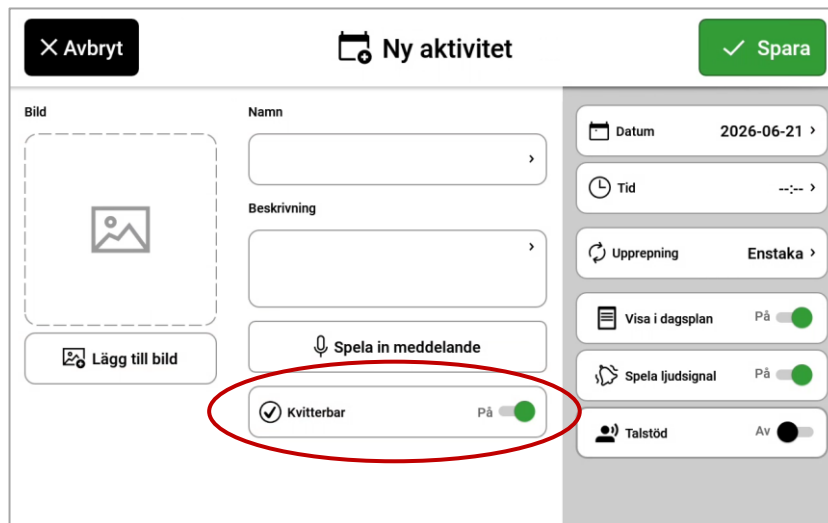

The screenshot shows the 'Ny aktivitet' (New activity) form. At the top, there are buttons for 'Avbryt' (Cancel), 'Ny aktivitet', and 'Spara' (Save). The form includes fields for 'Bild' (Image), 'Namn' (Name), 'Beskrivning' (Description), 'Datum' (Date), 'Tid' (Time), 'Uppprepning' (Repetition), 'Visa i dagsplan' (Show in daily plan), 'Spela ljudsignal' (Play sound signal), and 'Talstöd' (Voice support). The 'Kvitterbar' (Confirmable) toggle switch is highlighted with a red circle and is currently turned on (green).

→ Aktiviteten visas som kvitterbar i dagsplanen



- Ny inställning **Kvitterbar** (standard av)
- Inställningen kan även göras från myAbilia*

* Gäller endast CARY Base och CARY Messenger, ej CARY Base Solo

Kvittera aktiviteten när den är klar

När aktiviteten har kvitteringsmöjlighet visas en Kvittera-knapp i samband med påminnelsen.
Man kan även kvittera aktiviteten genom att öppna den från dagsplanen.

Kvittera i samband med påminnelsen



1. Tryck på **Kvittera** för att klarmarkera aktiviteten



2. Tryck på **Stäng** för att stänga påminnelsen.

OBS: Om användaren inte uppmärksammar påminnelsen kommer den att upprepas enligt befintlig logik (se bruksanvisning).

Kvittera genom att öppna från dagsplanen



1. Tryck och håll ned aktiviteten i dagsplanen så att den öppnas:



2. Tryck på **Kvittera** för att klarmarkera aktiviteten.
3. Tryck på **Stäng** för att stänga vyn.


Se klarmarkerade aktiviteter i CARY och i myAbilia

När en aktivitet är klarmarkerad visas det tydligt både i CARY och i webbtjänsten myAbilia*.

Se klarmarkerade aktiviteter i dagsplanen



Se klarmarkerade aktiviteter i myAbilia*

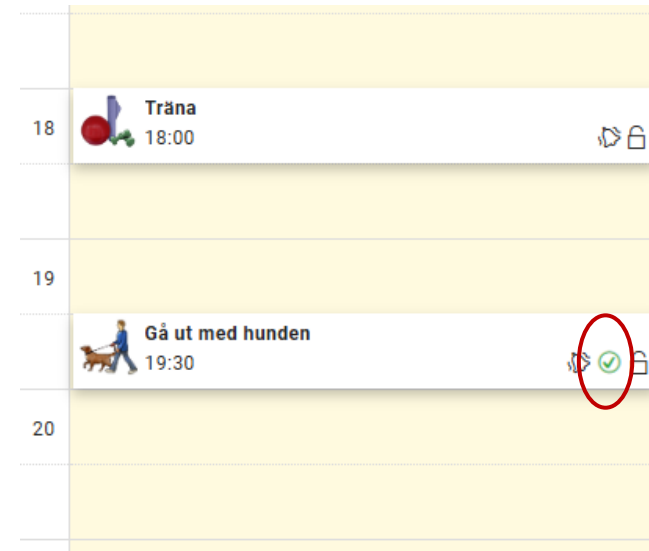


- Gör att stödpersoner kan se på distans om en aktivitet är slutförd eller inte

* Gäller endast CARY Base och CARY Messenger, ej CARY Base Solo

Möjlighet att använda kvinnlig röst för talstöd

Nu har de flesta språken både manlig och kvinnlig röst, varav den kvinnliga behöver laddas ned.
Detta för att bidra till mer trygg användning för personer som uppfattar en kvinnlig röst som vänligare.

Ladda ned den önskade rösten via Inställningar

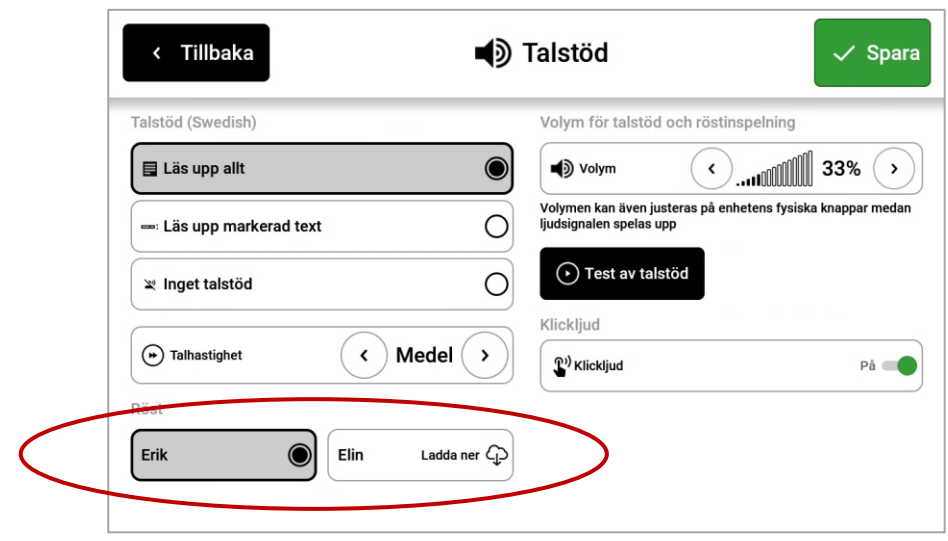

- Gå till **Inställningar | Talstöd** för att ladda ned önskad röst
- OBS! Kräver internetanslutning
- Se lista med nya nedladdningsbara röster, de flesta kvinnliga

Nr	Språk	Manlig röst	Kvinnlig röst
1	Svenska	Erik	Elin
2	Norska	Olav	Bente
3	Danska	Rasmus	Mette
4	Finska	-	Sanna
5	Isländska	-	-
6	Nordsamiska	Biera	Elle
7	Engelska (Storbritannien)	Peter	Lucy
8	Tyska	Klaus	Sarah
9	Nederländska	Daan	Femke
10	Nederländska (Belgien)	Jeroen	Sofie
11	Franska	Antoine	Alice
12	Spanska	Antonio	Maria
13	Italienska	Vittorio	Chiara
14	Slovenska	-	-
15	Bosniska	-	-
16	Kroatiska	-	-
17	Serbiska	-	-
18	Tjeckiska	-	Eliska
19	Polska	Piotr	Ania
20	Albanska	-	-
21	Arabiska	Mehdi	Leila
22	Persiska	-	-
23	Turkiska	-	Ipek
24	Somaliska	-	-
25	Ungerska	-	-
26	Ryska	-	Alyona
27	Grekiska	Dimitris	-
28	Engelska (Australien)	Liam	Lisa
29	Färöiska	Einar	Eva

Svart = Standardröst för detta språk
Blå = Ny, nedladdningsbar röst
- = Inget talstöd för detta språk

Batteridrift vid strömavbrott

Om strömmen bryts fortsätter enheten att fungera på batteri i några timmar, så att hjälpmedlet ändå kan fortsätta användas. Enheten visar batteristatus och stängs av på ett säkert sätt vid behov.

OBS! Detta är en mjukvaruändring och har inget med själva batteriet att göra.

Steg 1: Meddelande om strömavbrott




- Om strömförsörjningen bryts växlar enheten automatiskt över till batteridrift
- Ett meddelande visas en kort stund

Steg 2: Energisparläge



- Skärmens ljusstyrka sänks till lägsta nivå för att maximera batteritiden (minst 4 timmar)
- En batteriikon längst upp till höger visar aktuell batterinivå

Steg 3: Säker avstängning

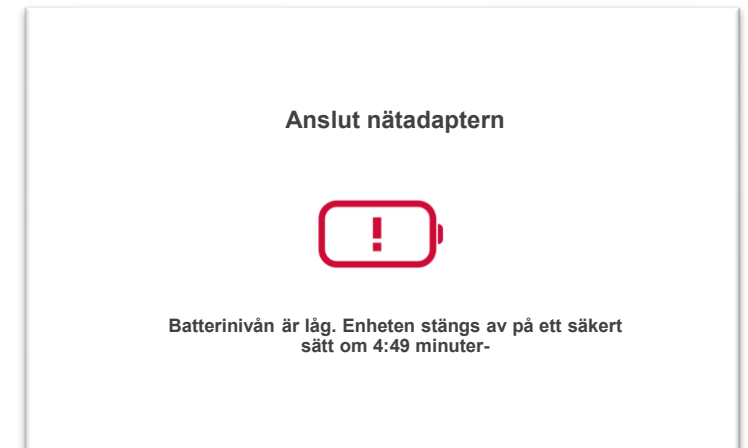

- När batterinivån når 20% visas meddelandet "Anslut nätadaptern"
- Efter en nedräkning på 5 minuter stängs enheten av på ett säkert sätt
- Enheten startar automatiskt igen när strömmen kommer tillbaka

Ny funktionalitet i CARY Messenger / Mobile

Även den portabla enheten CARY Mobile får motsvarande ny funktionalitet som CARY Base:

1. Möjligt att klarmarkera aktiviteter


- Kvittera aktiviteten när den är klar
- Se klarmarkerade aktiviteter i dagsplanen

2. Möjligt att använda kvinnlig röst för talstöd


- Välj önskad röst i CARY Base
- Den valda rösten överförs automatiskt till CARY Mobile

OBS: CARY Mobile uppdateras automatiskt till senaste version när enheten är ansluten till internet.

Klarmarkera aktivitet

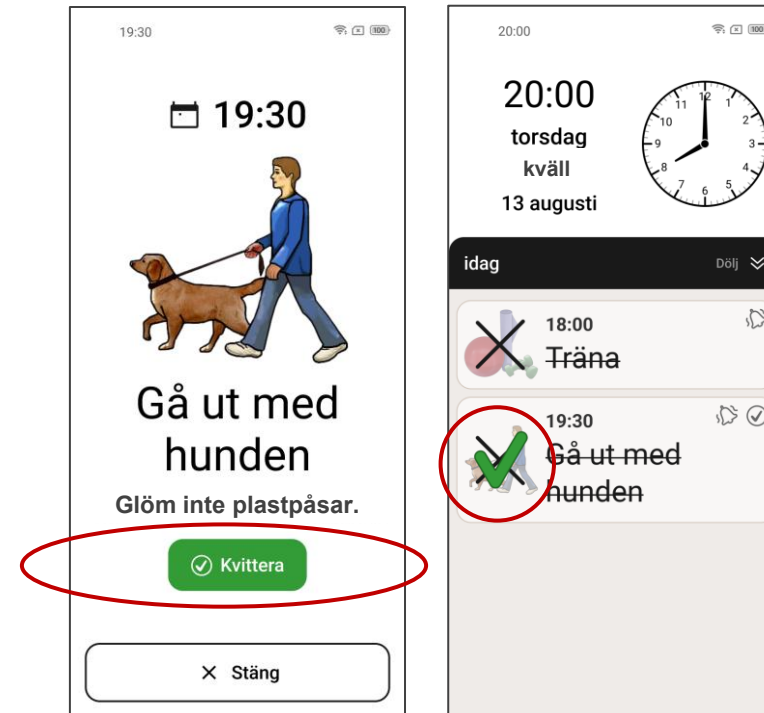

Kvinnlig röst för talstöd

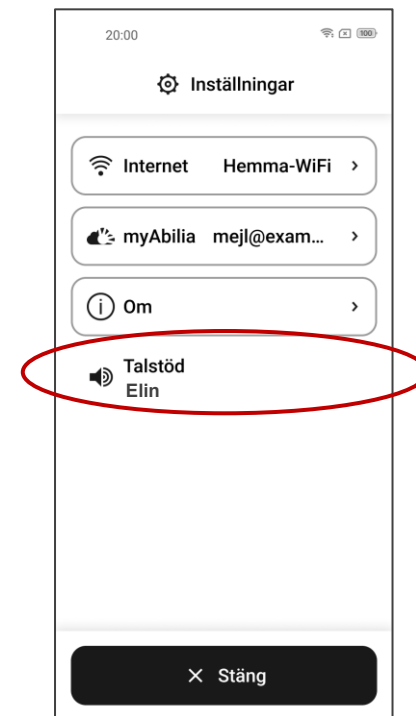


Uppdatera CARY Base

För att uppdatera CARY behöver enheten vara ansluten till internet.

Gå till **På/Av-menyn**, välj **Inställningar** och **Om**.

Tryck på knappen "Sök efter uppdateringar" och följ instruktionerna.

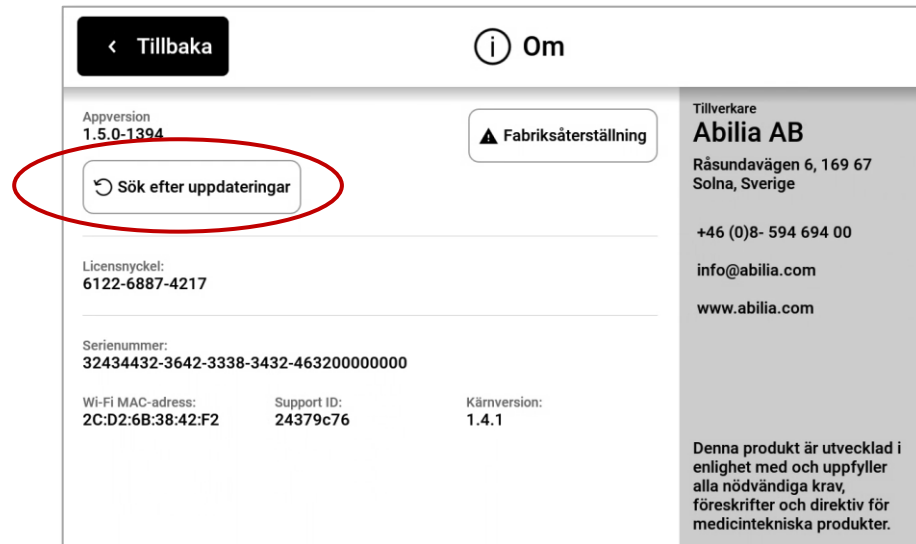

**Rätt hjälpmedel i rätt tid
kan göra verklig skillnad**



Abilia AB | www.abilia.se | info@abilia.se | 08-594 694 00