

Augusti 2026

Ny programversion till CARY-serien

Vi vill informera om en kommande uppdatering av programvaran i CARY-serien.

Artiklarna *508900 CARY Base*, *508910 CARY Base Solo* och *508950 CARY Messenger* kommer från och med 1 september att levereras med programversion 1.5. Denna version finns då även tillgänglig för nedladdning direkt i produkten.

Nyheter i programversion 1.5

Vi har lyssnat på feedback från kunder och användare och har nu förbättrat funktionaliteten inom följande områden:

- **Möjlighet att klarmarkera aktiviteter.** Nu är det möjligt att göra aktiviteter kvitterbara och därmed också att klarmarkera dem. Klarmarkeringen visas tydligt både på enheten och i webbtjänsten myAbilia*.
- **Möjlighet att använda kvinnlig** röst för talstöd.** Det är nu möjligt att välja en kvinnlig röst, vilket för vissa användare kan bidra till en mer trygg användarupplevelse.
- **Batteridrift vid strömavbrott.** Om strömmen försvinner fungerar nu enheten på batteri i några timmar så att hjälpmedlet kan fortsätta användas trots strömavbrott. Batteristatus visas på skärmen, och enheten stängs av på ett säkert sätt vid behov.



* myAbilia finns endast tillgängligt för CARY Base och CARY Messenger, inte CARY Base Solo

** Kvinnlig röst finns tillgänglig på svenska, norska, danska, finska, samiska, brittisk engelska, tyska, nederländska, flamländska, franska, spanska, italienska, tjeckiska, polska, arabiska, turkiska, ryska, australisk engelska och färöiska.

CARY Base, CARY Base Solo och CARY Messenger levereras med uppdaterade bruksanvisningar, men för övrigt med samma innehåll som tidigare. Senaste version av bruksanvisningarna kan laddas ned från Abilias Dokumentcenter, och version 1.5 blir tillgänglig i samband med leveransstart 1 september.

Uppdatering av programvaran i CARY

För att uppdatera en redan levererad CARY Base behöver enheten vara ansluten till internet.

Gå till **På/Av-menyn**, välj **Inställningar** och **Om**. Tryck på knappen "Sök efter uppdateringar" och följ instruktionerna.

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig