

# BRUKSANVISNING

för

**Timer**

Artikelnr: 320 861




Version februari 2008

## Vad är Timer?

Timer används för att larma under förvalda tider. Personal eller anhöriga behöver då inte glömma bort att slå på eller stänga av larmet.

Timer har en ingång och en utgång, kontakten bryts mellan dessa vid aktivering av sensor.

Aktiveringen måste vara via en kabelöverföring mellan sensor och larmmottagare.

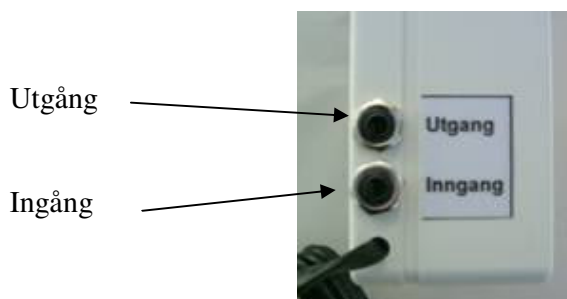

## Programmering

Timern levereras med klockans tid inprogrammerad.

Programmering sker stegvis. Positionen som blinkar ändras med knapp **◆**. Man väljer nästa position med knapp **OK** eller föregående position med knapp **◀**.

Programmeringen är färdig när ingen av positionerna blinkar.



- ◆ Ändra
- ◀ Tillbaka
- Nollställ

Meny: Välj funktion (AUTO, PR, ?, klocka & S/W)

## Datum

Tryck knapp **●**, DATE och en blinkande 0 visas. Tryck knapp **◆** och välj 1. siffra för dag. Tryck knapp **OK** och välj en andra siffra för dag. Tryck knapp **OK** och välj en siffra för månad (0 eller 1), tryck knapp **OK** och välj en andra siffra för månad. Använd knapp **OK** och knapp **◆** och välj år.

## Klocka

Tryck knapp **◆** och välj första siffran i timmar, tryck knapp **OK** och knapp **◆** välj andra siffran i timmar.

Tryck knapp **OK** och knapp **◆** och välj första siffran i minuter, tryck knapp **OK** och knapp **◆** och välj andra siffran i minuter. Klockan visas nu i displayen.

Ex. 21:00.

### **Inkopplingstid**

Tryck knapp MENU och knapp ●, displayen flyttar sig til PR, tryck knapp OK, Nu kommer det en rad tal från 1 til 7 med ■ under.

Talen 1-7 är veckodagarna från måndag till söndag. (1 = måndag o.s.v.).

När veckodagen i displayen har symbolen ■ under är denna dag vald. Använd ♦ knappen och välj om dagen ska vara aktuell eller inte. Tryck knapp OK för att flytta till nästa dag. När man väljer dag 7 med OK-knappen kommer klockan att blinka.

Nu ska man lägga in avstängning av klockan vid inkoppling av larm. Tiden läggs in på samma sätt som beskrivet i avsnittet under **klockan**. När avstängning av klockan är inlagd, kommer A-- upp i displayen, tryck knapp ♦ och välj funktion ON och tryck knapp OK.

Nu är programmeringen för inkopplingstidspunkten färdig, och nu blinkar dagarna på nytt.

### **Urkopplingstid**

Då är det klart för att lägga in urkopplingstidspunkten. Välj samma dagar som för inkoppling, kontrollera att symbolen ■ är under samma dagar som vid programmering av inkopplingstid. När man trycker OK vid dag 7 kommer klockan att blinka igen. Nu lägger man in urkopplingstidspunkten. När man trycker ok på sista siffran i avstängning av klockan kommer A-- upp i displayen. Här väljer man med knapp ♦ funktionen OFF, och trycker knapp OK. Dagarna 1-7 visas nu i botten av displayen igen.

När man har programmerat in inkoppling och urkoppling är man färdig. Tryck då fram MENU med knapp ●, i displayen står *over auto*.

I plasten över displayen finns en tidsskala från kl 0 till 24.

Symbolen ■ kommer fram överst i displayen, som visar vilka larm som är inlagda. Till exempel från kl 22:00 på kvällen, till 08:00 på morgonen.

OBS: Denna rad med tecken i överkant av displayen, försvinner när mer än två programmeringar är inlagda. Se rubrik **Kontroll av inlagda programmeringar** om fler än två programmeringar är inlagda.

### **Kontroll av inlagda programmeringar**

Det är möjligt att lägga in upp till 30 programmeringar.

Genom att trycka menu tills ● står över ? och sedan knapp OK, kommer antal lediga programmeringar visas. Har man lagt in en inkopplingstidspunkt och en utkopplingstidspunkt kommer talet 28 visas i displayen.

Genom att trycka knapp ◀ kan man bläddra igenom detaljerna för de programmeringar som är inlagda.


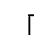
### **Ta bort en programmering**

Genom att trycka menu tills ● står över ? och sedan trycka knapp OK, kommer antalet lediga programmeringar att visas. Genom att trycka in knapp ◀ kan man bläddra igenom detaljerna för de programmeringar som är inlagda. För att ta bort en enkel

programmering, tryck CL när detaljerna för den gällande programmeringen visas i displayen. Antal lediga programmeringar är ökade med en, till 29, om det låg två programmeringar innan en larmtid togs bort.

### **Manuell styrning av inkoppling och urkoppling**

Om man vill använda larmen utanför inprogrammerade tider:

Tryck in knappen **◆** (A, AUTO). Då hör man reläet klicka till när man trycker på knappen. Vid A i displayen ändrar signaltypen från (av)  till (på) 

## **Säkerhet**

Falck Igel har genomfört riskanalys för produkten med hänvisning till NS-EN 1441 för Medicinsk utrustning.

Vid drifttagning och daglig användning av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. Det är inte möjligt att beskriva alla sätt man kan använda produkten på i en bruksanvisning. Råder det någon tveksamhet om man har satt i gång eller ställt in produkten korrekt, ska leverantören kontaktas.

Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följdskador eller förlorade produkter som följer av användande, fel användande, ej aktiv uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Falck Igel AB:s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.

## **Felsökning**

Är man osäker på om signalen kommer igenom Timern, så kan man manuellt koppla in larmet genom att trycka på knapp **◆**.

Om man är osäker på om tiderna som är inlagda är rätt, så kan man kontrollera dem. Se rubrik ***Kontroll av inlagda programmeringar.***

## **Underhåll**

Hjälpmedlet kan rengöras med en trasa lätt fuktad i varmt tvålsvatten, men ska ej sänkas ned i vatten.

Produkten ska testas med jämna mellanrum oberoende av säkerhetsgraden som tillsträvas.

---

*Det är inte tillåtet att kopiera  
bruksanvisningen utan skriftlig  
tillåtelse från Falck Igel AB.*

**Vid frågor eller service av  
hjälpmedlet ring till Falck Igel på  
telefon 08 695 69 40**

---

### **Falck Igel AB**

Liljeholmsvägen 30B  
S-117 61 Stockholm  
Tel.: 08 695 6940  
Fax: 08 695 6949

### **Falck Igel AS, Norge**

Buvikveien 22  
Postboks 123,  
N-4952 Risør  
Tlf: +47 37 14 94 50  
Telefax: +47 37 14 94 70

**E-post:** [falckigel@falckigel.se](mailto:falckigel@falckigel.se)  
**Hemsida:** [www.falckigel.se](http://www.falckigel.se)

---