



GEWA Andromeda BED

Självständighet, integritet och säkerhet

Art.nr: 419893

GEWA Andromeda BED sängmottagare ökar din självständighet i att kunna ändra läge i sängen. Tillsammans med en motordriven säng och trådlös sändare kan du t.ex. ändra huvudändans höjd. Du kan styra sängen på olika sätt, exempelvis genom att trycka direkt på en knapp eller att använda en sug- och blåskontakt.

Sängmottagaren kan styra två funktioner samtidigt. Detta möjliggör en stabil och bekväm kontroll med en mjuk positionering.

Vald sängrörelse styrs bara så länge sändarens knapp hålls nertryckt. Rörelsen stannar dessutom av efter några sekunder, för ökad säkerhet och undvikande av för stora sängrörelser.



ABILIA

GEWA Andromeda BED är en IR-mottagare med vilken det är möjligt att styra funktionerna hos en motordriven säng trådlöst, via en GEWA IR-sändare. Mottagaren har 8 reläutgångar som kan styra upp till 8 funktioner i en säng: huvudändan, fotändan, knädel och hela sängen uppåt/nedåt.

FUNKTIONER

GEWA Andromeda BED kan kontrollera två funktioner samtidigt, vilket ger möjlighet till individuell anpassning av rörelsemönster.


Produkten har hög säkerhet tack vare att vald sängrörelse bara styrs så länge sändarens knapp hålls nedtryckt, en så kallad monostabil funktion.

För att förhindra ofrivillig sängrörelse, stannar rörelsen efter 3 sek. Reläets aktiveringstid kan dessutom ställas ner till 1,5 sek.

GEWA Andromeda BED har en mycket känslig IR-mottagare, vilket innebär att mottagaren kan placeras under sängen och ändå leverera en hög funktionssäkerhet. Om mottagaren inte kan monteras med fri sikt går det att ansluta en extern detektor.

Mottagaren levereras förprogrammerad med färdiga kablage för omedelbar användning, vilket gör den enkel att installera. Det är även möjligt att byta kablage om du byter sängmodell.

GEWA Andromeda BED är en egenutvecklad produkt och CE-märkt enligt Medicintekniska direktivet 93/42/EEC.

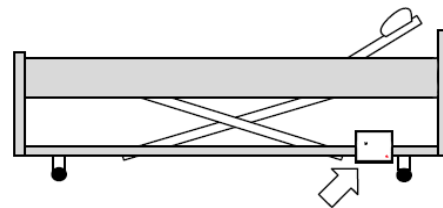

TEKNISK INFORMATION

Storlek: 151 mm x 125 mm x 60 mm

Drivspänning: 12-24 V DC

Effektförbrukning i vila: 0, 15 W

Effektförbrukning, max: 1,6 W

Max belastning per relä: 200 mA/30 V AC, 350 mA/60 V DC

Kapslingsklass: IP 54



Art.nr:419892

PRODUKT

GEWA Andromeda IR-REC8 BED (LINAK 10 PIN MODULAR)

GEWA Andromeda IR-REC8 BED (LINAK 8 PIN DIN)

TILLBEHÖR

Andromeda IR-DET 3

ART.NR BESKRIVNING

419892 Komplet med monterat kablage + AC-Adapter

419893 Komplet med monterat kablage + AC-Adapter

419860

Extern detektor med 3 meter kabel