

Kari StyringsBoks

gir kontroll over en av/på bryter

KARI STYRINGSBOKS



Kari StyringsBoks og en valgfri bryter gir deg muligheten til å betjene en lampe, en kjøkkenmaskin eller en batteridrevet gjenstand.

Du kan også slå av og på din TV, iPod, DVD- spiller, CD- spiller og leke med IR- styrte leker

Det er lett å lykkes med Kari StyringsBoks!



ABILIA

Eksempler på muligheter du har med Kari StyringsBoks og en bryter

- Slå på din TV, CD, DVD-spiller eller en lampe (AV/PÅ)
- Få f.eks. en vifte til å blåse så lenge bryteren holdes nede (HOLD)
- La kjøkkenmaskinen gå en bestemt tid, f. eks til eggedosisen er klar (TID)
- Slå på lyset selv om du skjelver på hånden (AV/PÅ + Tid)
- Innstille trykktid, for å trykke bevisst (TRYKK + Tid)
- Slå av/på IR betjent utstyr. Funksjonen læres fra andre fjernkontroller
- Du kan låse den valgte funksjonen, for å øke sikkerheten
- Kari StyringsBoks er lett å stille inn

Tilbehør

Falck 5725 Fjernbetjening, sender (i bryter)/mottaker		520002
Falck 5701 Lydbryter	HMS: 085379	621500
Jelly Beamer, trådløs bryter	HMS: 144596	622022
Falck 6708 Duett	HMS: 027301	520001
Valgfri bryter (Kontakt Abilia)		div
Slim Armstrong Monteringsarm til brytere	HMS: 060516	621910
Universal Festestativ til brytere	HMS: 027330	621952
Monteringsplater		div
Snap bryterdeksel		621930/31
Ultrastik		621940/42
Batterileker, diverse med kabel		520020
Lekekabel for tilpasning av egne batterileker HMS: 061886		520013

Tekniske spesifikasjoner

Nett tilkobling:

- 230 VAC / 6A 50Hz

Bryterinngang:

- Hvilken som helst momentanbryter med Ø 3,5 mm Jack-plugg (mono)

Utganger:

- 230 Volt utgang
- Sikring: 6A (Maksimum belastning: 1320 Watt)
- Spenningsfri utgang for batteridrevne gjenstander (0 Volt, NO)
- IR- utgang med mulighet for 2 signaler

Indikatorlampe:

lyser grønt når utgangene er aktive

Mål: 16 x 10 x 4,5 cm -Vekt: 607 g

Funksjoner

På/Av • Hold • Trykk • Tid- tidsintervall fra 1 sek. til 1 time og 40 min • IR

Ver 1- 2010



Kari StyringsBoks gir et hav av muligheter



Slå på lyset



Betjene CD-spilleren



Leke med IR-styrte eller batterileker

