



Handi

För att livet ska funka



ABILIA



Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner.

Handi är till för dig som behöver hjälp med tid och planering. Kanske missar du viktiga saker för att du glömmer bort vad du ska göra eller för att du är upptagen med något annat. Kanske planerar du för mycket - eller för lite - för att du missbedömer tidsåtgången. Kanske tycker du det är svårt att använda en vanlig klocka eller är ansträngande att läsa. Om du känner igen dig i något av detta kan Handi hjälpa dig att göra livet lite enklare.

I den här broschyren kan du läsa mer om vad som ingår i Handi.



KALENDER

Med kalendern får du översikt över din dag, vecka och månad. Du får tydliga larm när aktiviteterna börjar och slutar. Du lägger in dina aktiviteter på ett förenklat sätt. Du kan använda bilder och få texten uppläst med talsyntes. Till aktiviteterna kan du koppla sådant som hör ihop med aktiviteten, t ex en handlista eller ett telefonnummer. På så vis får du informationen direkt när aktiviteten börjar istället för att behöva leta efter den.

Kalendern är centrum i Handi och hjälper dig att få ordning i ditt liv.

CHECKLISTA

Checklistor är för många ett sätt att strukturera och få överblick över vad man ska göra. De blir ett stöd för minnet och ökar kanske också självförtroendet och motivationen - det brukar ju kännas skönt att bocka av det man har utfört.


Att använda checklistor i Handi är enkelt och överskådligt. Du kan använda bilder från bildarkivet eller lägga in egna foton. Du kan få texten uppläst med talsyntes. Du kan koppla checklistorna direkt till aktiviteter i kalendern.



PRISRÄKNAREN

Ibland kan det vara svårt att hålla koll på pengarna när man är iväg och handlar. Prisräknaren visar tydligt vilka sedlar och mynt du kan använda, hur många av varje du behöver och räknar ut summan åt dig, direkt i affären. Du får svar på frågor som "Har jag tillräckligt med pengar med mig?" och "Hur mycket ska jag få tillbaka?"

En tydlig guide, talstöd, och bilder på valörerna gör det enkelt att använda Prisräknaren. Det går även att ändra till andra valutor vid exempelvis utlandsvistelse.

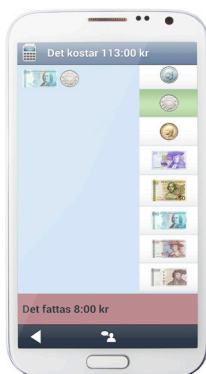



KRISPLAN

Krisplan är en trygghetsfunktion för den som riskerar att bli akut sjuk eller hamna i svåra situationer. Du får råd i stunden vad du ska göra och vem du ska kontakta.

Med Kris-SMS kan du skicka en kartlänk var du befinner dig så att det blir enklare att hitta till dig. Du kan ha olika krisplaner beroende på dag och tid, beroende på vilken hjälp som finns tillgänglig i din omgivning.

Krisplan ger en extra trygghet när du behöver hjälp.

FORMULÄR OCH FORMULÄRSVAR

Formulär är ett verktyg för självhjälp.

Kanske vill du kolla om du har stresssymptom och i så fall få råd om hur du kan minska stressen. Kanske vill du lära dig att äta regelbundet och blir motiverad av att se hur det går. Kanske vill du få hjälp att ta initiativ till fler sociala kontakter.


Med Formulär kan du då skapa dina egna frågeformulär och få ett anpassat beslutsstöd. I efterhand kan du titta på de svar som angetts i formulären genom Formulärsvar.



ÖVRIGA FUNKTIONER

I Handi finns många fler funktioner än de som beskrivits ovan. Tack vare det enkla Handi-gränssnittet känner du igen dig och kommer lättare igång.

- Inbyggd startskärm som skyddar och avgränsar så att du endast har tillgång till de appar du behöver. (Startmeny)
- Steg-för-steg instruktioner med bild, text och talstöd (Album)
- Minnesanteckningar genom att skriva eller tala in. (Anteckningar och Röstanteckningar)
- Musikspelare
- Telefon, SMS och MMS.

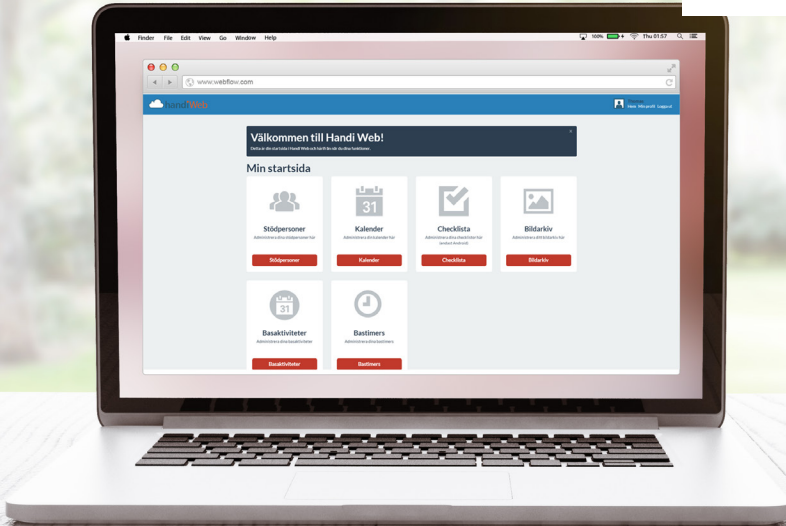

HANDI WEB

Handi Web är en webbtjänst till Handi som gör det möjligt att hantera Handi från datorn. Du kan göra det själv men också få hjälp från utvalda stödpersoner. Från Handi Web kan ni, tillsammans eller var och en för sig, hantera kalender, bilder och checklistor. Ni kan även göra mallar för aktiviteter och timers så att det blir ännu enklare och snabbare att lägga in dem direkt i Handi.

För att kunna synka mellan Handi-apparaten och Handi Web behövs internetanslutning. Det får du via ett bra mobilabonnemang och/eller wifi. Eftersom Handi Web är utvecklat med modern teknik behöver endast en liten mängd data synkroniseras, och då endast vid behov.

Handi fungerar fullt ut även om apparaten inte har internetanslutning.



PRODUKTER

PROGRAMVARA TILL ANDROID-TELEFONELLER SURFPLATTA

Handi5 SW är ett applikationspaket med Handi-funktioner, för installation i egen Android-telefon eller surfplatta.

Applikationspaketet innehåller samtliga Handi-funktioner plus bundlad talsyntes och tangentbord.

Efter installationen har du en komplett Handi med startmenyn som ett skyddande skal. Handi-funktionerna ger dig ett anpassat stöd, men du kan samtidigt komplettera med andra appar om du vill.

Demoversion kan beställas från Abilia.


PROGRAMVARA TILL IPHONE

HandiKalender för iOS är en kalender-applikation för installation i egen iPhone.



Efter installationen har du en lättanvänd kalender med ett avancerat tidsstöd och bundlad talsyntes. Kalendern ligger på din vanliga hemskärm tillsammans med andra appar.

HandiKalender bygger på Handi för Android men är anpassad för iOS.

Demoversion kan laddas hem från AppStore, men du behöver ett Handi Web-konto för att kunna logga in. Detta beställs från Abilia eller från din arbetsterapeut.

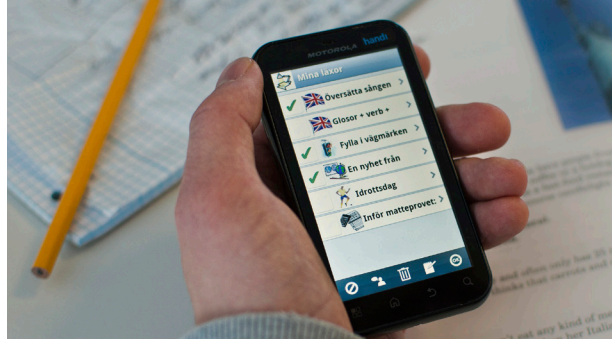

Föret var allt så rörigt, men nu har jag fått en Handi som ger mig bättre koll. ”

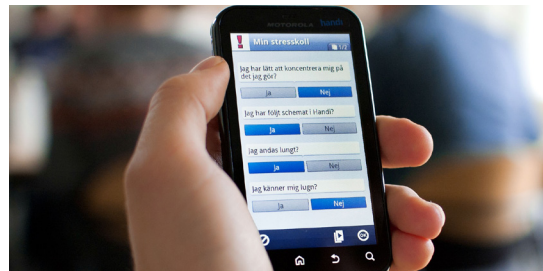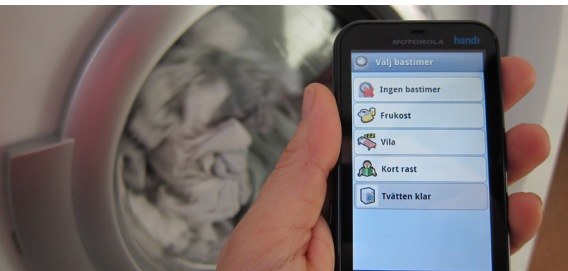

PAKETLÖSNINGAR MED PROGRAMVARA OCH ANDROID-BASERAD TELEFON

Vi säljer paketalösningar med Handi5 SW installerad på en Android-baserad telefon. På så vis får du direkt en komplett Handi med samtliga Handi-funktioner.

Handi Note 4 har störst skärm och bäst prestanda.

Handi Xcover 3 och Handi Defy+ är i stort sett likvärdiga. Båda har IP67-klass vilket bl a innebär att de är damm- och vattenresistenta. Handi Xcover 3 är större, har en större skärm och nyare Android-version.

HANDI HANDDATOR

Handi Socket och Handifon P är äldre modeller av handdatorer som enbart innehåller en äldre generation av Handi-programvaran. Det är inte möjligt att komplettera med andra appar. Modellerna skiljer sig genom att Handifon P har telefon- och kamerafunktion, vilket inte Handi Socket har.

Handdatorerna finns kvar i Handi-sortimentet för att kunna erbjuda till dig som av någon anledning inte kan använda eller få tillgång till de moderna Handi-produkterna.



OM OSS

I över 40 år har vi på Abilia strävat efter att utveckla och tillverka de bästa tekniska hjälpmedlen för personer med funktionsnedsättningar. Abilia bygger på en humanistisk grundtanke där våra grundare utgått från kundernas unika situation. Denna grundtanke genomsyrar Abilia än idag i vårt arbete för, och tillsammans med, våra kunder. Och idag är våra hjälpmedel en självklar del av många människors vardag.

VILL DU VETA MER?

Vi håller kurs, workshops och presentationer runt om i Sverige. På vår hemsida www.abilia.se kan du läsa mer. Här finner du också information om våra Handikurer med genomgång av Handi-produkterna, livevisning, brukarexempel, anpassningsmöjligheter och praktiska övningar.

Abilia finns på Facebook, www.facebook.com/AbiliaSverige

Kontakta oss på telefon: 08-594 694 00
eller e-post: info@abilia.se

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | info@abilia.se | www.abilia.se



ABILIA