



## Styrer både din fysiske og virtuelle verden

GEWA Connect

GEWA Connect hjelper deg med å styre dine fysiske omgivelser, som TV, lamper, vinduer og dører, eller enheter med z-wave, for eksempel en Andromeda Socket.

Den hjelper deg også med å holde kontakten med familie og venner, ettersom du også kan bruke GEWA Connect til å ringe, sende SMS og bruke Facebook og andre sosiale medier. Du kan lese de siste nyhetene på nettet, se på YouTube eller spille musikk ved å styre smarttelefonen din med GEWA Connect.

Dette gjør at du blir mer selvstendig og føler deg trygg både hjemme og på jobben.

Art.nr 461180



## STYRER DIN FYSISKE OG VIRTUELLE VERDEN


GEWA Connect forener din fysiske og virtuelle verden og gjør det enkelt å styre begge. Installer GEWA Connect på din egen enhet, så kan du umiddelbart begynne å kontrollere omgivelsene dine fra smart-telefonen eller nettbrettet.

## HVORDAN FUNGERER GEWA CONNECT?


Hjertet i systemet er Abilia Multibox, som kobles til enheten din via Bluetooth. GEWA Connect er installert på enheten og mottar kommandoer fra styrekontakten som er tilkoblet multiboksen. Fjernkommandoen sendes fra appen til IR- eller GEWA-radiosenderen i multiboksen for å styre dine fysiske omgivelser.



GEWA Connect punktskanning på et nettbrett

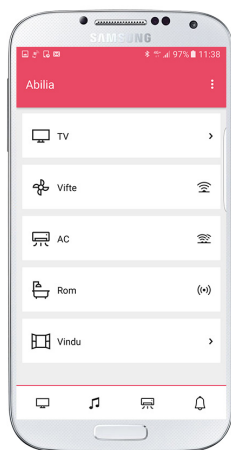

Listevisning

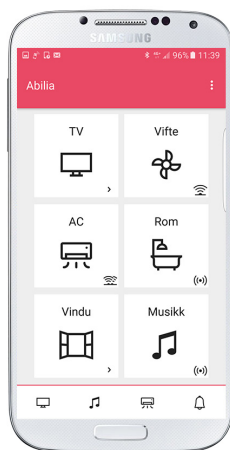

Rutenettvisning

Du kan velge å håndtere miljøet med enten listevisning eller rutenettvisning, avhengig av behovene dine.

Systemet styres med mekaniske kontakter, suge- og blåsekontakter eller den typen kontakt som passer best til dine behov.

Du kan enkelt veksle mellom listeskanning og punkt-skanning, avhengig av hvilken app og hvilken funksjon du bruker i øyeblikket.

## INTEGRERT ALARMFUNKSJON GIR TRYGGHET

I GEWA Connect finnes det en integrert alarmfunksjon, slik at du raskt skal kunne påkalle hjelp ved behov. Alarmen sendes på den måten du selv har valgt. Funksjonen utføres i multiboksen, noe som betyr at alarmen kan sendes selv om telefonen din er avslått.

## TA MED DEG GEWA CONNECT NÅR DU REISER

Du kan ta med deg GEWA Connect når du er på reisefot. Det er mulig å definere kommandoen for de omgivelsene du vanligvis beveger deg i utenfor hjemmet.

## ENKEL OG SIKKER DATAHÅNDTERING

Takket være nettjenesten myAbilia kan du håndtere innstillinger og konfigurasjon via en datamaskin, og alt lagres på et sikkert sted på Internett. Hvis du skulle miste telefonen av en eller annen grunn, er det derfor lett å laste ned informasjonen fra myAbilia til den nye smarttelefonen eller det nye nettbrettet.

| PRODUKT      | ART NR. | TEKNISK INFORMASJON |                   | LEVERES MED            |
|--------------|---------|---------------------|-------------------|------------------------|
| GEWA Connect | 461180  | Ingang              | 3.5 mm jack       | - Multibox inkl. lader |
|              |         | Transmit metod      | IR and GEWA Radio | - Håndbok              |
|              |         | Vekt                | 153 g             | - Lisensbevis          |
|              |         | Mål i mm (HxBxD)    | 108 x 67 x 22     | - Anbefalinger         |