

# Varsling overalt


## EpiMobile

EpiMobile er applikasjon på mobiltelefon som varsler ved epileptisk anfall.

EpiMobile registrerer og varsler anfall ved kramper som en følge av generaliserte tonisk/kloniske epileptiske anfall. Hvis du får et anfall varsles dine bistandspersoner via mobilen med oppringing og SMS, og sender GPS – koordinater på hvor personen befinner seg.

Med EpiMobile kan du føle deg trygg selv om du er alene og ikke er omgitt av andre mennesker, uansett hvor du er.

ART NR: 464240 | HMS NR: 214717

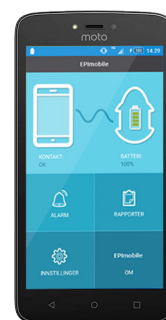

**ABILIA**

## EPI MOBILE

Alarmen består av et armbånd med innebygd sensor og et oppladbart batteri, og en mobiltelefon med EpiMobile installert.

Sensoren måler armens bevegelse i tre dimensjoner og beregner om bevegelsen er av epileptisk karakter eller om det er vanlige bevegelser.

Sensoren og applikasjonen kommuniserer fortløpende med hverandre via Bluetooth. Alarm signaler sendes fra sensoren til applikasjonen i smarttelefonen, som videregir alarm til bistandsperson ved anfall.




EpiMobile kan videregir alarm til bistandsperson via mobiltelefon, både som oppringing og SMS.

## ALLTID SIKKER

EpiMobiles primære formål er å få deg til å føle deg sikker, uansett hvor du er. Det er lagt stor vekt på sikkerhet. Hvis ikke bistandsperson 1 bekrefter mottatt alarm, sendes en SMS til bistandsperson 2.

Sensoren får strøm fra et oppladbart batteri. Batteriet må lades 1 gang i døgnet.

Du kan selv stille inn hvordan applikasjonen skal kommunisere, når den skal sende SMS, og hvis den skal vise din eksakte posisjon. Smarttelefonens innebygde GPS kan brukes for å lokalisere deg hvis et anfall skjer utendørs.

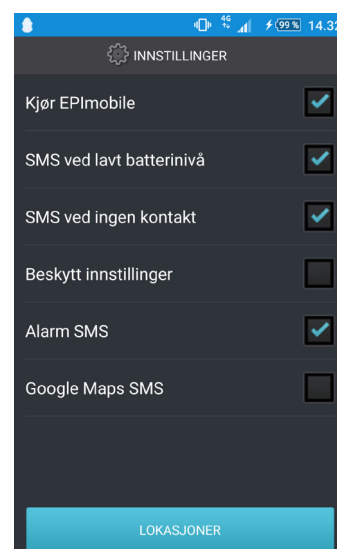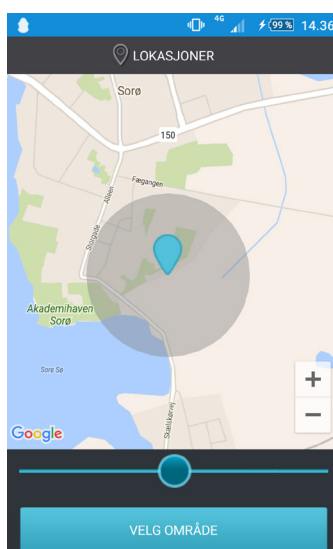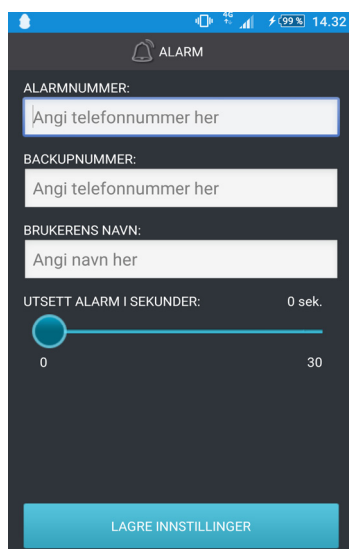

### TEKNISK INFORMASJON TELEFON

Operativsystem: Android 7,0  
Mål: 144 x 72 x 10 mml  
Vekt: 162 g  
Minne: 16 GB

### TEKNISK INFORMASJON SENSOR

Lader: 900mA, 5V DC  
Innebygd batteri: 4,2V litium polymer  
IPklassifisering: IP 32

