


Få översikt på din dag

MEMOdayplanner 3

Upplever du att vardagen blir rörig och det är svårt att hålla reda på tiden, vad du ska göra och hur lång tid det tar?

Då kan du använda MEMOdayplanner, en lättanvänd planeringstavla som konkret visar tiden och ger dig en tydlig översikt av dygnet. Med hjälp av en ljuspelare där en ljuspunkt släcks för varje kvart, eller en ljuspunkt som förflyttar sig nedåt, kan du enkelt se hur långtgången dagen är. Du kan också se vilken aktivitet som kommer närmast, hur lång tid den tar, hur lång tid det är tills nästa aktivitet och vilka kommande inplanerade aktiviteter du har senare under dagen.

Studier visar att en bra struktur och översikt på dagen ger dig mer kontroll och minskar stressen både för dig och dina anhöriga. Du får ökat självförtroende att själv planera och hantera din dag.

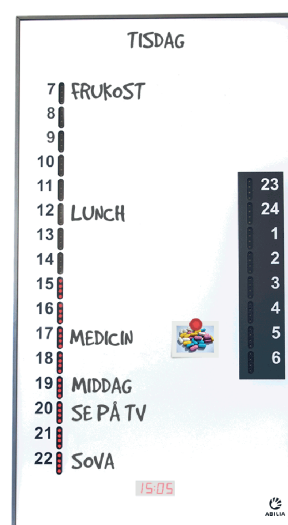


ABILIA

HANTERA DIN TID OCH DINA DAGLIGA AKTIVITETER

MEMOdayplaner är en magnetisk whiteboardtavla som tydligt visar tiden samt dina inplanerade aktiviteter under dygnet.

Tavlan består av två tidpelare där de olika färgerna gör det lätt för dig att se om det är dag eller natt och en röd ljuspunkt. Med hjälp av ljuspunkten kan du se vilken tid det är och när på dygnet det är. Du kan själv välja om du vill att ljuspunkten släcks för varje kvart eller att ljuspunkten förflyttar sig nedåt på tavlan beroende på vad som är enklast för dig att använda.

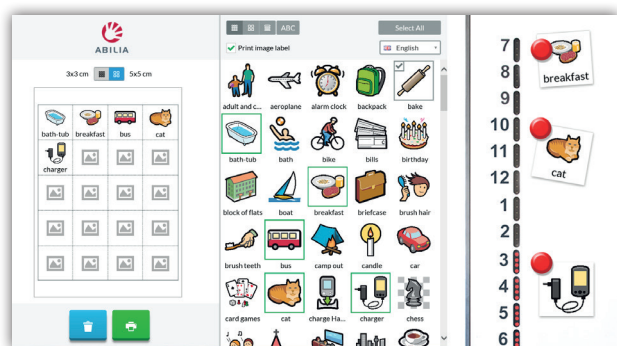

ANPASSA EFTER DINA BEHOV

Du väljer själv hur dina aktiviteter ska visas genom att skriva egen text direkt på whiteboardtavlan och använda magneter med bilder eller symboler.

På webben finns det extra Abilia print symboler och bilder som du kan ladda ned gratis, printa ut och fästa på magneterna.

Du kan också ändra ljusstyrkan på ljuspunkterna för att passa ljusförhållandena i ditt hem.

BLI PÅMIND OCH KOM IHÅG

För att bli påmind om när någon viktig aktivitet börjar eller vid en önskad tidpunkt kan du ställa in ett larm i form av ljudsignal och/eller blinkande ljuspunkt, t.ex. när det är dags att ta din medicin eller din favoritserie på TV börjar.

TVÅ VERSIONER

MEMOdayplaner 3 finns i två versioner; 12- eller 24-timmarsvisning.

Tavlan levereras med nätadapter, tre whiteboardpennor och en microfibrduk.

ANVÄNDARVÄNLIG

MEMOdayplaner är en fristående enhet. Genom att koppla in tavlan i vägguttaget är den redo för att användas. Du kan skriva direkt på tavlan och använda magneter med text, bilder och symboler.

PLACERAS DÄR DEN SYNS

Du kan placera MEMOdayplaner på väggen i ditt hem eller på ett bord där den syns bra och du har full översikt.



TEKNISK	INFORMATION	PRODUKT	ART NR	TILLBEHÖR	ART NR
Storlek	713 x 392 x 32 mm	MEMOdayplaner 3 - 12-timmarsversion	508780	Magnetbånd 12-timmar	508789
Vikt	4,1 kg	MEMOdayplaner 3 - 24-timmarsversion	508781	Magnetbånd 24-timmar	508788
Strömförsörjning	9 V DC, 1A			Bordsstativ	508794
				Pennhållare	508795
				Låsbar dörr	508796
				Anpassningsmaterial	508785

