

Rekonditionering All in One Basic

Art.nr 330700



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Viktig information.....	3
2 Medföljande delar	3
3. Rekonditioneringsförfarande.....	3
3.1 Funktionskontroll	3
3.2 Rengöring.....	3
4. Produktöversikt.....	4
4.1 Översikt All in One Basic Sändare	4
4.2 Översikt All in One Mottagare.....	4
4.3 Översikt All in One Laddare	5
7. Tillbehör och Reservdelar.....	5

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se *bruksanvisningen*.

1.1 Viktig information

Använd enbart uppladdningsbara NiMH-batterier i Pagern och All in One Basic Sändare. Om Sändaren inte har någon extern strömförsörjning ansluten ska enbart Alkaliska AAA-batterier användas.

2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 4. *Tillbehör och Reservdelar*.

Följande delar ingår i 330700 All in One Basic:

Art.nr	Benämning	Beskrivning
330702	Sändare	All in One Basic Sändare
330703	Pager	All in One Mottagare inkl. laddare
330715	Laddställ Pager	All in One Laddställ
330716	Laddare	All in One Laddare till Sändare

3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

3.1 Funktionskontroll

Montera 4 st nya uppladdningsbara NiMH AAA-batterier i All in One Basic Sändare, samt anslut extern laddare. Kontrollera att grön lampa blinkar regelbundet. Äldre versioner av All in One Basic Sändare som inte använder extern laddare innehåller Alkaline AAA-batterier

Anslut laddstället till ett vägguttag, montera ett nytt uppladdningsbart NiMH batteri i All in One Pager och anslut den till laddstället.

Kontrollera att båda gröna lamporna lyser.


Tryck in den vita knappen som sitter på vänster sida av All in One Basic Sändare, Pagern ska nu pipa och den röda dioden ska lysa. Om inte, kontrollera att Pagern är påslagen.

3.2 Rengöring


Rengör de olika delarna med en lätt fuktad trasa innehållande lite diskmedel samt bakteriedödande medel, typ alkogel.

4. Produktöversikt


4.1 Översikt All in One Basic Sändare

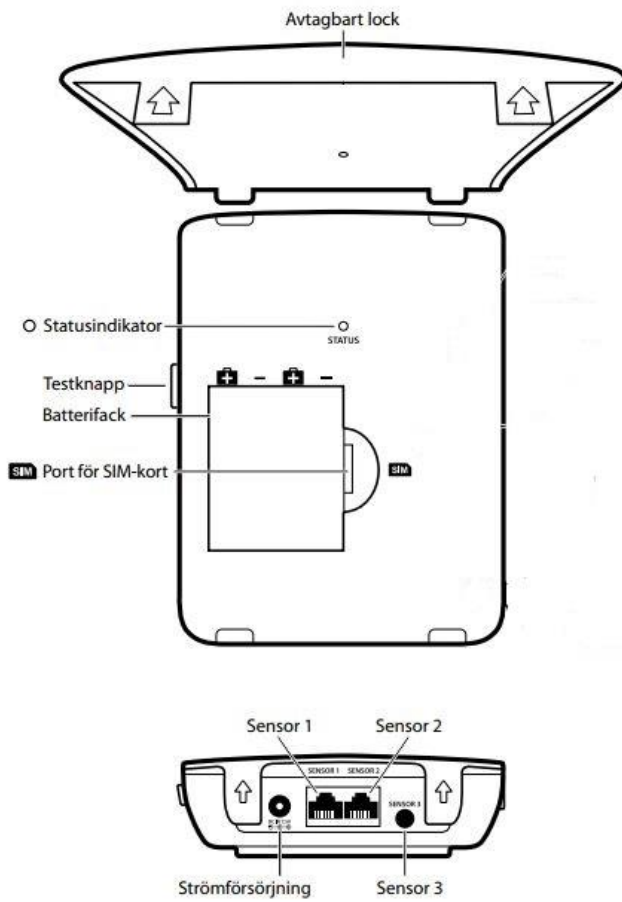

4.2 Översikt All in One Mottagare

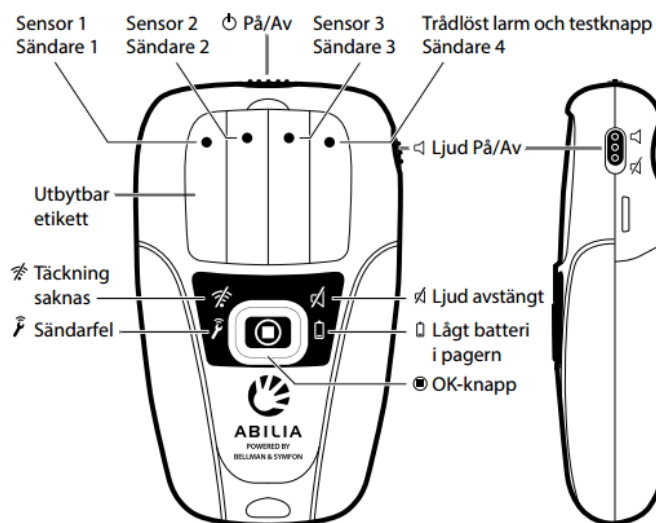

4.3 Översikt All in One Laddare

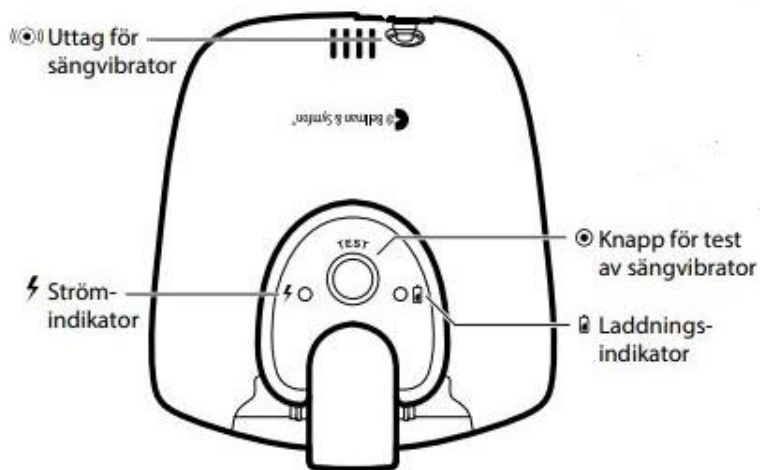

4. Tillbehör och Reservdelar

Art.nr	Benämning	Beskrivning
330702	Sändare	All in One Basic Sändare
330703	Pager	All in One Mottagare inkl. laddare
330715	Laddställ Pager	All in One Laddställ
330716	Laddare	All in One Laddare till Sändare
330717	Pager	All in One Mottagare utan laddare
330720	Vibrator	All in One - Vibrator extern

För fler tillbehör, se www.abilia.se.

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

