

# Rekonditionering All in One

Art.nr 330701



## Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Viktig information.....	3
2 Medföljande delar .....	3
3. Rekonditioneringsförfarande.....	3
3.1 Funktionskontroll .....	3
3.2 Rengöring.....	3
3.3 Återställning All in One GSM-funktion .....	4
4. Produktöversikt.....	4
4.1 Översikt All in One Sändare .....	4
4.2 Översikt All in One Mottagare.....	5
4.3 Översikt All in One Laddare .....	5
7. Tillbehör och Reservdelar .....	5

## 1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se *bruksanvisningen*.

### 1.1 Viktig information

All in One Sändare kan innehålla information som måste raderas. Se kapitel 3.3 Återställning All in One GSM-funktion.

Använd enbart uppladdningsbara NiMH-batterier i Pagern och All in One Sändare.

## 2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 4. *Tillbehör och Reservdelar*.

Följande delar ingår i 330701 All in One:

Art.nr	Benämning	Beskrivning
330718	Sändare	All in One Sändare
330703	Pager	All in One Mottagare inkl. laddare
330715	Laddställ Pager	All in One Laddställ
330716	Laddare	All in One Laddare till Sändare

## 3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

### 3.1 Funktionskontroll

Montera 4 st nya uppladdningsbara NiMH AAA-batterier i All in One Sändare, samt anslut extern laddare. Kontrollera att grön lampa blinkar regelbundet.

Anslut laddstället till ett vägguttag, montera ett nytt uppladdningsbart NiMH batteri i All in One Pager och anslut den till laddstället.

Kontrollera att båda gröna lamporna lyser.

Tryck in den vita knappen som sitter på vänster sida av All in One Sändare, Pagern ska nu pipa och den röda dioden ska lysa. Om inte, kontrollera att Pagern är påslagen.

Ta bort anslutna trådlösa enheter: Tryck in den vita testknappen på vänster sida och håll den intryckt tills den blåa lampa börjar blinka. Tryck sedan in testknappen 3 gånger i snabb följd, lampan ska nu blinka grönt 2 gånger. Tidigare anslutna trådlösa enheter är nu raderade.

### 3.2 Rengöring

Rengör de olika delarna med en lätt fuktad trasa innehållande lite diskmedel samt bakteriedödande medel, typ alkogel.

### 3.3 Återställning All in One GSM-funktion


För att återställa All in One GSM-funktion ska i till en ny brukare är det viktigt att se till att ingen personlig information finns kvar.

Installera ett SIM-kort i sändaren. Skicka ett SMS med text DELETE till Sändaren.


Informationen ska nu vara raderad.

## 4. Produktöversikt


### 4.1 Översikt All in One Sändare

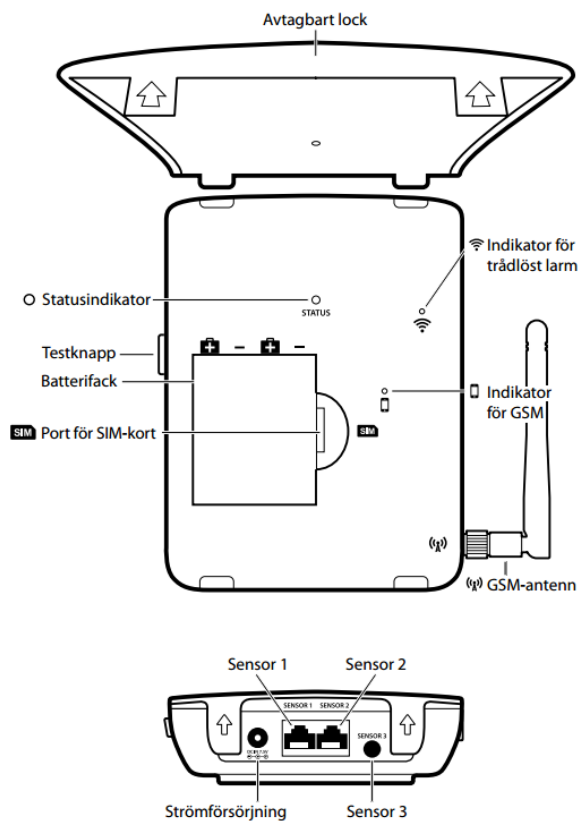

## 4.2 Översikt All in One Mottagare

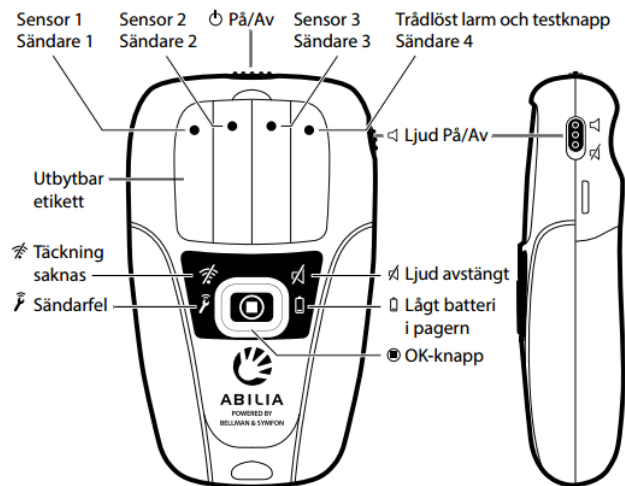

## 4.3 Översikt All in One Laddare

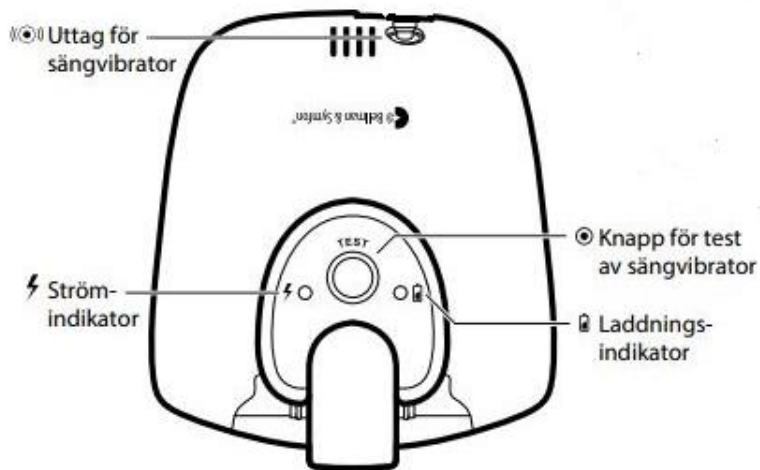

## 4. Tillbehör och Reservdelar

Art.nr	Benämning	Beskrivning
330718	Sändare	All in One Sändare
330703	Pager	All in One Mottagare inkl. laddare
330715	Laddställ Pager	All in One Laddställ
330716	Laddare	All in One Laddare till Sändare
330717	Pager	All in One Mottagare utan laddare
330720	Vibrator	All in One - Vibrator extern

För fler tillbehör, se [www.abilia.se](http://www.abilia.se).

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden  
Phone +46 (0)8-594 694 00 | [info@abilia.se](mailto:info@abilia.se) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway  
Phone +47 23 28 94 00 | [info@abilia.no](mailto:info@abilia.no) | [www.abilia.no](http://www.abilia.no)

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingway Business Park, Swavesey,  
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom  
Phone +44 (0)1954 281210 | [info@abilia.uk](mailto:info@abilia.uk) | [www.abilia.uk](http://www.abilia.uk)

