

Rekonditionering Control Prog

Art.nr 425700



Programversion 1.0.5

Innehållsförteckning

| | |
|---|---|
| 1. Inledning..... | 3 |
| 1.1 Verktyg för testning av Control Prog..... | 3 |
| 2. Medföljande delar | 3 |
| 3. Apparatöversikt..... | 4 |
| 4. Rekonditioneringsförfarande..... | 5 |
| 4.1 Funktionskontroll | 5 |
| 4.2 Test av reläutgång..... | 5 |
| 4.3 Test av scanning | 5 |
| 5. Rengöring..... | 6 |
| 6. Återställning..... | 6 |
| 7. Reservdelar | 6 |

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Verktyg för testning av Control Prog

Control Prog

4st LR03 (AAA) batterier

Multimeter

IR-indikator (Art.nr 4075) eller mobilkamera

Kabel för reläutgång Control Prog (Art.nr 425730)

2. Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.

425700 Control Prog



429045 Gummiskydd



425720 Raster



Noteringsark



Manual

890410 Halsrem



3. Apparatöversikt




4. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Utför en återställning, står beskrivet i kapitel 6. *Återställning*. Se till att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Se separata avsnitt för detaljer.

4.1 Funktionskontroll

Fig 2

1. **IR:** Testa att alla 4 IR-dioder som sänder IR på ovankanten fungerar med indikator-kortet. Det går även att använda kameran på mobilen för att kontrollera IR-dioderna.
2. **IR inspelning:**
 - a. Kontrollera att båda sändarna har full kapacitet.
 - b. Lägg båda sändarna på ett bord med originalsändaren riktad mot den bakre gaveln på Control Prog (fig 2).
 - c. Tryck in Programmeringsknappen **P** och knapp 1 Samtidigt. Lampan på knapp 1 och aktuell nivå blinkar.
 - d. Tryck och släpp den knapp på Control Prog som ska läras in. Lampan på *Nivå*-knappen lyser nu med fast orange ljus.
 - e. Tryck och håll ner den knapp på originalsändaren som ska läras in i Control Prog. Släpp när lampan på *Nivå*-knappen lyser grönt. Det kan ta upp till 10 sekunder. Om lampan återgår till att lysa orange, trycker man ytterligare en eller flera gånger tills den blinkar grönt och slocknar. Om lampan blinkar rött har inläringen misslyckats.
3. **IR-uppspelning efter återställning:**
 - a. Tryck i tur och ordning på knapparna 1 till D. Kontrollera på IR-indikatorn att kanal 16 till 31 visas.

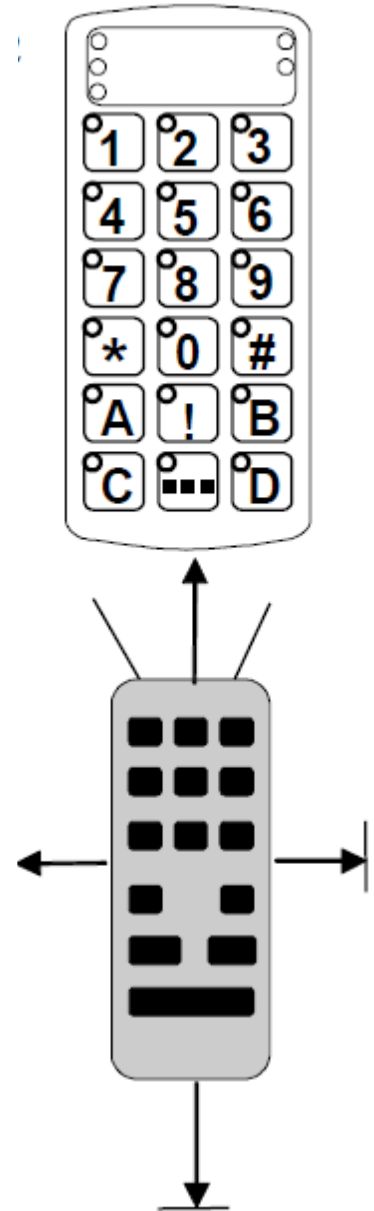

4.2 Test av reläutgång

Koppla in kabel för reläutgång (Art.nr 425730) till Control Prog i ingång SW1.

Tryck på **!** och kontrollera att en slutning sker på reläutgången. Gör likadant med SW2.

4.3 Test av scanning

Anslut en manöverkontakt till ingång SW1.

Kontrollera att Control Prog börjar scanna när man trycker på manöverkontakten.

Kontrollera att alla lysdioder fungerar och att det kommer en ljudsignal vid varje knapp som aktiveras.

5. Rengöring

Control Prog kan rengöras med en bomullstuss lätt fuktad med Alsolsprit, Klorhexidinsprit eller Etanol.

Alternativt kan Control Prog göras rent med en **mycket hårt urvriden trasa** som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa.

6. Återställning

1. Tryck på **P** och **3**. Lampan för knapp 3 och aktuell nivå lyser nu.
1. Tryck i tur och ordning på knapparna **!**, **1**, **2**, **3**, **---**. Lamporna för nivå 1-15 blinkar rött i tur och ordning och avslutas med att lampan för *Nivå*-knappen blinkar grönt för att visa att det är klart.

7. Reservdelar

| | |
|--------|------------------------------|
| 425720 | Raster Control Prog/18 |
| 425776 | Instickskort Control Prog/18 |
| 425778 | Överdel Control Prog, silver |
| 425780 | Batterilucka Control Prog |
| 425785 | Kretskort Control Prog |
| 886096 | Membran Control Prog/18 |
| 425790 | Gavel Control Prog |
| 890410 | Halsrem IR-sändare |
| 425714 | IR-dioder |
| 425770 | Underdel Control Prog |
| 425772 | IR-fönster Control sändare |

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

