

Rekonditionering Control 18

Art.nr 425718



Innehållsförteckning

1. Inledning	3
1.1 Verktyg för testning av Control 18	3
2. Medföljande delar	3
3. Apparatöversikt.....	3
4. Rekonditioneringsförfarande.....	4
4.1 Funktionskontroll	4
5. Rengöring	5
6. Återställning.....	5
7. Reservdelar	5

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Verktyg för testning av Control 18

Control 18

4st LR03 (AAA) batterier

Multimeter

IR-indikator (Art.nr 4075) eller mobilkamera

2. Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.

425718 Control 18



Noteringsark



425720 Raster



890410 Halsrem



Manual

3. Apparatöversikt

Indikeringslampor som visar olika nivåer

Nivå 1-5

Kod-knapp


Nivå-knapp/
Funktions-knapp



Funktions-knappar

0-9, *, #, A, B, C, D

Indikeringslampa vid programmering



Programmeringsknapp  (reset)

4. Rekonditioneringsförfarande


Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Utför en återställning, står beskrivet i kapitel 6. *Återställning*. Se till att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Se separata avsnitt för detaljer.

4.1 Funktionskontroll

Fig 2

1. **IR:** Testa att alla 4 IR-dioder som sänder IR på ovankanten fungerar med indikator-kortet. Det går även att använda kameran på mobilen för att kontrollera IR-dioderna.
2. **IR inspelning:**
 - a. Kontrollera att båda sändarna har full kapacitet.
 - b. Lägg båda sändarna på ett bord med originalsändaren riktad mot den bakre gaveln på Control 18 (fig 2).
 - c. Tryck in Programmeringsknappen  och knapp 1 Samtidigt. Lampan på knapp 1 och aktuell nivå blinkar.
 - d. Tryck och släpp den knapp på Control 18 som ska läras in. Lampan på nivåknappen lyser nu med fast orange ljus.
 - e. Tryck och håll ner den knapp på originalsändaren som ska läras in i Control 18. Släpp när lampan på nivåknappen lyser grönt. Det kan ta upp till 10 sekunder. Om lampan återgår till att lysa orange, trycker man ytterligare en eller flera gånger tills den blinkar grönt och slocknar. Avsluta med att trycka på .
 - f. Om lampan blinkar rött har inläringen misslyckats.
3. **IR-uppspelning efter återställning:**

Tryck i tur och ordning på knapparna 1 till D.
Kontrollera på IR-indikatorn att kanal 16 till 31 visas.

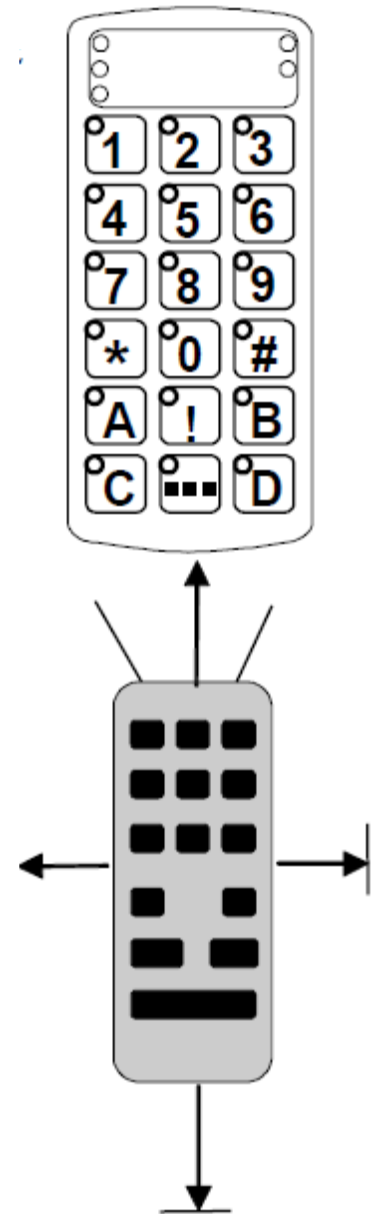

5. Rengöring

Control 18 kan rengöras med en bomullstuss lätt fuktad med Alsolsprit, Klorhexidinsprit eller Etanol.

Alternativt kan Control 18 göras rent med en **mycket hårt urvriden trasa** som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa.

6. Återställning

1. Tryck på **P** och **3**. Lampan för knapp 3 och aktuell nivå lyser nu.
2. Tryck i tur och ordning på knapparna **1**, **1**, **2**, **3**, **---**. Lamporna för nivå 1-5 blinkar rött i tur och ordning och avslutas med att lampan för *Nivå*-knappen blinkar grönt för att visa att det är klart.

7. Reservdelar

425720	Raster Control Prog/18
425776	Instickskort Control Prog/18
425775	Överdel Control 10/18
886096	Membran Control Prog/18
425780	Batterilucka Control Prog/18
425786	Kretskort Control 10/18
425790	Gavel Control Prog/18
890410	Halsrem IR-sändare
425714	IR-dioder
425770	Underdel Control Prog/18
425772	IR-fönster Control sändare

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

