

Instruktion

# Rekonditionering Control Omni

Art.nr 429000



Programversion 1.3.5 eller senare

## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
1.1 Verktyg för testning av Control Omni .....	3
2. Rekonditioneringsförfarande .....	3
2.1 Funktionskontroll .....	3
2.2 Medföljande delar .....	5
3. Rengöring .....	5
4. Apparatöversikt .....	6
Symboler .....	6
5. Återställning .....	7
6. Reservdelar .....	7
7. Testprotokoll .....	7

# 1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

## 1.1 Verktyg för testning av Control Omni

429000 Control Omni  
429010 Dockningsstation  
429050 Y-connector  
429020 Laddare  
Multimeter  
4075 Indikator eller mobilkamera  
419830 Andromeda IR-mottagare

# 2. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns och är hela/funcionerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

## 2.1 Funktionskontroll


1. Ta fram testprotokollet, finns längst ned i detta dokument. Gör ett kryss i tabellen efter varje testmoment.
2. Starta Control Omni, kontrollera att alla 5 dioderna blinkar.
3. IR: Testa att alla 6 IR-dioderna på ovankanten fungerar med en IR-indikator. Det går även att använda kameran på mobilen för att kontrollera att IR-dioderna fungerar.
4. IR-inspelning:
  - a. Tryck på ikonerna med kugghjul på första sidan.
  - b. Tryck på **Sidor/Knappar|Välj sida bläddra mellan sidorna Välj denna sida|Redigera knapp välj knapp Funktion|Omgivning|Sända IR|Spela in IR Följ instruktionerna Klar.**
5. Kontrollera Z-wave:
  - a. Gå till **Inställningar|System|GR-enhet|Exclude**
  - b. Tryck tre gånger på programmeringsknappen på Andromeda-mottagaren.
  - c. Om Control Omni bekräftar så är det OK.



## 6. Kontrollera Relä och Switch:

- a. Anslut Omni Y-Connector med två manöverkontakter inkopplade och mätinstrumentet inställt på summer.
- b. Tryck på de båda manöverkontakterna för att kontrollera skanningen.
- c. Tryck på *Relä output*-knappen, kontrollera att mätinstrumentet piper.

Inkoppling av switch och relä test:

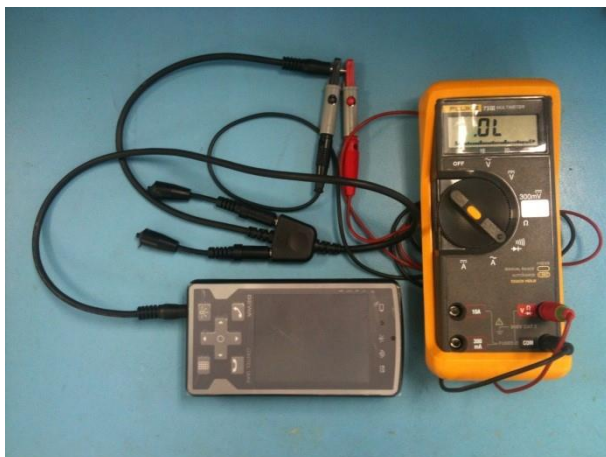

## 7. Test av Högtalare:

- a. Kontrollera att den stora högtalaren låter, t.ex när man startar skanningen.
- b. Koppla in headset och ta bort det. Kontrollera att högtalaren fortfarande fungerar.

## 8. Test av Membranknappar:

Alla knappar ska fungera. Den längs upp till höger kontrolleras genom att trycka på den vid skanning.

## 9. Kontroll av Touchdisplayen:

Kontrollera att touchdisplayen fungerar. Kontrollera att det fungerar att trycka ute i kanterna på displayen.

## 10. Kontroll av USB-kontakten:

Anslut Control Omni till en dator med USB-kabel. Kontrollera att datorn hittar Control Omni.

## 11. Kontrollera att Controll Omni fungerar i Dockningsstationen:

- a. USB: Anslut dockningsstationen med Control Omn till en dator med USB-kabel. Kontrollera att datorn hittar Control Omni.
- b. Strömkontakt: Kontrollera att Control Omni laddas. Man ser det genom att den gröna batteriindikeringen blinkar.
- c. Relä och Switch: Koppla in Omni Y-Connector med två manöverkontakter inkopplade och mätinstrumentet. Som är inställt på summer. Tryck på de båda kontakterna för att kontrollera skanningen. Se information i punkt 6 ovan.
- d. Headset: Se telefon i nästa punkt.

## 12. Kontrollera Telefon:

- a. Ring ett samtal till tex en kollega genom att knappa in ett nummer på displayen.
- b. Prata i vanlig samtalston framför Control Omni. Kontrollera att högtalare och mikrofon fungerar genom att mottagaren hör vad som sägs, samt att mottagarens röst hörs tillbaka.
- c. Anslut headsetet. Tryck på *More* och ändra volymen för att få ljud.
- d. Anslut Control Omni till dockningsstationen med headset inkopplat. Kontrollera att samtal fungerar.

## 2.2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.

429000 Control Omni



429025 Pekpenna



429020 Laddare



890410 Säkerhetsband



429035 Headset



429045 Gummiskydd



429030 Micro SD-kort



## 3. Rengöring

Control Omni kan rengöras med en bomullstuss lätt fuktad med Alsolsprit, Klorhexidinsprit eller Etanol.

Alternativt kan Control Omni göras rent med en **mycket hårt urvriden trasa** som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa.

## 4. Apparatöversikt



### Symboler

	Viktig information som måste läsas		Väcka upp bildskärm
	Indikerar anrop och knapp för anrop		Indikerar SMS-meddelande
	Indikerar IR/radio-sändning		Batteriindikering
	Svara när det ringer		Avsluta samtal
	Gå till startsida		Gå till inställningar

## 5. Återställning

Gör en fabriksåterställning. **Inställningar|System|Default settings|Factory restore|Continue|OK.**

Sätt Control Omni på slutladdning, kontrollera att den gröna dioden blinkar. När den lyser fast så är Control Omni fulladdad och den är klar att packas. Montera fast gummiskyddet över kontakterna.

Gå in i inställningar och kontrollera att Control Omni har senaste programversion, samt är uppdaterad hårdvarumässigt.

## 6. Reservdelar

429010	Dockningsstation
429020	Laddare
429035	Headset
429030	Micro SD-kort
429025	Pekpenna
429045	Gummiskydd
890410	Säkerhetsband
	Manualer

## 7. Testprotokoll

S#	Home ID	USB	SD	Touch	Knappar	Sw	Relä	IR	IR insp.	Z-wave	GSM/Högt/Mic	Headset	Ström	Laddning	Docka	Testad av:

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden  
Phone +46 (0)8-594 694 00 | [info@abilia.se](mailto:info@abilia.se) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway  
Phone +47 23 28 94 00 | [info@abilia.no](mailto:info@abilia.no) | [www.abilia.no](http://www.abilia.no)

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,  
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom  
Phone +44 (0)1954 281210 | [info@abilia.uk](mailto:info@abilia.uk) | [www.abilia.uk](http://www.abilia.uk)

