

Rekonditionering EPImobile

464240



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Viktig information.....	3
2 Medföljande delar	3
3. Rekonditioneringsförfarande.....	4
3.1 Ominstallation av applikationen Epimobile	4
3.2 Funktionskontroll	4
3.3 Testa att larmet fungerar	5
3.4 Rengöring.....	5
4. Apparatöversikt.....	5
5. Tillbehör och Reservdelar	5

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

Tänk på att EPImobile kan innehålla information som måste raderas, se kapitel 3.1 *Ominstallation av applikationen Epimobile*.

Epimobile applikationen är utvecklad för smartphone med operativsystem från Android med version 5.0.2 till 6.x.x.

För att larmet ska fungera måste applikationen Epimobile vara installerad i smartphonen och köras. Sensorn måste vara sammankopplad med smartphonen via Bluetooth. Användaren måste bära sensorn på korrekt sätt och vara i närheten av smartphonen. Smartphonen måste ha ett sim-kort med abonnemang och inställningar för larmnummer måste ha gjorts.

Larmet fungerar inte när smartphonen visar en röd Epimobile-ikon, och det inte har varit ett larm inom de senaste 5 minuterna.

För att larmet ska fungera får man inte använda batterisparande applikationer eller andra uppringare är den som är standard.

2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 5. *Tillbehör och Reservdelar*.

I kartongen ska följande finnas:

1. Epimobile Sensor (armband med sensor och inbyggt batteri).
2. Laddare till Sensor.
3. Smartphone (Android) med applikationen Epimobile installerad.
4. Laddare till smartphone.
5. Bruksanvisning EPImobile

3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska, och att alla medföljande delar finns och är hela/funcionerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljerad beskrivning.

3.1 Ominstallation av applikationen Epimobile

Applikationen Epimobile laddas ner till smartphonen. Den laddas ner genom att gå till smartphonens webbläsare och skriva in www.danishcare.dk/files/abse20.apk.

För att applikationen ska kunna installeras måste *Okända källor* vara valt i smartphonens *Inställningar* under *Säkerhet*.

När nedladdningen är klar visas den hämtade filen i rullgardinsmenyn. Tryck på den nedladdade filen och följ instruktionerna på skärmen för att installera applikationen.

För smartphone med Android 6+: När du startar applikationen Epimobile för första gången kommer den att be dig godkänna en serie av behörigheter. Dessa måste accepteras för att larmfunktionen ska fungera korrekt.

Kontrollera att sensorn är laddad och starta applikationen Epimobile. Applikationen kommer att meddela att den inte är sammankopplad med någon sensor och en ny vy öppnas som söker efter sensorer i närheten. Denna process kan ta upp till en minut. När en eller flera sensorer har hittats visas de i en lista. Varje sensor har en indikator för signalstyrka vilket gör det lättare att välja vilken sensor man vill sammankoppla, vanligtvis den med den starkaste signalen.

Klicka på sensorn i listan för att starta sammankopplingen. Efter ett tag blinkar sensorns indikeringslampa rött. Applikationen kommer att fråga om sensorn blinkar, bekräfta för att slutföra sammankopplingen. Applikationen återgår sedan till startskärmen.


Om man inte bekräftar så rensas listan och en ny sökning startar.

3.2 Funktionskontroll

Kontrollera att det inte finns några skador på telefonen.

Anslut laddare och kontrollera att telefonen tar laddning.

Anslut laddare till sensorn.

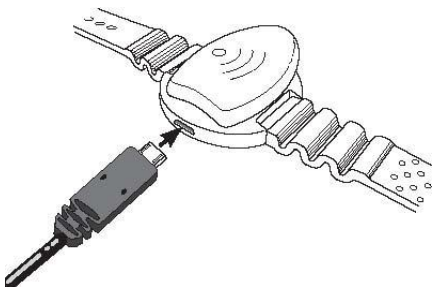

Tryck på *Power*-knappen på sidan av smartphonen till den startar. Efter ett tag visas smartphonens startsida. Kontrollera att symbolen för Epimobile visas längst upp på skärmen i notifieringslistan.

Sensorn (armbandet) är sammankopplat med smartphonen via Bluetooth vid leverans. En symbol för Bluetooth visas längst upp på skärmen i notifieringslistan. Och via Androids inställningar för Bluetooth kan man se att Sensorn är sammankopplad.

3.3 Testa att larmet fungerar


För att testa att larmet fungerar efter att man ställt in larmnummer ska man provocera fram ett larm genom att skaka på armen där Sensorn sitter. Kontrollera att Sensorn kommer i larmläge och att rätt larmnummer tar emot larmet.

Om larm inte sker, kontrollera att rätt larmnummer är angivet. Se bruksanvisningen för inställning av telefonnummer för larm.

3.4 Rengöring

Innan rengöring ska alla kablar tas ur och telefonen ska stängas av. Rengör med en mjuk trasa som fuktats med vatten. Använd inte flytande eller aerosolbaserade rengöringsmedel som kan innehålla antändbara ämnen.

4. Apparatöversikt

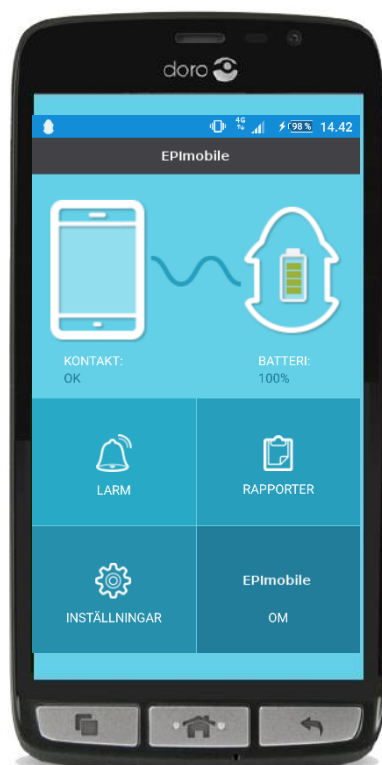

5. Tillbehör och Reservdelar

Art.nr	Namn
464224	Armband till sensor EPIsafe och EPImobile
464225	Laddare till sensor EPIsafe och EPImobile
464241	EPImobile sensor

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

