


Rekonditionering Handi Socket



ABILIA  GEWA AB FALCK IGEL		Dok.typ : Rep. / Rekond.	
HandiSocket med Handikalender		Utgåva och datum :	
Artikelnr	0371	Kontrollerat av Rep. ansva	NÄ
Ändringar, historik, version			
Datum och sign	Beskrivning :		

Rekonditionerings förfarande

Slå på HandiSocket och kontrollera att:
 Batterispänning OK
 Att laddaren fungerar OK.
 Minneskort, SD är OK. (Handiprogrammet startar).
 Alla delar rengöres med rödprit/teknisk sprit.
 Kontrollera att Handiprogrammet samt HandiTools
 är uppdaterade till senaste version
 Kontrollera att etiketter: Livboj, nyckel samt Handi
 är monterade


Artiklar som följer med

HandiSocket, Socket SoMo 650
 Pekpenna
 Minneskort, 4GB SD
 Laddare
 USB kabel
 Öronsnäckor
 Väska
 Abilia halsrem
 Bruksanvisning, Handbok HandiSocket
 Bruksanvisning, Funktionsbeskrivning Kalender
 Bruksanvisning, Handi USB-minne



Funktionstest

Anslut laddaren och kontrollera att Handifonens laddningslampa lyser rött, när enheten är fulladdad lyser lampan grönt
 Blinkande röd lampan indikerar att enhetens batterinivå är under 10%
Utför en total omstart.:

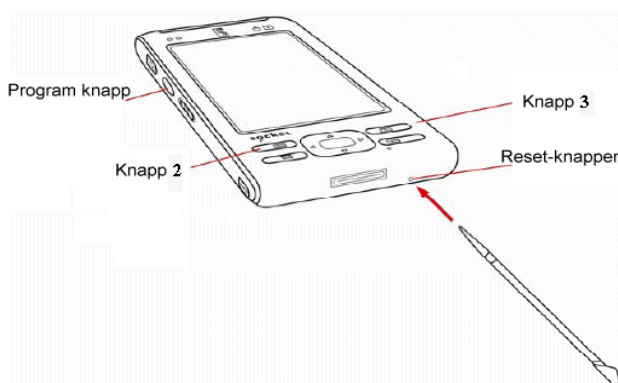

Tryck in knapparna 2, 3 och Program-knappen. Håll dem intryckta samtidigt som Reset-knappen trycks in en gång med hjälp av pekpenan.
 Efter ett par sekunder visas en vy med Sockets logga.
 Fortsätt att hålla knapparna 2,3 och Program-knappen intryckta.
 När Windows Mobile vyn visas kan knapparna släppas. Efter ett tag visas Windows startvy med texten "Tap the screen to....".
 Följ instruktionerna på skärmen.

Först ska man bara peka på skärmen. Sedan ska man kalibrera skärmen genom att med pekpenan peka exakt i mitten på de små kors som visas. Det är viktigt att göra detta noggrant. När det kommer upp en dialog som heter "Stylus" kan man bara hoppa över den, dvs tryck Skip. Därefter ska man ställa in date and time, tryck på Next (detta sätts senare i Handi programmet). OBS! När dialogrutan "Password" visas är det viktigt att trycka på Skip. (Trycker du av misstag på "Next" så börja om från början med steg 1.) Det står nu "Setup is complete". Klicka på skärmen Efter några sekunder startar sedan installationen av Handi-programvaran (under förutsättning att minneskortet sitter i) Efter detta startar Handi-installationen. Beroende på vad som finns på minneskortet sedan tidigare, kan man välja mellan olika alternativ:




Ny användare. Alla användardata raderas, och man får installera en helt ny användare.
Befintlig användare. De användardata för Handi 4 som finns på minneskortet ominstalleras.
Uppgradera. I sällsynta fall kan det finnas användardata för Handi 3 på minneskortet.
I så fall visas detta alternativ, vilket gör det möjligt att uppgradera Handi3 användardata till Handi4.

När man har valt "Ny användare" visas följande vyer:



Här väljer man vilka bildbaser som ska installeras.
Bildbasen AIR-bilder innehåller 102 st AIR-bilder och 20 st "Smileys".
Bildbasen Pictogram- och PCS-bilder innehåller 83 bilder.
Bocka för vad du vill installera och tryck på grön högerpil.

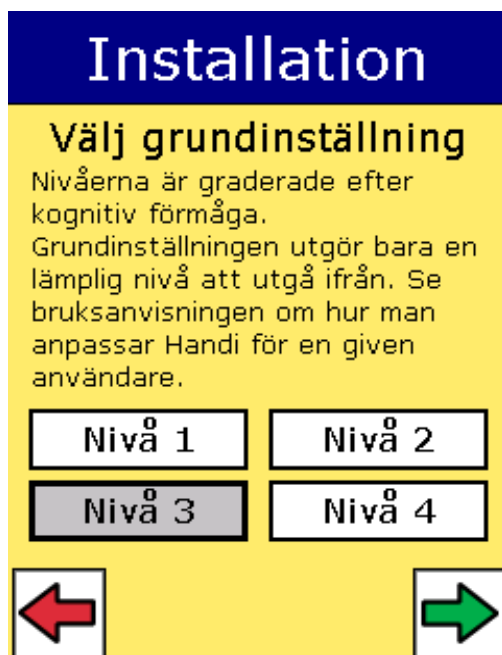

Här väljer man en grundinställning. Det finns fyra nivåer där "Nivå 1" har få förvalda Handifunktioner och lägst krav på kognitiv förmåga. Grundinställningen är bara tänkt som ett utgångsläge. Välj nivå och tryck på grön högerpil.



Här väljer man vilka funktioner som ska visas i Handimenyn, dvs vara tillgängliga för användaren. De som redan är ikryssade är ett förslag utgående från den grundinställningsnivå som valts. Kryssa för önskade funktioner och tryck på grön högerpil. När valen är gjorda drar installationsprocessen igång. (Tryck inte på skärmen under installationen) När installationen är färdig startas Handi automatiskt om och man kommer till en vy för att ställa datum och tid.

