


Rekonditionering Handi One+

Art.nr 706471

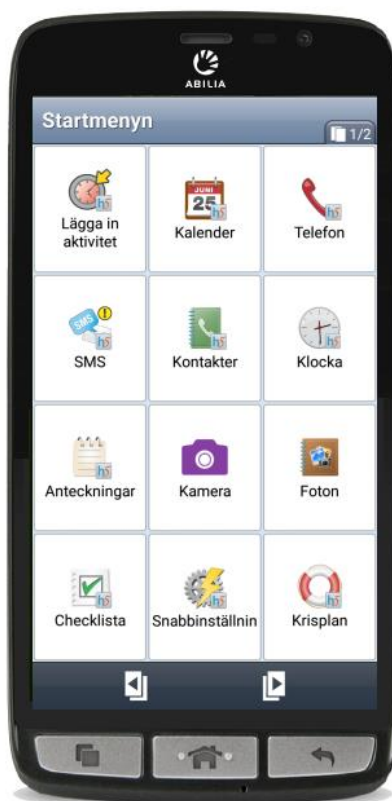

Programversion 5.3.6 eller senare

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Viktig information.....	3
1.2 Licens.....	3
1.3 Förlängning av licensen	3
2 Medföljande delar	3
3. Rekonditioneringsförfarande.....	4
3.1 Funktionskontroll	4
3.2 Rengöring.....	4
4. Apparatöversikt.....	5
5. Total omstart av Handi One+.....	6
6. Tillbehör och Reservdelar	9

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

Tänk på att Handi One+ kan innehålla information som måste raderas, se kapitel 5. *Total omstart av Handi One+.*

1.2 Licens

På Handi One+ är en licens förinstallerad. Licensen anges även på det värdebevis som levereras med produkten.

Licensen ger 3 års fria uppdateringar och fri tillgång till myAbilia. När licensen har gått ut kan man inte längre uppdatera programvaran, men man kan fortsätta att använda produkten.

I god tid före licensens utgång ges en varning om detta i Handi (3 månader, 3 veckor och 3 dagar). Det är möjligt att välja ut personer som ska få e-postmeddelande skickat till sig med påminnelse om att licensen håller på att gå ut och att den behöver förlängas. Detta görs av den som har skapat användarkontot.

Se hur man förlänger licensen i kapitel 1.3 *Förlängning av licensen.*

1.3 Förlängning av licensen

För att förlänga licensen i ytterligare 3 år beställs artikel 706362 *Handi5 SW Förlängning* från Abilia. Vid beställning, ange licensnyckel och e-postadress dit nytt värdebevis ska skickas.

För att aktivera förlängningen av licensen ska man sedan gå till **Handi Inställningar|System|Licenshantering** och trycka på *Sök licensförlängning*. Se till att internetanslutning finns.

2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 6. *Tillbehör och Reservdelar.*

I kartongen ska följande finnas:

1. Handi One+
2. Batteri
3. Skyddsfodral (monterat)
4. Laddare
5. Headset
6. USB-kabel
7. Minneskort (monterat)
8. Handbok One
9. Bruksanvisning Kalender
10. Anpassningsguide Handi5
11. Starta upp Handi
12. Värdebevis med licensnyckel
13. Torkduk

3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska, och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljerad beskrivning.

3.1 Funktionskontroll

Kontrollera att det inte finns några skador på Handi One+


Anslut laddare och kontrollera att apparaten tar laddning.

Tryck på *På/Av*-knappen (11) tills enheten vibrerar och skärmen tänds. Handi One+ startar och efter ett tag visas Startmenyn.

3.2 Rengöring

Innan rengöring ska alla kablar tas ur och Handi One+ ska stängas av. Rengör med en mjuk trasa som fuktats med vatten. Använd inte flytande eller aerosolbaserade rengöringsmedel som kan innehålla antändbara ämnen.

4. Apparatöversikt

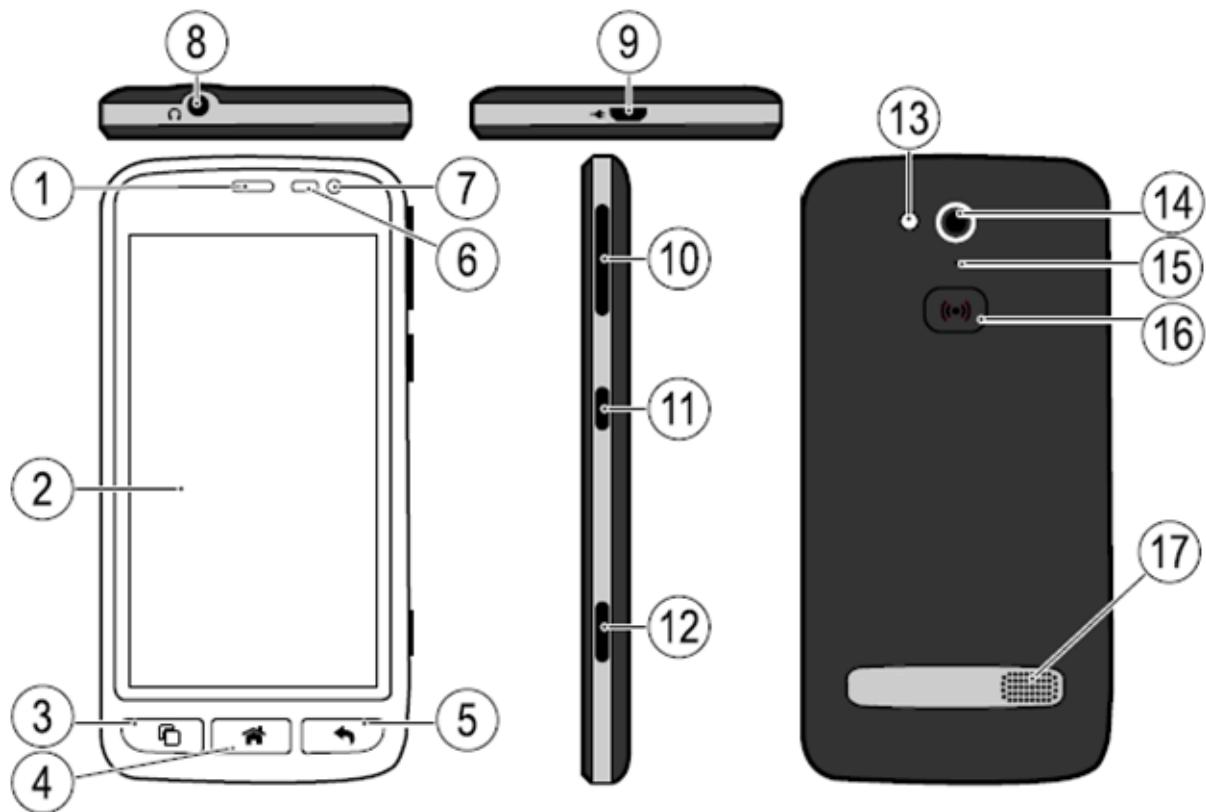

1. Hörlur
2. Pekskärm
3. Funktionsknapp *Senaste*
4. Funktionsknapp *Hem*
5. Funktionsknapp *Tillbaka*
6. Sensorer
7. Frontkamera
8. Uttag för headset
9. Uttag för laddare

10. *Volym*-knapp
11. *På/Av*-knapp
12. *Kamera*-knapp
13. Blixt
14. Baksidekamera
15. Sekundär mikrofon
16. *Krisplan*-knapp
17. Högtalare

5. Total omstart av Handi One+

Total omstart innebär fabriksåterställning och ominstallation av Handi.

Detta blir aktuellt om Handi ska lämnas till en ny användare och apparaten då först måste rensas helt på eventuella kamerabilder, Android-inställningar mm.

I en Total omstart ingår **Systemåterställning** och **Handi konfiguration**.

Systemåterställning innebär att alla appar avinstalleras och apparaten återställs så som den var när den kom från fabrik. Dock raderas inget på minneskortet.

För att kunna göra Total omstart krävs **Värdebevis** med licensnyckel samt tillgängligt **WiFi** för att kunna ansluta Handi One+ till internet.

Gör så här:

1. Gå till **Handi Inställningar|System |Licenshantering** och tryck på *Deaktivera licens*.

Nästa steg är **Systemåterställning**:

2. Gå till **Handi Inställningar|Android Inställningar|Allmänt alternativ|Avancerade inställningar|Personligt|Säkerhetskopiering och återställning|Personliga data** och tryck på *Återställ alla data på telefonen*. Tryck på knappen *Återställ telefonen* och sedan *Radera allt*.
3. Borttagning av data pågår under några minuter, sedan startar enheten om. Efter ett tag visas en välkomstvy.
4. Välj rätt språk uppe till höger.
5. En fråga "Är det här första gången du använder en smartphone?" visas. Tryck på *NEJ*.
6. Vyn grundinställningar visas, se till att "Ställ in internetåtkomst" är valt. Dra nedåt och tryck på *JA*.
7. Inställningar för WiFi visas. För att kunna ladda ner installationsfilerna för Handi måste man ansluta till WiFi.
8. En vy för Google-konto visas. Ett Google-konto rekommenderas att använda av två anledningar. Dels behöver du ett Google-konto för att kunna ladda hem appar från Play Store. Dels kan du via ditt Google-konto göra en säkerhetskopiering på dina installerade appar.
Tryck på *OK* och följ instruktionerna på skärmen. Det går att lägga till ett Google-konto senare om så önskas.
9. Tryck på *OK* och följ instruktionerna på skärmen, Villkoren för Doro måste godkännas, Tryck på *Acceptera*.
10. En vy för Googles tjänster visas. Tryck på *OK* och välj önskat alternativ. Tryck sedan på *Nästa*.
11. Vyn "Frågor" visas, tryck *NEJ*.
12. En vy "Vill du använda plats?" kan visas, välj önskat svar.
13. Andra vyer kan visas, följ instruktionerna på skärmen.
14. Sedan visas Doros startsida.
15. Stäng av AVG Antivirus genom att gå till **Allmänt alternativ|Avancerade inställningar|Enhet|Appar|Alla|Antivirus** och tryck på *Inaktivera*.


Här beskrivs hur man **överför installationsfilerna** till apparaten:


Installationen görs genom att ladda ned installationsfilerna till enheten. Enheten måste vara ansluten till Internet via WiFi.

Starta apparatens webbläsare, på Doro heter den *Chrome* och finns i mappen *Google*.


Skriv in adressen *download.myabilia.com* och tryck sedan på *Handi5*. Nu hämtas *Handi.apk*, vilket syns i statuslisten.

Här beskrivs **Handi konfiguration** (med Handi-specifika Android-inställningar):

16. Dra nedåt uppifrån på skärmen och tryck på *Inställningar* .
17. Gå till **Allmänt alternativ|Avancerade inställningar|Personligt|Säkerhet** och aktivera *Okända källor* (sätt i läge på). Svara *OK* på det meddelade som visas.
18. Dra ned statuslisten och tryck på *Handi.apk*. Följande vy visas.

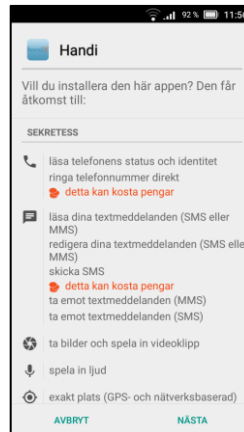

19. Tryck på *Nästa* några gånger och sedan på *Installera*. Handi-programmet installeras. En vy med "Tillåt att Google kontrollerar..." kan visas, tryck på *Avböj*. När det står "Appen har installerats" ska man trycka på funktionsknappen *Hem* (2), OBS, viktigt att man trycker på *Hem*, inte på *Färdig/Öppna*. Vyn nedan visas.
20. Välj *Handi Startmeny* och tryck på knappen *Alltid*. Vyn nedan visas.

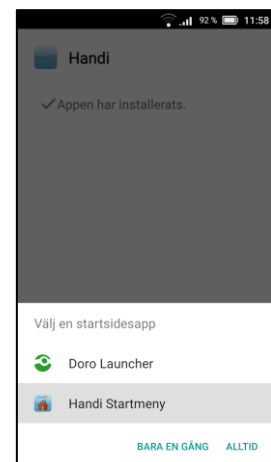

Här krävs internetanslutning.

21. Tryck på *Ange licensnyckel* för att skriva in den licensnyckel som finns på värdebeviset för **Handi5 SW**.
22. När licensen är aktiverad visas ett meddelande enligt den högra vyn. Tryck på **OK**.



23. Vyn "Hämta systemfiler" visas för att ladda ner setupfiler och röster. Välj önskad talsyntes och tryck på *Nästa*.

24. Tryck på funktionsknappen *Hem*. Följande vy visas.

25. Välj typ av konfiguration och tryck på *Nästa* .

Vid alternativ *Ny Handi-användare*: Välj grundinställning, *Nivå 1*, *Nivå 2* eller *Nivå 3* och tryck på *Nästa*. (Se kapitel 12. *Grundinställning* för beskrivning av de olika nivåerna. Nivån kan enkelt ändras senare.) Tryck på *JA* för att bekräfta den valda konfigurationen.

(Om man väljer *Befintlig användare* kommer Handi-användardata från backup-filen för den befintliga användaren att läggas tillbaka i Handi-apparna.)



26. Vyn "Välkommen till Handi5!" visas. Tryck på *Nästa*.

27. Vyn "Ställ in datum och tid" visas. Kontrollera att tidszon, datum och tid är rätt, tryck sedan på *Nästa*.

28. Vyn "Välj tangentbord" visas. Tryck på *Nästa*.

29. Vyn "Välj inmatningsmetod" visas. Välj Handi Tangentbord. (Denna inställning innebär alltså att tangentbordet alltid är alfabetiskt i porträttvy och QWERTY i landskapsvy.)

30. Om SIM-kort är monterat får man välja standardapp för SMS.

31. Vyn "Klart!" visas. Tryck på **OK** och *Färdig*. Startmenyn visas:

32. Bestäm om foton ska sparas på enhetsminne eller minneskort.



33. Se över inställningarna för skärmlås, se kapitel 5.5 i *handboken*.

34. Det kan även vara bra att gå till Android-inställningar och ställa in så Androids inställningar kan kodskyddas. Gå till **Handi Inställningar|Android Inställningar|Personlig|Allmänt alternativ|Acancerade inställningar|Personligt|System|Tillgänglighet|Tjänster|Handi** och aktivera Handi (ställ i läge På).
35. Samt att försvåra att Handi avinstalleras av misstag: Gå till **Handi Inställningar|Android Inställningar|Personlig|Allmänt alternativ|Acancerade inställningar|Personligt|Säkerhet|Enhetsadministration|Enhetsadministratörer|Handi** och aktivera Handi (ställ i läge På).
36. Välj Doros inställningsvy för WiFi i Snabbinställningar: Starta Snabbinställningar, bocka för WiFi och tryck på pilen.
37. Ställ in *Krisplan*-knappen, tryck på *Krisplan*-knappen tills en guide visas. Välj "Doro Connect & Care" och "Tryck 3 gånger". Gå till **Handi Inställningar|Android Inställningar|Trygghetsfunktioner|Min trygghetsknapp** och deaktivera (ställ i läge av).

6. Tillbehör och Reservdelar

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Antal
706476	Skyddsfodral Handi One	Skyddar enheten	1 st
706480	Skyddsskal Handi One	Skyddar baksida och kanter	1 st
706357	Laddare micro-USB	Batteriladdare inkl USB-kabel	1 st
706356	Headset 3,5 mm	Headset	1 st
	Minneskort 32GB	Monterat för lagring av foton	1 st
706481	Skärmskydd Handi One	Skyddar displayen	1 st
	Torkduk	För rengöring av skärmen	1 st

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

