

Rekonditionering Handi One

Art.nr 706470



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Viktig information.....	3
1.2 Licens.....	3
1.3 Förlängning av licensen	3
2 Medföljande delar	3
3. Rekonditioneringsförfarande.....	4
3.1 Funktionskontroll	4
3.2 Rengöring.....	4
4. Apparatöversikt.....	5
5. Total omstart av Handi One.....	6
6. Tillbehör och Reservdelar	7

1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

Tänk på att Handi One kan innehålla information som måste raderas, se kapitel 5. *Total omstart av One.*

1.2 Licens

På Handi One är en licens förinstallerad. Licensen anges även på det värdebevis som levereras med produkten.

Licensen ger 3 års fria uppdateringar och fri tillgång till myAbilia. När licensen har gått ut kan man inte längre uppdatera programvaran, men man kan fortsätta att använda produkten.

I god tid före licensens utgång ges en varning om detta i Handi (3 månader, 3 veckor och 3 dagar). Det är möjligt att välja ut personer som ska få e-postmeddelande skickat till sig med påminnelse om att licensen håller på att gå ut och att den behöver förlängas. Detta görs av den som har skapat användarkontot.

Se hur man förlänger licensen i kapitel 1.3 *Förlängning av licensen.*

1.3 Förlängning av licensen

För att förlänga licensen i ytterligare 3 år beställs artikel 706362 *Handi5 SW Förlängning* från Abilia. Vid beställning, ange licensnyckel och e-postadress dit nytt värdebevis ska skickas.

För att aktivera förlängningen av licensen ska man sedan gå till **Handi Inställningar|System|Licenshantering** och trycka på *Sök licensförlängning*. Se till att internetanslutning finns.

2 Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 6. *Tillbehör och Reservdelar.*

I kartongen ska följande finnas:

1. Handi One
2. Batteri (monterat)
3. Skyddsfodral (monterat)
4. Laddare
5. Headset
6. USB-kabel
7. Handbok One
8. Bruksanvisning Kalender
9. Anpassningsguide Handi5
10. Starta upp Handi
11. Värdebevis med licensnyckel
12. Torkduk

3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska, och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljerad beskrivning.

3.1 Funktionskontroll

Kontrollera att det inte finns några skador på Handi One.


Anslut laddare och kontrollera att apparaten tar laddning.

Tryck på *På/Av*-knappen (11) tills enheten vibrerar och skärmen tänds. Handi One startar och efter ett tag visas Startmenyn.

3.2 Rengöring

Innan rengöring ska alla kablar tas ur och Handi One ska stängas av. Rengör med en mjuk trasa som fuktats med vatten. Använd inte flytande eller aerosolbaserade rengöringsmedel som kan innehålla antändbara ämnen.

4. Apparatöversikt

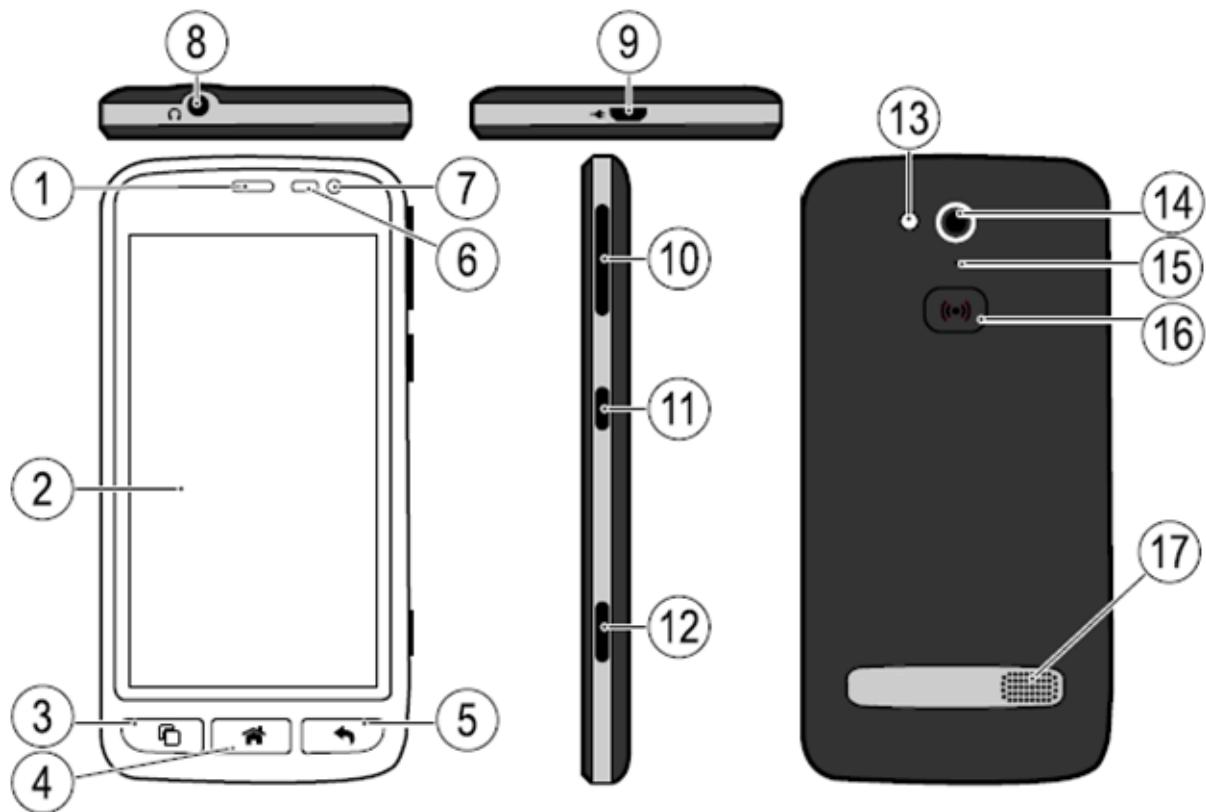

1. Hörlur
2. Pekskärm
3. Funktionsknapp *Senaste*
4. Funktionsknapp *Hem*
5. Funktionsknapp *Tillbaka*
6. Sensorer
7. Frontkamera
8. Uttag för headset
9. Uttag för laddare

10. *Volym*-knapp
11. *På/Av*-knapp
12. *Kamera*-knapp
13. Blixt
14. Baksidekamera
15. Sekundär mikrofon
16. *Krisplan*-knapp
17. Högtalare

5. Total omstart av Handi One

Total omstart innebär fabriksåterställning och ominstallation av Handi.

Detta blir aktuellt om Handi ska lämnas till en ny användare och apparaten då först måste rensas helt på eventuella kamerabilder, Android-inställningar mm.

I en Total omstart ingår **Systemåterställning** och **Handi konfiguration**.

Systemåterställning innebär att apparaten återställs så som den var när den kom från fabrik.

För att kunna göra Total omstart krävs **Värdebevis** med licensnyckel samt tillgängligt **WiFi** för att kunna ansluta Handi One till internet.

1. Gå till **Handi Inställningar|System|Licenshantering** och tryck på *Deaktivera licens*.
2. Gå till **Handi Inställningar|Android Inställningar|Personligt|Säkerhetskopiering och återställning|Personliga data** och tryck på *Återställ standardinst.* Tryck på knappen *Återställ telefonen* och sedan på *Radera allt*.
3. Återställningen pågår under några minuter, sedan startar apparaten om och visar en vy med två knappar: *Enter license key* och *Open Settings*.
4. Tryck på knappen *Open Settings*.
5. Gå till **Wi-Fi** och logga in på tillgängligt trådlöst nätverk.
6. Gå till **Language & input**, tryck på *Language* och välj *Svenska*.
7. Tryck på *Hem*-knappen.
8. Tryck på *Ange licensnyckel* för att skriva in den licensnyckel som finns på värdebeviset.
9. När licensen är aktiverad visas ett meddelande om detta. Tryck på *OK*.
10. Vyn "Hämta systemfiler" visas för att ladda ner setupfiler och röster. Välj önskad talsyntes och tryck på *Nästa*.
11. Nu startar en **konfigurationsguide för Handi**. Följ instruktionerna och välj "Ny användare".
12. Vyn "Välkommen till Handi5!" visas. Tryck på *Nästa*.
13. Vyn "Ställ in datum och tid" visas. Kontrollera att tidszon, datum och tid är rätt, tryck sedan på *Nästa*.
14. Vyn "Klart!" visas. Tryck på *OK*. Startmenyn visas nu.
15. Uppdatera till senaste version av Handi: Gå till **Handi Inställningar|System|Om Handi** och tryck på *Sök uppdatering*. (För mer detaljerad beskrivning, se kapitel 10. *Uppdatera Handi One i Handboken*)
16. Se över inställningarna för skärmlås, se kapitel 5.5 *Skärmlås och säkerhetslås i Handboken*.
17. Det kan även vara bra att gå till Android-inställningar och ställa in så Androids inställningar kan kodskyddas Gå till **Handi Inställningar|Android Inställningar|Personligt|System|Tillgänglighet|Tjänster|Handi** och aktivera Handi (ställ i läge På).

6. Tillbehör och Reservdelar

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Antal
706476	Skyddsfodral Handi One	Skyddar enheten	1 st
706480	Skyddsskal Handi One	Skyddar baksida och kanter	1 st
706357	Laddare micro-USB	Batteriladdare inkl USB-kabel	1 st
706356	Headset 3,5 mm	Headset	1 st
706481	Skärmskydd Handi One	Skyddar displayen	1 st
	Torkduk	För rengöring av skärmen	1 st

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

