

Rekonditionering MEMOdayplanner/MEMOdayplanner 2

Art.nr 508701/508770



Innehållsförteckning

1. Inledning	3
1.1 Viktig information	3
2. Rekonditioneringsförfarande.....	3
3. Funktionskontroll	4
4. Medföljande delar	4
5. Rengöring	4
6. Reservdelar/Tillbehör	5



1. Inledning

Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information

2. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

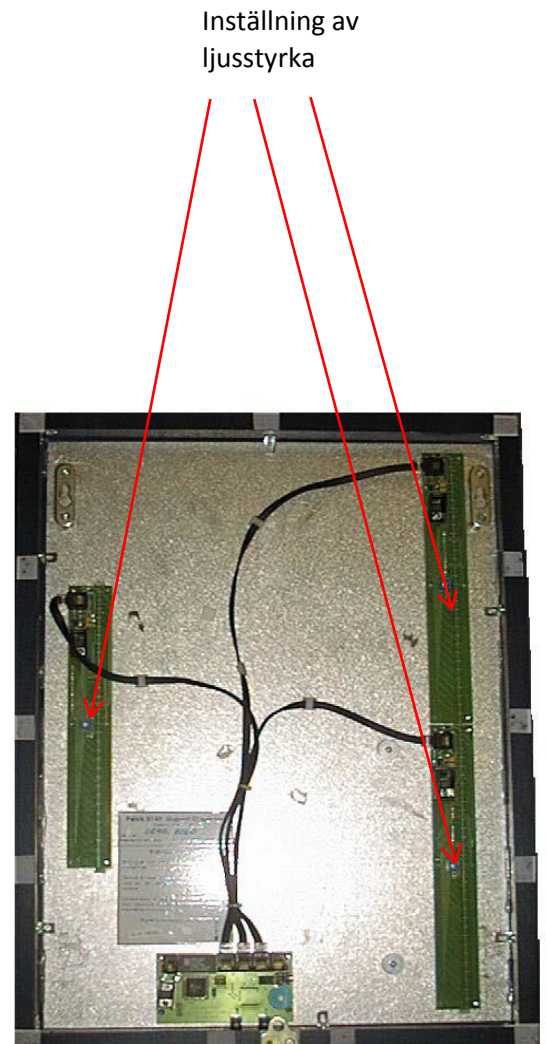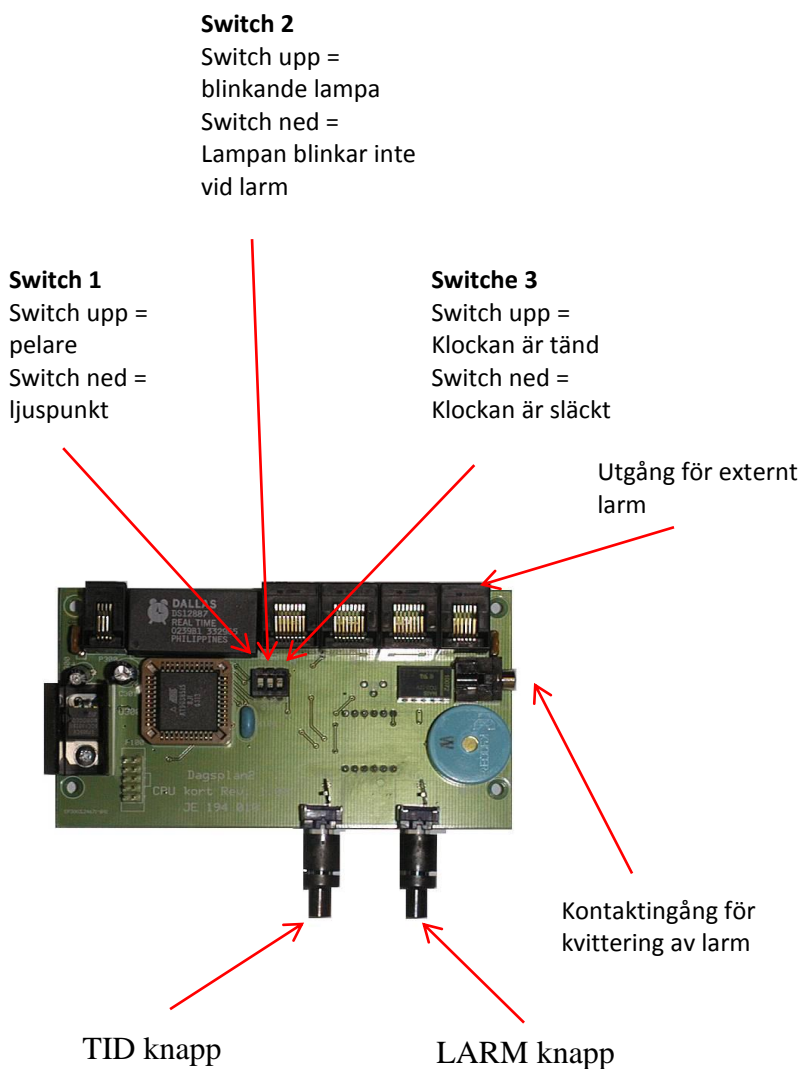

3. Funktionskontroll

Kontrollera följande funktioner när MEMOdayplanner är ansluten till ett eluttag:

1. Kontrollera att alla lysdioder fungerar på alla 3 kretskorten.
2. Ställ tid till 07:00, kontrollera att samtliga röda lysdioder lyser.
3. Ställ tid till 23:00, kontrollera att samtliga blå lysdioder lyser.
4. Återställ till aktuell tid.
5. Kontrollera dipswitch 1, ON=lysande stapel, OFF=lysande punkt.
6. Kontrollera dipswitch 2, ON=blinkande lampa vid larm, OFF=lampan blinkar inte vid larm.
7. Kontrollera dipswitch 3, ON=digital visning tänd, OFF=digital visning släckt.
8. Ställ in ett larm och anslut en kontakt i avsedd ingång.
När larmet går, kontrollera att larmet kan stängas av med kontakten.
9. Ställ in ett larm och anslut ett externt larm i avsedd utgång.
Kontrollera att det externa larmet ljuder när inställt larm går.

4. Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.

508770	MEMOdayplanner
508727	Strömförsörjning 9525/ 12V till MEMOdayplanner
500705	Tillbehörsset till MEMOdayplanner
	Manual
	Idéhäfte

5. Rengöring

Alla delar utom whiteboard rengörs med en trasa fuktad med rengöringsmedel och vatten. Whiteboard rengörs med avfettningsmedel.

6. Reservdelar/Tillbehör

500705	Tillbehörsset till MEMOdayplanner
500703	Kognitivt anpassningsmaterial till MEMOdayplanner
500706	Magnetband med klocksymboler (analog visning)
500707	Magnetband med 24-timmars visning
500708	Magnetband utan text (för att dölja information)
508765	Bakstycke till MEMOdayplanner
500710	Whiteboard till MEMOdayplanner
500743	Ram till MEMOdayplanner
500761	CPU-kretskort till MEMOdayplanner
500762	Kretskort till MEMOdayplanner, lysdiodkort röd. Dag
500763	Kretskort till MEMOdayplanner, lysdiodkort blå. Natt
500908	Expo Cleaner till MEMOdayplanner
508722	Tavelsudd Magnetisk till MEMOdayplanner